

器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 JMDN コード 70459000

オプチプローブイリゲーションニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 本品の材質に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴ある医療従事者及び患者への使用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：ポリプロピレン、ラバー、ステンレス鋼

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者： Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd
(国名：中華人民共和国)

【使用目的又は効果】

根管等の洗浄のため、洗浄液の注入器具として使用する。

【使用方法等】

- (1) 1.2 cc シリンジを装着する。
- (2) シリンジから洗浄液を押出しながら、歯根管等を洗浄する。

[使用方法に関する使用上の注意]

- (1) シリンジを確実に装着すること。
- (2) 1.2 cc シリンジ以外には使用しないこと。
- (3) 洗浄液等が漏れていないことを確認すること。

【使用上の注意】

- (1) 本品を再使用しないこと。
- (2) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (3) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 過度に圧をかけて使用しないこと。
- (5) 手袋を着用して使用すること。
- (6) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (8) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。