

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 排気用チューブ コード 70354000
ユニマックス 排煙チューブ

再使用禁止

JUXF0061

【禁忌・禁止】


使用方法

- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

*全体図（例）

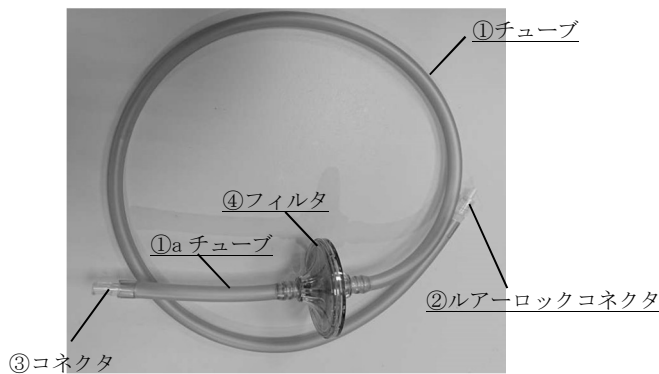

*①チューブにクランプが付いているタイプや、①aのチューブと③コネクタが付いていないタイプもある。
また③はメスルアーロックコネクタとフレキシブルコネクタの2タイプがある。

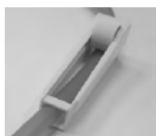

ローラーランプ



タオルクランプ



メスルアーロックコネクタ



フレキシブルコネクタ

2. 原理

内視鏡手術時に生じたサージカルスモークが体外に排出される際、フィルタを通じて、その中の粒子等をろ過する。

【使用目的又は効果】

内視鏡下手術時に内視鏡用処置具又はトロカールとの接続に用いる柔軟性のある排気用チューブで、活性炭を含むフィルタが付いている。

【使用方法等】

1. トロカール等に付属する活栓のメスコネクタに、本品のルアーロックコネクタを接続する。
2. 活栓を「閉」の位置にする。
3. チューブを伸ばしフィルタ端を邪魔にならない位置へ置き、本品付属のタオルクランプあるいは布鉗子等を使用し位置固定する。
4. 気腹が安定したら、トロカール等に付属する活栓を開放する。
電気手術器及び高周波処置具を使用する場合は、大量の煙霧が頻繁に排出されるため、速やかにローラーランプを開放状態にする。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・トロカール等への接続が十分であることを再度確認すること。
- ・過度に力を加えないこと。[本品の損傷や機能が保てなくなるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存すること。

[有効期間]

- ・包装の使用期限欄を参照 [自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

■外国製造業者

ユニマックスメディカルシステムズ
(Unimax Medical Systems Inc.)
台湾