

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ コード 70353000
ユニマックス 気腹チューブ

再使用禁止

JUXF0030

【禁忌・禁止】**適用対象(患者)**

- ・内視鏡下手術が禁忌とされている患者には使用しないこと。
[設計の意図に含まれていないため]

使用方法

- ・再使用禁止


■外国製造業者

ユニマックスメディカルシステムズ
(Unimax Medical Systems Inc.)
台湾

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

全体図 (代表例)

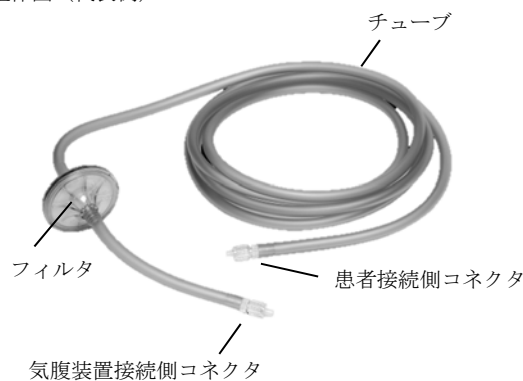

本品のチューブ及び気腹装置接続側コネクタ (フレキシブル) はポリ塩化ビニル [可塑剤：テレフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)] を使用している。

2. 原理

本品は気腹操作において、気腹装置と気腹針又はトロッカーを接続する柔軟性のあるチューブである。フィルタによって埃等をろ過する。

【使用目的又は効果】

気腹装置と気腹針又はトロッカーとの接続に用いる柔軟性のあるチューブであり、フィルタを含む。

【使用方法等】

1. 気腹装置接続側コネクタを気腹装置に接続し、チューブ内にCO₂ガスを流して空気を排出する。
注：フィルタからのチューブ長の短い方が、気腹装置接続側コネクタである。
2. 患者接続側コネクタを気腹針又はトロッカーのポートに接続する。
注：気腹針又はトロッカーの添付文書を参照のこと。
3. 気腹装置を操作し、気腹を行う。
注：気腹中は気腹針又はトロッカーが腹壁から抜けていないかを常に確認し、同時に腹腔内圧をモニターする。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

[有効期間]

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**■製造販売業者**

株式会社ジェイエスエス
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

株式会社ジェイエスエス