

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック JMDN 37240020

アイシングパッドSPU

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造及び各部の名称等
サイズの異なる2種類がある。

・アイシングパッドSPU スモール



パッド部
(ポリエステル)
チューブ部
コネクタ部

・アイシングパッドSPU ノーマル



パッド部
(ポリエステル)
チューブ部
コネクタ部

2. 使用環境条件

- ・周囲温度: 10°C~30°C
- ・相対湿度: 30%~75%
- ・気圧: 700 hPa~1,060 hPa

【使用目的又は効果】

消炎鎮痛処置(寒冷療法)を行うパッドである。冷却装置で冷却媒体の入ったパッドを冷却し、患部に当てるものである。

【使用方法等】

当社アイシングシステムの取扱説明書も参照すること。

1. 本品をホースに接続する。
2. パッドの位置を患部に合わせて装着する。
3. 治療を開始する。
4. 治療終了後、患部から本品を取り外す。
5. 本品をホースから取り外す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は1人の患者のみに使用する(単一患者使用)。他の患者に使い回さない。感染症を引き起こすおそれがある。
- ・創傷部位に使用する場合、必ずドレッシング材を当てた状態で冷却パックを装着する。本品を創傷部位に直接装着することを意図していない。
- ・本品は当社アイシングシステム専用の冷却パッドである。

<その他の注意>

- ・当社アイシングシステムに接続し、循環不良のエラーが発生した際は患部からパッドを取り外し、パッドの折れ曲がりや固定カバー(別売品)の締め具合に注意して患部に装着する。
- ・チューブ部を折り曲げたり、ねじったりした状態で冷却しない。循環不良の原因となる。
- ・本品に水漏れ等の破損が認められた場合には、ただちに使用を中止し、新しいものと交換する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管環境>

- ・周囲温度: 0°C~60°C
- ・相対湿度: 30%~85%
- ・気圧: 700 hPa~1,060 hPa

<保管方法>

- ・パッド部やチューブ部が折れ曲がっていない状態で保管する。
- ・直射日光が当たらない場所で保管する。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品を消毒・滅菌しない。破損の原因となる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 日本シグマックス株式会社

連絡先 電話: 0800-222-6122

製造業者: 日本シグマックス株式会社 柏物流センター