

《製品保証書》

| | |
|------|------------|
| お客様名 | |
| ご住所 | (〒 -) |
| 電話番号 | () - |
| ご購入日 | 年 月 日 |
| 販売店名 | |
| 商品名 | マゼラン HJ-1型 |

大同化工株式会社

〔保証事項〕

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ日から1年間の保証期間内であれば、本体部分に限り無償修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、御施設名と電話番号をお申し出ください。尚、送付される場合には送料をご負担下さい。
- 3.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - ①本保証書を同封頂けなかったとき。又は、所定事項に未記入があったとき。
 - ②火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ③お買上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
 - ④説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
 - ⑤改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
 - ⑥消耗部・消耗品類の交換
- 4.本製品故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては当社はその責に任じません。
- 5.保証は日本国内においてのみ有効です。


錠剤選別器

マゼラン取扱説明書



 **DAIDO** 大同化工株式会社

1. 各部の名称

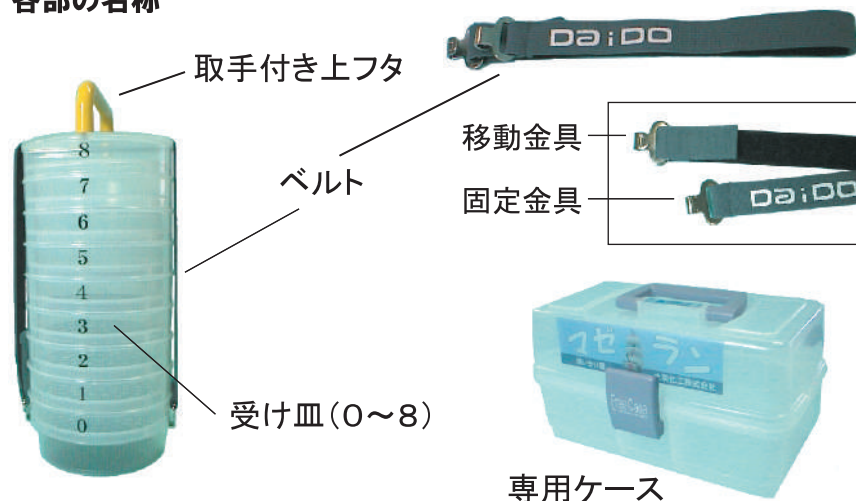

2. 使い方



- ① 必要な受け皿を重ねます。
- ② 錠剤を入れます。
- ③ フタをかぶせます。
- ④ 長さを調整したベルトの移動金具から先にかけ…
- ⑤ 本体を押さえながら固定金具を取り付けます。
- ⑥ ベルトにゆるみがないか確認してください。
- ⑦ 回すように優しく振ってください。

3. 注意事項

- ・ 受け皿の一番下には必ず、0番の受け皿を置いてください。これが無ければ直径6mm以下の錠剤が飛び出してしまうます。
- ・ 受け皿は下から数字の小さい順に必要な分だけ重ねてください。順番が逆になると正しくふるい分けできません。
- ・ ふるい分け後に、同じ受け皿に複数種類の錠剤がたまるありますが、これは錠剤をサイズ別にふるい分けをしているためです。
- ・ 使用しない時は、ベルトを外してください。ベルトをつけっ放しにするとゴムが伸びて使えなくなることがあります。
- ・ 受け皿のステンレス板は取り外さないでください。湾曲して戻らなくなります。

＜専用ケースへの収納＞

- ① 受け皿を積み上げ
- ② フタを裏返してのせます
- ③ そのままケースへ寝かせ
- ④ 手前のベルト収納隙間にベルトを立てて入れます。



＜ベルトの長さ調整＞

- ① 移動金具のマジックテープを外します。



- ② 移動金具を任意の位置まで移動させ



- ③ マジックテープを留めます。



※ ベルトは消耗品ですので伸びて使えなくなった時はお求めください。

＜ステルスケースミニ＞

錠剤の配分には、別売の『ステルスケースミニ』が便利です。



品番：HS-002
サイズ：W150×D103×H27 (mm)
材質：ステンレス製

《仕様》

| | |
|------|---------------------|
| 品名 | マゼラン |
| 品番 | HJ-1型 |
| 寸法 | 高さ 300 × 径 115 (mm) |
| 重量 | 570g |
| 材質 | 受け皿(筒部) PP樹脂 |
| | 受け皿(底板) ステンレス |
| 篩サイズ | 直径 10、9、8.5、8 |
| | 7.5、7、6.5、6 (mm) |

《お問合せ先》



大同化工株式会社

〒570-0002
大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号

(TEL) 06-6901-1855
(FAX) 06-6901-1910

ホームページ <http://www.daido-kako.com>
メールアドレス info@daido-kako.com