

## ■ 駆血帯(井の内氏)金具の種類

新型(Bタイプ)と旧型(Aタイプ)の2種類があります。

松吉医科器械株式会社



**新型(Bタイプ)**  
チューブをクリップに  
挟むタイプ

### 新型(Bタイプ)チューブの取り付け方法



①金具を裏返しにして、  
バネからクリップを  
右に開いて「パチン」と  
外します。



②クリップの下の方から  
チューブを通します。



③チューブが1cm程度出る  
ところまでチューブを  
差し込んでください。



④チューブを挟んだまま  
クリップをもう一度バネに  
「パチン」と引っ掛けて  
完成です。



**旧型(Aタイプ)**  
チューブを穴に通す  
タイプ

### 旧型(Aタイプ)チューブの取り付け方法



①金具の上部を押し上げて、  
2番目に通す穴を広げます。



②1番目の穴に下から  
チューブを通す。



③2番目の穴に上から  
チューブを通す。



④チューブが通り、長さを  
調節したら、①で金具の  
上部を押し上げた分だけ  
元に戻して完成です。

