


■ 駆血帯(井の内氏)金具の種類

新型(Bタイプ)と旧型(Aタイプ)の2種類があります。


松吉医科器械株式会社

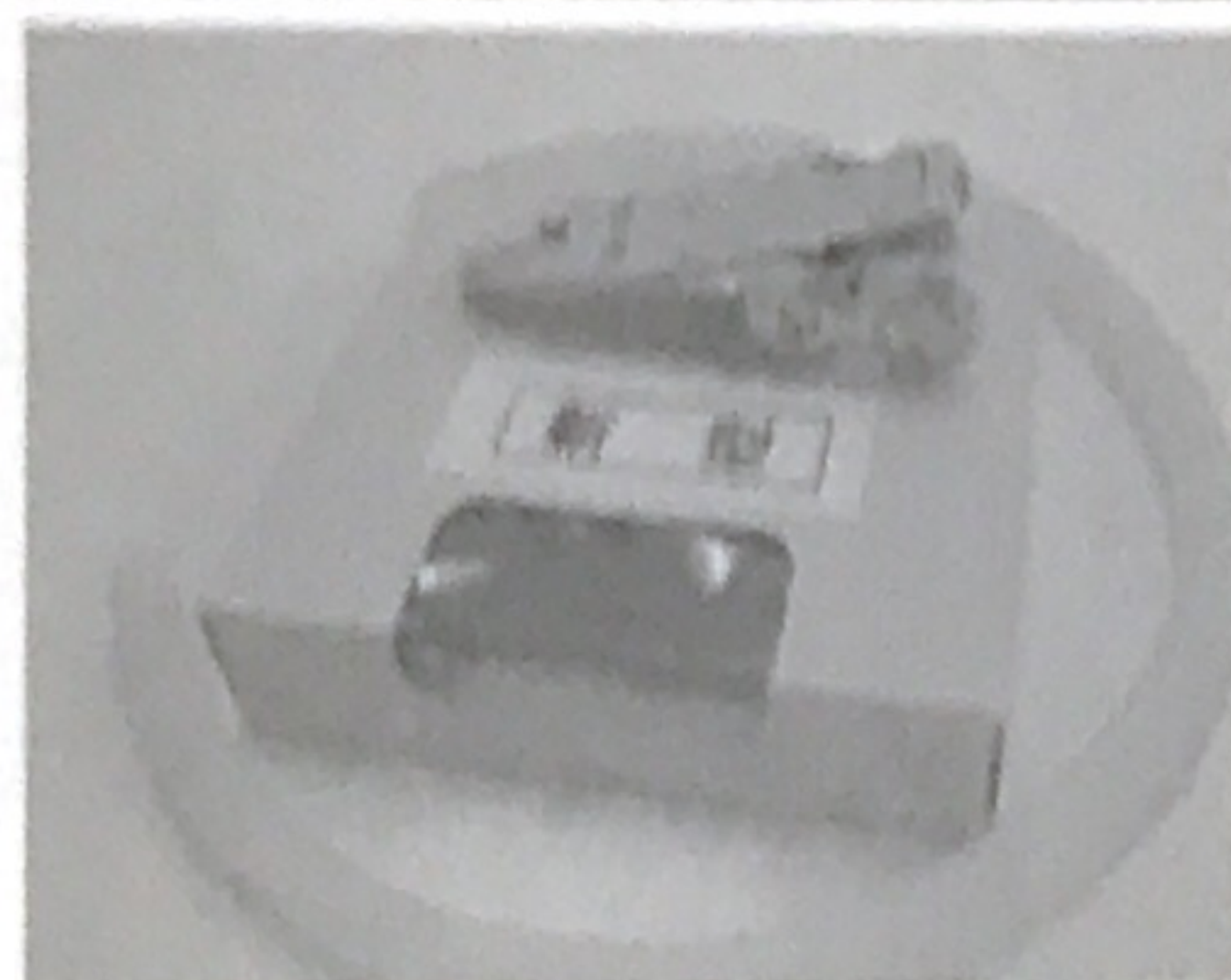

新型(Bタイプ)

チューブをクリップに挟むタイプ

新型(Bタイプ)チューブの取り付け方法

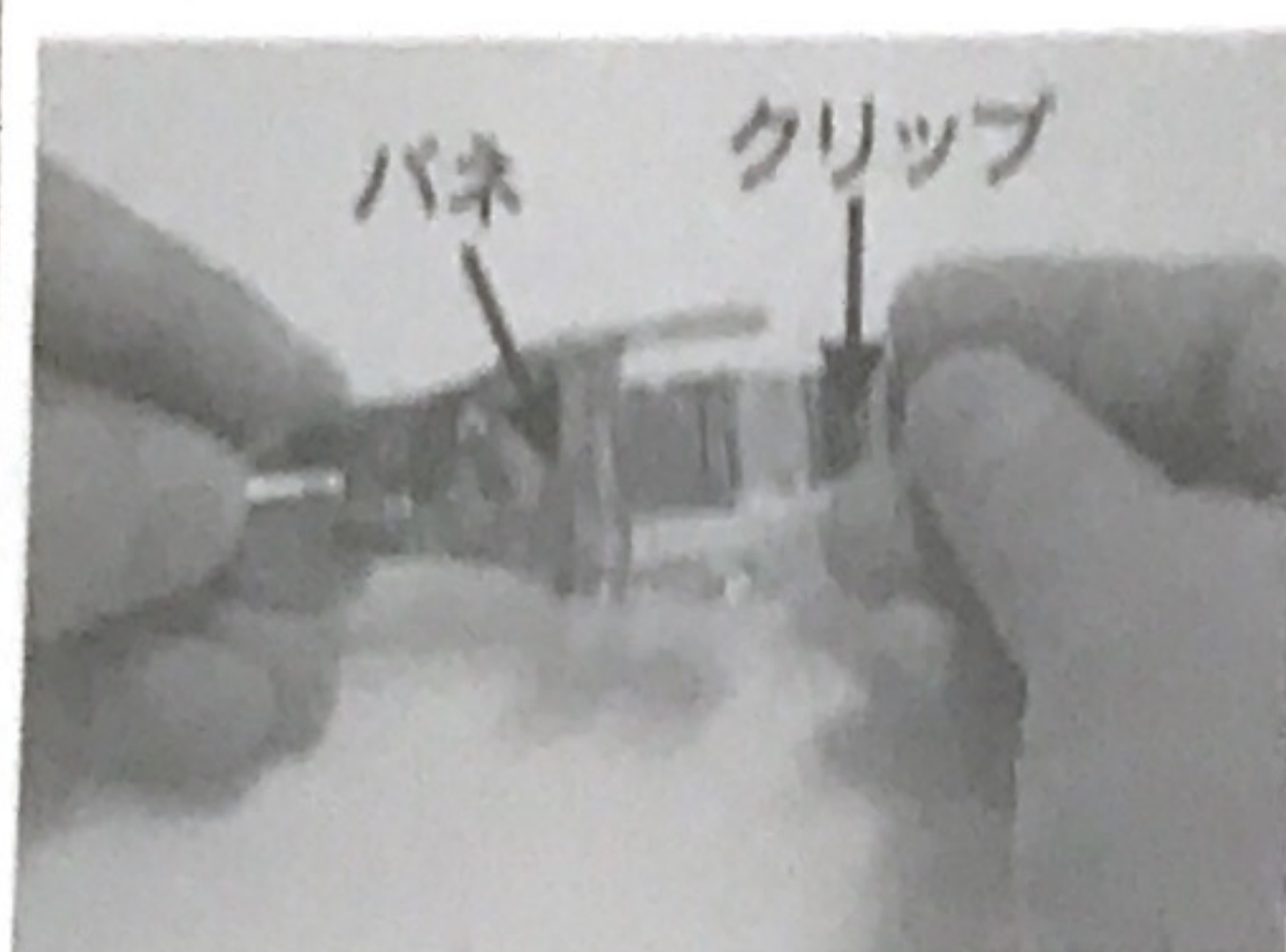


①金具を裏返しにして、バネからクリップを右に開いて「パチン」と外します。




②クリップの下の方からチューブを通します。



③チューブが1cm程度出るところまでチューブを差し込んでください。

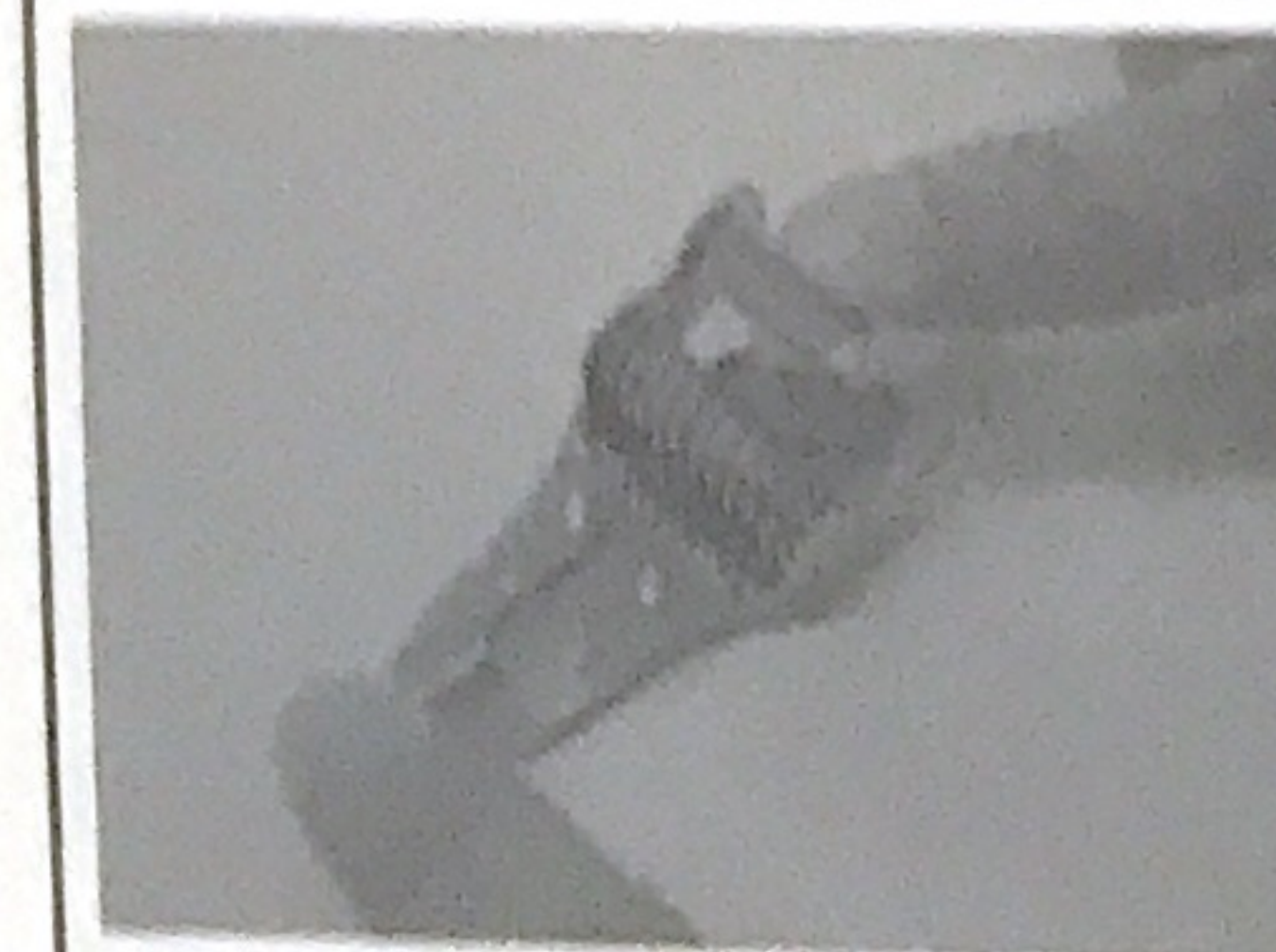


④チューブを挟んだままクリップをもう一度バネに「パチン」と引っ掛けて完成です。

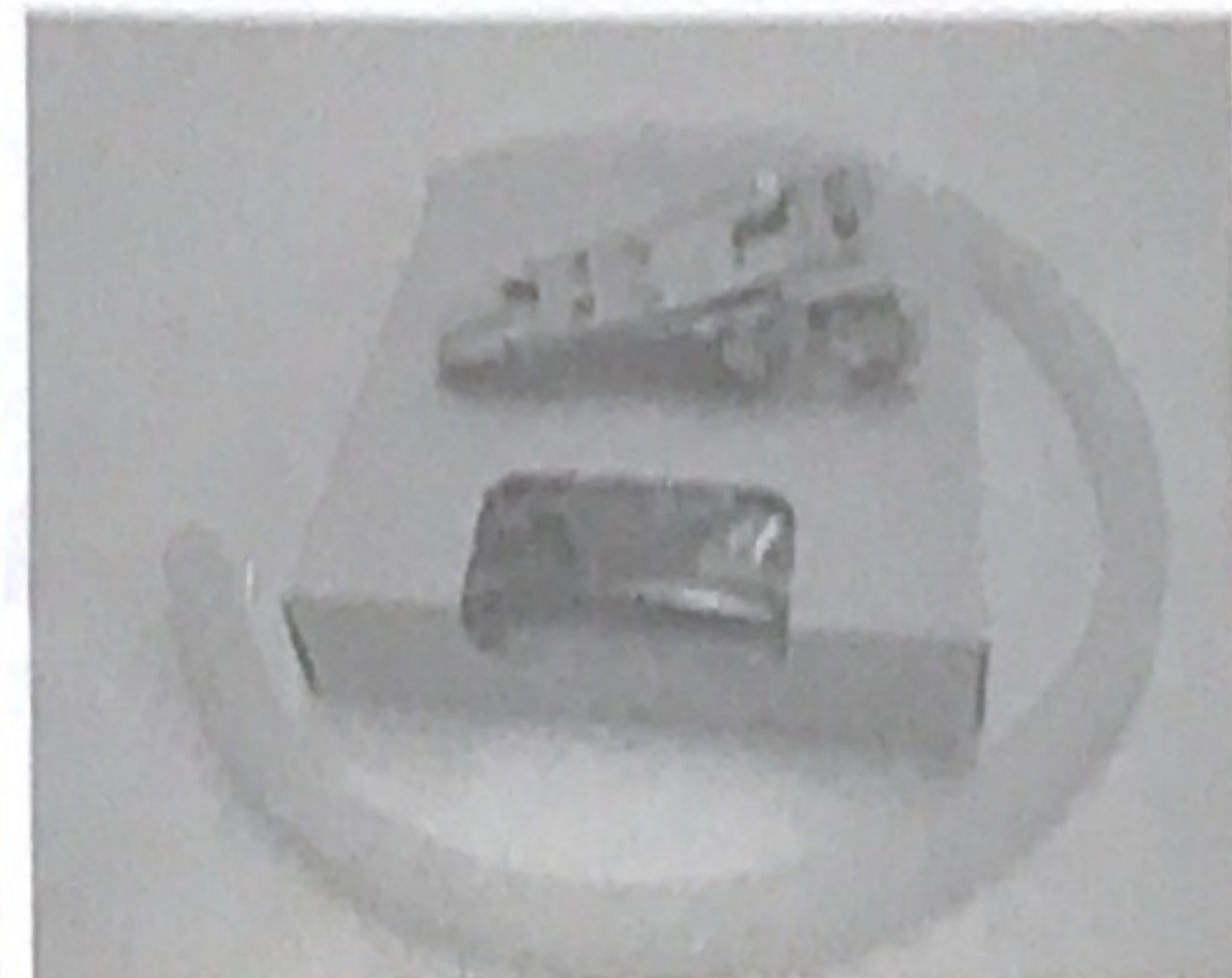


旧型(Aタイプ)

チューブを穴に通すタイプ

旧型(Aタイプ)チューブの取り付け方法

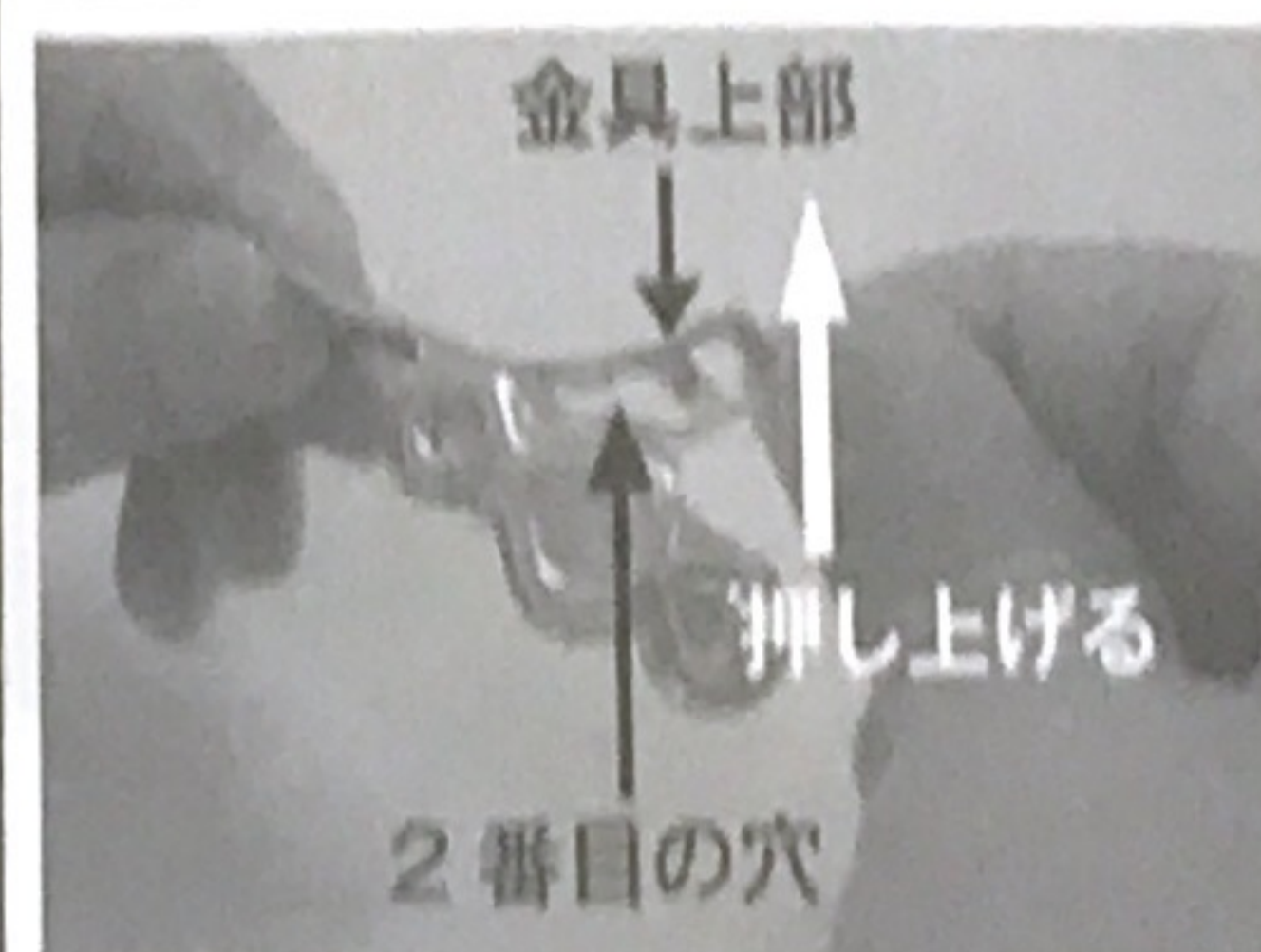

①金具の上部を押し上げて、2番目に通す穴を広げます。

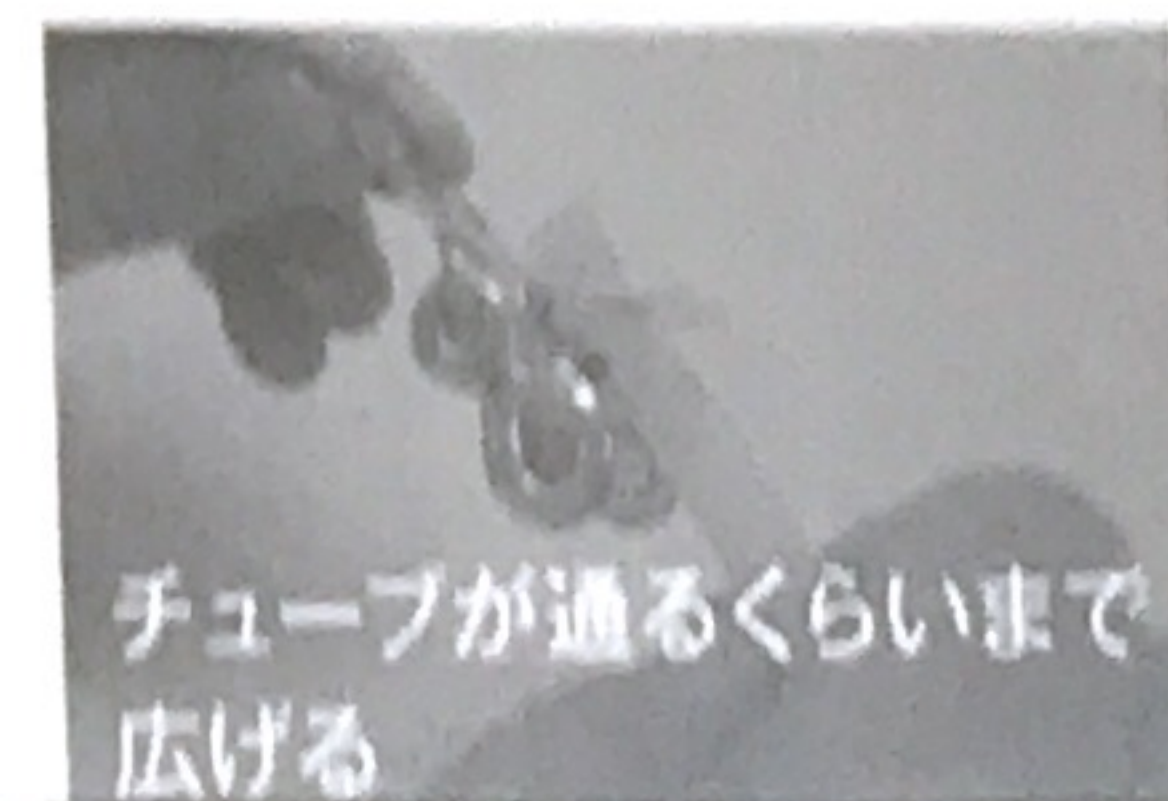

②1番目の穴に下からチューブを通す。



③2番目の穴に上からチューブを通す。



④チューブが通り、長さを調節したら、①で金具の上部を押し上げた分だけ元に戻して完成です。