




足部治療の専門家が推奨! DSISソルボメディ

衝撃吸収力に優れたフルインソールタイプ

3つのアーチサポートが 足指の機能を高め、 足のトラブルを軽減する。

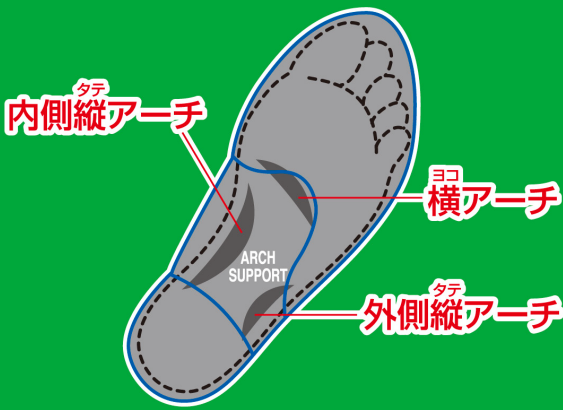

足のドクターが考えた! 医療の現場で使用されているトラブル対策インソール。



SORBOTHANE

からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」

衝撃吸収実験 テレビCMより ※危険ですので、マネをしないでください。

SORBOTHANE

DSIS


ダイナミック・シュー・インソール・システム
ソルボ®ソルボセイン®は三進興産(株)の登録商標です。

ここからお開けください。

足のトラブル対策インソール DSISソルボメディ

こんな方に

- 足・ひざ・腰にトラブルのある人
- 足を痛めたことのある人
- 足底のアーチが低下している人
- 足が疲れやすい人
- 外反母趾や指の曲り、タコ、ウオノメのある人

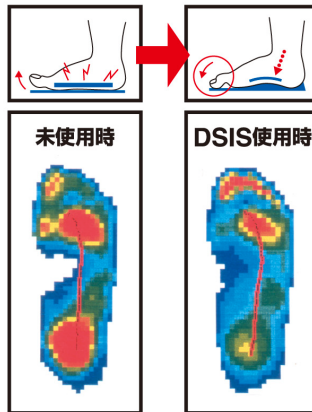

キチンと歩けること、
これこそがDSISの目的。

NPOオソティックソサエティー理事長
医学博士 内田俊彦

現代人の足は、靴の善し悪しによって大きな影響を受けています。膝・腰の痛みは足に問題のあることが多く、外反母趾等はそのトラブルの代表例といえるでしょう。我々NPOオソティックソサエティーが考案した「DSIS」は人の足の動きをこの中敷で調整し、足のトラブルを軽減しようというシステムです。DSISの特徴は足裏にある「3つのアーチ」をサポートすること。これにより、足指がしっかり使え、歩行がリズムカルになり、足が疲れにくくなります。まさに医療の現場からフィードバックされたインソール、それが「DSISソルボメディ」なのです。

● NPOオソティックソサエティーとは、足の専門家である医師や理学療法士などを中心とした、足の機能やトラブルを幅広い視野を持って考える研究集団です。


- 未使用時には、かかとと前足の中央部に強い圧力(赤色部)が集中。これが足裏部やかかとの痛みの原因です。
- DSISを使用するとこれらの圧力は分散され(赤色がなくなっている)、足の指の部分には適当な圧力(赤・黄色部)が加わり、しっかりと指先が使われていることが分かります。
- スムーズな体重移動がなされ(中央の赤い線がなだらかに親指に向かって)、バランスのとれた歩き方ができます。

SORBOTHANE からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」


人間の筋肉は衝撃に対してすばやく変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力も分散します。「ソルボセイン」はその筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。 ※人間の筋肉そのものを代替するものではありません。



ソルボセイン
圧力を均一に分散、当たりが非常にソフトで下からの衝撃も感じません。

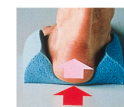

スポンジ
フワフワしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、あたりを感じます。

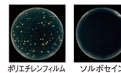

抗菌衛生
ソルボセインは抗菌性に優れ、バクテリア等の菌の増殖を抑える衛生的な素材です。(一般財団法人カナンテストセンター調べ 抗菌性試験 JIS Z2801に基づく)

衝撃吸収 圧力分散

使用上の注意 DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用には差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。またゆとりのある靴でご使用ください。

動きの激しいスポーツ等でのご使用は、破損の原因となる場合があるのでお避けください

使用方法
必ずお読みください。

- ① 靴にあったサイズを選んでください。
- ② 使用する靴にインソールが付いている場合は、外してください。
- ③ 生地面を上にして、左右を確認してください。
- ④ 靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
- ⑤ 汚れた場合は石けんと水で軽く洗って陰干ししてください。

サイズ

3S (22.0~22.5cm) 2S (23.0~23.5cm) S (24.0~24.5cm)
M (25.0~25.5cm) L (26.0~26.5cm) 2L (27.0~27.5cm)

品質表示 品名/中敷(フルインソール) 材質/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) 布地/ポリエステル MADE IN JAPAN 日本製

製造元 三進興産株式会社
http://www.sorbo-japan.com/

東京/東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー 〒169-0074
TEL.03(6338)8590 FAX.03(6338)8599
大阪/大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー23F 〒530-0005
TEL.06(4707)2371 FAX.06(4707)2399

