


# 交流式 洗髪シャワー

## 取扱説明書 保証書つき

ケー ス 1 1 5  
型式 **KS-115**

- このたびは、充電式 洗髪シャワーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに、必ず保存してください。

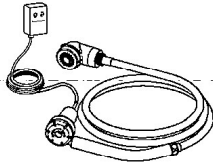

### もくじ

- 安全上のご注意 ..... 2~4
- 各部のなまえ ..... 5
- ご使用前に ..... 6
- ご使用方法《交流式》 ..... 7~9
- お手入れ ..... 10~11
- 保存方法 ..... 12
- 故障かな?と思ったら ..... 13
- アフターサービスと保証 ..... 14
- 仕様 ..... 14
- ご相談窓口(お問い合わせ先) ..... 15
- 保証書

## 安全上のご注意

- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- \*注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### ■表示の説明

<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

### ■図記号の説明

	記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	「分解禁止」
	「水場での使用禁止」
	「水めれ禁止」
	「接触禁止」
	記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。
	「一般的な行為」
	「電源プラグをコンセントから抜く」

\*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

## 警告

	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)
	分解・改造・修理をしない。 (火災・感電・けがの原因)
	電源器を水につけたり、浴槽内や湿気の多い場所、または濡れた手で使用しない。 (ショート・感電の原因)
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 (感電の原因)
	灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない。 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発・火災の原因)
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 (感電・やけど・けがの原因)
	ポンプコネクタにヘアピンなどの異物を入れない。 (火災・感電の原因)
	電源コードを曲げたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

## 警告


	ポンプ部を浴槽内に入れたまま入浴したり、沸かししたりしない。 (事故・感電の原因)
	運転中や運転直後は電源器内部またはポンプ部内の部品に触れない。 (やけど・感電の原因)
	使用后(充電使用後)は電源スイッチを切り、[電源器]をコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 お手入れの際は[電源器]をコンセントから抜く。 (感電・けがの原因)

## 注意


	空運転(ポンプ部に水のない状態での運転、または給水口が水面からでる状態)はしない。
	フィルターをはずしたまま使用しない。 (故障の原因)
	40℃以上のお湯は使用しない。また室内の温度が40℃以上になる場所で使用しない。 (変形・感電・漏電・発火の原因)
	池や水櫃では使用しない。 (故障の原因)
	連続で15分以上運転させない。 (故障の原因)

## 各部のなまえ

### 本体

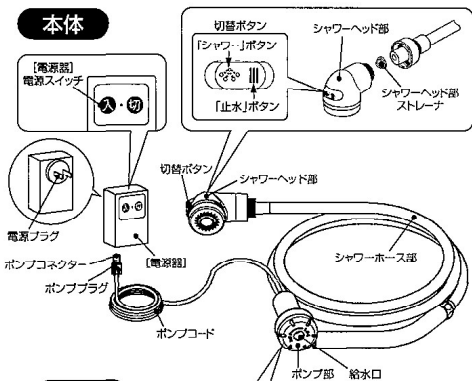

### 付属品

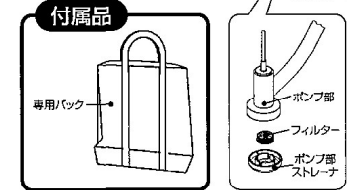

## ご使用前に




- 1 市販のバケツ(10~15リットル用)に水またはお湯40℃くらいを約8部目程入れる。
- 2 ポンププラグを[電源器]のポンプコネクタに差し込む。



## ご使用方法《交流式》

### つづく


- 1 [電源器]をコンセントに差し込む。  
●電源器をコンセントに差し込む。電源器の電源スイッチを「入」にする。電源器の電源スイッチを「入」にしない場合、電源器の電源スイッチを「入」にする。電源器の電源スイッチを「入」にする。電源器の電源スイッチを「入」にする。
  - 2 ポンプ部をバケツの水の中に入れる。  
☆ポンプ部の給水口が水面から出ないように水の中に沈めます。
- 注意** ポンプ部の給水口を水の中に完全に沈めないとお湯は出ません。

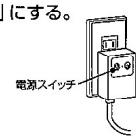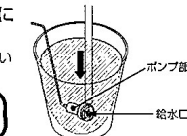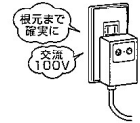

## ご使用方法《交流式》

### つづく


- 3 [電源器]の電源スイッチを「入」にする。  
☆[電源器]の電源スイッチを「入」にし、ポンプ部が動作する自を確認します。
- 4 ポンプ部・シャワーホース部内の空気を抜く。  
①シャワーヘッド部を手で握り、バケツの水面に近づけてください。  
②上部の切替ボタンを「シャワー」状態にして、約1分間~3分間そのままの状態でお待ちください。  
※ポンプ部・シャワーホース部内に空気が溜まっている間は、シャワーの水量が安定しないので、溜まっている空気を抜きます。  
③シャワーの水量が安定して出したら、「止水」ボタンを押してシャワーを止めてください。

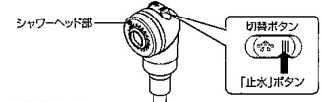

## ご使用方法《交流式》

### 5 シャワーヘッド部の切替ボタンを「シャワー」にして洗髪する。

☆図のようにシャワーヘッド部をつかみ、上部の切り替えボタンで「シャワー」・「止水」状態を繰り返しながら洗髪し、できるだけ節水をしてください。

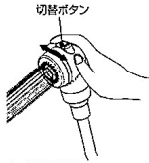

途中でポンプ部の給水口が水面より出てしまい、水が出なくなった場合は下記の手順で復旧してください。

- ①シャワーヘッド部の切替ボタンを「シャワー」状態にし、一旦電源スイッチを「切」にしてください。
- ②ポンプ部を水面に完全に沈めてください。
- ③シャワーヘッド部の切替ボタンを「シャワー」状態のままに、電源スイッチを「入」にして水量が安定して出るのを確認してからお使いください。

※水量が安定して出るまで、約1分間～3分間かかる場合がありますので、ご注意ください。

注意


-9-

## お手入れ


つづく

### ◇前作業

#### 1 [電源器]の電源スイッチを「切」にする。

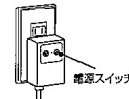


#### 2 [電源器]をコンセントから抜く。

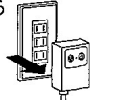

#### 3 ポンププラグを[電源器]のポンプコネクターから抜く。



#### 4 ポンプ部・シャワーホース部内の水を抜く。

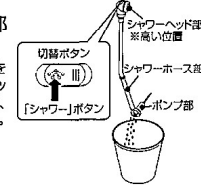

☆シャワーヘッド部の切替ボタンを「シャワー」状態にし、シャワーヘッド部をできるだけ高くし、ポンプ部、シャワーホース部内の水を抜きます。

-10-


## お手入れ

### ◇フィルターとストレーナの掃除

フィルターやストレーナにゴミが付着すると、水の出が悪くなりますので、こまめに掃除を行ってください。

#### ポンプ部

#### 1 ポンプ部ストレーナを左に回して外し、フィルターを取り出す。

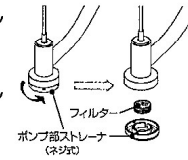


#### 2 ポンプ部ストレーナとフィルターを水洗いする。

☆ストレーナとフィルターについてのゴミを水洗いして落とします。

#### シャワーヘッド部

#### 1 シャワーヘッド部を左に回して外し、シャワーヘッド部ストレーナを取り出す。

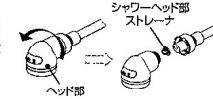


#### 2 シャワーヘッド部ストレーナを水洗いする。

☆ストレーナについてのゴミを水洗いして落とします。

-11-

## 保存方法

### 1 「お手入れ」の要領で汚れ、ゴミを取り除く。

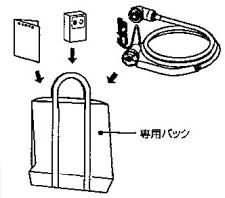

### 2 各部品に付いた水を乾いた布で拭き取り、専用バックに取扱説明書と共に保存する。

【電源器】は水に触れないように、ポンプ部、シャワーホース部とは別の場所（専用バックの内側のポケット部等）に保存してください。

**注意**  
コード類は曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、押しつぶしたりしないこと。  
(事故・故障・断線の原因)  
小さな子供の手の届くところに置かないこと。  
(事故やけがの原因)

-12-

## 故障かな?と思ったら

こんなときに	次の点をお調べください
ポンプ部が作動しない。	電源プラグ、ポンププラグが抜けているか、しっかり差し込んでいないか。 電源プラグはコンセントに、ポンププラグは電源器のポンプコネクターにしっかりと差し込んでください。それでも作動しない場合は、ご購入先へご相談ください。
ポンプ部は作動するが水が出ない。	ポンプ部の給水口が水面より出てしまっているか。 ポンプ部を水中に沈める際に電源スイッチを入れていませんか。 前回使用時の水がシャワーホース部やポンプ部に残っていませんか。 再度シャワーホース部内の水を抜いてください。(11頁お手入れの「前作業」参照) (前回の水が残っていると、ポンプ部内の空気が抜けにくいので水が出ない場合があります。)
水量が少ない。	初めて使用する場合、約1分間～3分間以上経っても水が出ない。 シャワーホース部が詰まったり、つれれりしていませんか。 フィルターや各ストレーナにゴミが詰まったりしていませんか。 シャワーホース部内の水を抜いてください。 フィルターや各ストレーナのゴミを取り除き水洗いしてください。(11頁のお手入れの手順を見てください。)
【電源器】が停止する。 (ランプがつかない。)	異常発熱により、温度ヒューズが作動し、作動しなくなっています。復旧いたしません。ご購入先へご相談ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、ご購入先にご相談ください。

-13-

## アフターサービスと保証

- 保証  
お客様の正常なご使用にもかかわらず、万一故障が生じた場合には、お買い上げの日から1年間は無料修理いたします。
- 有償修理を依頼される場合  
お買い上げ日より1年を経過した場合や、保証規定以外の修理は、有償修理となります。修理が必要な場合は、ご購入先までご連絡ください。
- 故障が発生した場合や異常を感じた場合  
ご使用の製品が故障したり、異常を感じた場合は、すみやかに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。次にご購入先までご連絡ください。

## 仕様

シャワーヘッド部	寸法	材質	重量
シャワーヘッド部	寸法	幅約6.0cm×奥行約6.0cm×高さ約12.0cm	
	材質	ABS/ポリアセチル樹脂	
本体部	重量	約0.2kg	
	電源	AC100V(50-60Hz)	
	流量	約2.0ℓ/分	
	ポンプ部	結露式(連続使用15分以内) ボルトコード長さ:約400cm ジョイントの透明ホース長さ:約7cm	
	シャワーホース部	ホース長さ:約162cm	
	電源器	幅約5.2cm×奥行約5.2cm×高さ約7.4cm	
	重量	約0.5kg	

総重量:約0.7kg(専用バックを省く)  
【注意】介護:室内用です。(電源器)は防水構造ではありませんので、湿気が多い場所でのご使用にはなりません。

付属品 専用バック  
※性能向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。

-14-

## ご相談窓口(お問い合わせ先)

### 製造元

株式会社福祉SDグループ  
〒820-0101  
福岡県飯塚市綱分713-51

### 総販売元

キヨク株式会社  
〒108-0023  
東京都港区芝浦4-3-4  
TEL:03-3798-3617  
FAX:03-3798-3618

-15-

## 交流式 洗髪シャワー 保証書

持込修理

型 式	KS-115	保証期間	本体:1年
※お買い上げ日	平成	年 月 日	
※お客様のお名前	様		
※お住まいの住所	〒		
※お住まいの電話番号	電話 ( )		
※販売元住所	〒		
※販売元電話番号	電話 ( )		

※印刷に記入のない場合は無効となり必ずお読みください。  
お客様にご購入いただいた商品の写真は、保証期間内のご返品活動およびその後の安全衛生活動のために写真撮影を許可させていただきますので、ご了承ください。  
保証期間内に取扱説明書などの付属品がなくなったり、正常なご使用状態で故障した場合は、本保証書の内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から上記の期間内に修理した場合には、商品と本保証書をお持ちいただき、お買い上げの場所にて修理を依頼してください。  
1.保証期間内でも次のような場合には無償修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または故障の原因不明による故障または故障。  
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送による故障または故障。  
(ハ) 火災、地震、水害、暴風、その他の天災による、公害や異常電圧による故障または故障。  
(ニ) 暴雨、船舶にぶつかるなど使用された場合に修理または修理。  
(ホ) 本保証書に記載された範囲で発生した故障は無償。  
(ヘ) 本保証書の表示がない場合。  
(ト) 本書をお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、記入のない場合は字句を書き換えた場合。  
2.この保証書は保証の対象外です。事故などで修理された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する費用を申し受けます。  
3.この保証書は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。  
4.修理が必要で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼しなれない場合には、取扱説明書のご取扱窓口ににご相談ください。  
5.本保証書は発行したままでも紛失した場合は大切に保管してください。  
6.この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によって保証書を発行している保証責任者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を放棄するものではありませんので、修理開始後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご取扱窓口にお問い合わせください。  
7.保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書のご取扱窓口ににご相談ください。  
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan  
修理メモ

株式会社 福祉SDグループ  
〒820-0101 福岡県飯塚市綱分713-51

2015.6.30