

ソフトシーネ # 8168 取扱説明書

使用前に必ずお読みください！

【使用目的・製品特徴】

- 抜管・抜針予防対策。
- 関節部位に着用することで無意識な折り曲げを予防し各種ライン、カテーテルの人為的抜管対策。
- ソフト素材（綿とポリエチレンビーズ）で肌に優しく圧分散
- 体格、各部位に合わせた8種類のサイズ。
- 位置ずれ防止のクリップ付属。
- 洗濯可能。
- X線透過素材。



【使用方法】

1. サイズを選択してください。
2. マジックテープをバックルから外して全体をひろげて目的の部位へあわせて、マジックテープをバックルに通して固定します。
3. 肘での使用でずれを防止したい場合は、下画像のようにクリップで袖に止めます。

（注意）締め付け過ぎないようにしてください。指が2本入るぐらいが目安です。

*クリップを取り外したい場合は使用前にハサミ等でベルトを切断して取り外してください。



カタログ 番号	長さ	サイズ	
		適応周囲長	年齢目安
8168I	6.5 cm	10 cm	新生児～2歳
8168P	16 cm	16 cm	2歳～5歳
8168XS	22 cm	30 cm	2歳～7歳
8168S	27 cm	36 cm	S
8168M	31 cm	43 cm	M
8168L	35 cm	53 cm	L

【クリーニング方法】

- 洗濯機 水温 38℃以下
- 漂白可能
- 乾燥機(低温)

【注意・警告事項全般】

- ◆ この製品は施設での安全対策補助を目的とするものであり生命救済・生命維持を目的とした商品ではありません。
- ◆ 医療法やその他の法令に従って使用してください。
- ◆ 各施設で使用上の基準やガイドラインを作成して使用してください。
- ◆ 使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ◆ 使用前に必ず製品の点検・確認を行ってください。製品の生地痛みなど品質上の異常がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
- ◆ 定期的に巡回チェックを行い固定状態、皮膚状態、製品の異常などに注意してください。
- ◆ 締めすぎによる循環障害に注意してください。
- ◆ 製品は使用劣化します。内部ビーズが収縮し全体的にふくらみがなくなってきたら新しいものと交換してください。
- ◆ 火気の近くで使用しないでください。
- ◆ 本製品使用により患者の動揺・不適切な行動など異常がある場合は使用を中止し適切な方法に変更してください。
- ◆ この製品は基本的に病院・施設向けですが医療機関からの在宅使用の推奨がある場合は専門知識を有した看護・介護スタッフからの使用上のアドバイスを受け、取扱方法を十分習得した上で使用してください。