

折りたたみ式歩行器 R-232-A

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

- ◆用途 本製品は、歩行練習等に使用する歩行補助器です。
- ◆特長 ワンタッチでスムーズに折りたたみ、狭いスペースにも収納できる歩行補助器です。

●ご使用になる前に

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。

⚠注意

⚠注意 … 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの


- ・使用者のバランスが保持できない場所では使用しないでください。
- ・ご使用の際は歩行補助器を持ち上げたりせず、常にキャスターが床と接触している状態でご使用ください。
- ・本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
- ・ご使用の際には医師等の適切な指導のもとで使い方を練習してからご使用ください。
- ・歩行は製品の内側で行うよう注意してください。
- ・使用者の制限体重は80kgです。これを超えた方は使用しないでください。
- ・乾いた平らな表面の上で本製品をご使用ください。滑りやすい面では不安定になり、転倒等の危険があります。
- ・階段や急坂等では使用しないでください。
- ・ご使用前に各部を点検してガタつきやネジの緩み、摩耗等がないか見てください。けがをする恐れがあります。
- ・異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをする恐れがあります。
- ・修理が必要な場合は使用を中止して販売元へご連絡ください。

●各部の名称及び使用方法

①正面のつまみ(PULL)の部分を引き、左右の開閉器の部分を広げながら押し下げる。



②左右いっばいに広げれば、上のマットはロックされます。

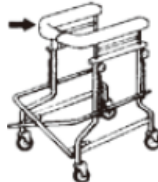

③左右外側のネジでマットの高さを固定する。



④たたむ時も正面のつまみ(PULL)を引き、左右の開閉器を上にあげるとたためます。



ひじ掛け

PULL金具

高さ調節ノブ

左右の開閉器

⚠注意 高さ調節後、調節ノブがしっかり締まっているか必ず確認
ゆるんでいると体重をかけたとき落ちて危険です。

●お手入れの仕方

- ・キャスターの作動を確実にするために車輪は定期的に点検、清掃してください。
- ・可動部は定期的にシリコンスプレーで潤滑してください。
- ・消耗品等が必要な場合は、販売元にご連絡ください。

●保障とアフターサービス

■保証書と保証期間

- ・保証書（本書下部）はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- ・保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、1年間です。

■修理を依頼される場合

- ・修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名：R-232-A

お買い上げ年月： 年 月

故障状況（できるだけ詳細に）

住所、氏名、電話番号

- ・メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解したりしないでください。

●仕様

名 称	折りたたみ式歩行器
型 式	R-232-A
ベース寸法	約 54.5(W)×67.5(D)×92~120(H)cm
胴内寸法	約 39×47cm
折りたたみ時寸法	約14.5(W)×6.75(D)×110(H)cm
質 量	約15kg
材 質	スチール、塗装

注) 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

●保証書

品名	折りたたみ式歩行器		
型名	R-232-A	製造番号	
保証期間	お買い上げ日 20 年 月 日から 1年間		
お客様	ご住所	〒 ()	
	お名前	お電話(- -) 様	
お買い上げ店	住所・店名 TEL		

この保証書は、お買い上げの製品が、正常なご使用状態で万一故障した場合の無料修理についてお約束するものです。

なお、保証期間内においても次の場合には有料修理となります。

- 1.本保証書のご提示がない場合。
- 2.本保証書を当社の承認なく訂正した場合。
- 3.お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合。
- 4.天災、人災等の特殊な外部的要因に起因する故障、損傷の場合。
- 5.本製品に接続している当社指定機器以外の機器に起因する故障、損傷の場合。
- 6.当社及び当社が指定するサービス機関以外での改造、修理、調整等に起因する故障、損傷の場合。
- 7.本製品の取扱説明書に記載された使用方法、及び使用上の注意事項に反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 8.製品使用上、保管上の消耗品の補充の場合。

●本保証書は日本国内においてのみ有効です。

●本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●保証期間終了後の故障修理は、その都度実費を申し受けます。

TIGER リハビリテーション器械器具全般
タイガー医療器株式会社

TEL 072-924-7878

FAX 072-924-7888