

内視鏡保管庫 取扱説明書

* 内視鏡保管庫をご使用する前に下記の説明書をよくお読み頂き安全にご使用下さい。

- ・ 本体の設置場所が水平であることをお確かめ下さい。
水平でない場合、本体底部のアジャスターで調整し設置して下さい。
水平でないと扉のカギが閉まらない事もございます。
* 15本掛けを除く *
- ・ 扉は本体上部両側にストッパーがあり閉める際の音を軽減させるために付いて
おりますが、稀にストッパーと扉があたり過ぎて金属音が鳴る場合があります。
その際は、ストッパーを上押し上げて調整して下さい。
- ・ 扉のカギは紛失しないよう保管して下さい。
- ・ アクリル部は1箇所につき1本しか掛けられません。（上下段一对）
上部ハンガー部にスコープ、下部ハンガーにコネクターを取付けて下さい。
- ・ 保管される際はスコープをハンガー奥までしっかりと掛け、安定している事
をお確かめ下さい。
形状が合わないで無理に掛けますと脱落及びハンガーに亀裂が入る原因と
なりますのでご注意下さい。
- ・ アクリル部の清掃は乾いた布等でお願い致します。薬液、洗剤等を使用すると
クラッキング（ひび割れ）を起こす原因となります。
- ・ 保管庫内には保護シート（グリーン）が張っております。
マジックテープで取外しが可能となっておりますので、汚れり痛んだりした際は
交換をして下さい。（交換目安は1年に1回）
- ・ 本体を移動させる際は、スコープを外して移動して下さい。
掛けたままで移動すると脱落する場合がございます。
- ・ 転倒防止のため設置場所にあった耐震金具を取付ける事をお勧め致します。
- ・ その他、ご不明な点がございましたら販売店までご相談下さい。