



カタログ番号 W2811S W2811M W2811L

新生児・小児用ミトン 取扱説明書 使用前に必ずお読みください！

【使用目的】

- 医療法やその他の法令に従った上での指抑制具。

【注意・警告事項全般】

- ◆ この製品は施設での安全対策補助を目的とするものであり生命救済・生命維持を目的とした商品ではありません。
- ◆ 医療法やその他の法令に従って使用してください。
- ◆ 各施設で使用上の基準やガイドラインを作成して使用してください。
- ◆ 使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ◆ 使用前に必ず製品の点検・確認を行ってください。製品に生地痛みなど品質上の異常がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
- ◆ 四肢に脱臼・骨折・創傷がある患者には使用しないでください。
- ◆ ミトン使用によるIVラインへの障害の可能性が考えられる場合には使用しないでください。
- ◆ 定期的に巡回チェックを行い固定状態、皮膚状態、製品の異常などを注意してください。
- ◆ 締めすぎによる循環障害に注意してください。
- ◆ 使用の近くで火気の使用はしないでください。
- ◆ 攻撃的・凶暴性の患者には使用しないでください。
- ◆ 本製品使用により患者の動揺・不適切な行動など異常がある場合は使用を中止し適切な方法に変更してください。
- ◆ この製品は基本的に病院・施設向けですが医療機関からの在宅使用の推奨がある場合は専門知識を有した看護・介護スタッフからの使用上のアドバイスを受け、取扱方法を十分習得した上で使用してください。



【ミトン使用方法と使用上の注意】

- オープン用のポケットがある側を手の甲になるように装着します。(図 1)
- 青色ベルトをリングに通して固定します。(図 2)
- 白ベルトを固定します。(図 3)

*締めすぎに注意してください。また、定期的に観察してください。

- 必要に応じてポケットを開けて観察ができます。(図 4)



図 1



図 2



図 3



図 4

＜クリーニング方法＞

※ 本製品は、CDC(米国疾病予防管理センター)推奨のガイドラインに従って洗濯可能です。

- マジックテープは糸くずが付着しないように留めておく。
- 温度71° C 以下 /25分以内。
- 製品寿命を延ばすためなるべく高温での洗濯をお控え下さい。
- 漂白剤は種類により、色落ちや材質の劣化の可能性があります。

材質: 綿、ポリエステル(中綿)、ネオプレン(手首)、ナイロン(ベルクロ)

発売元: 株式会社メディカルプロジェクト
静岡県葵区大鋸町 1 番地の 12
Tel : 054-252-1141