

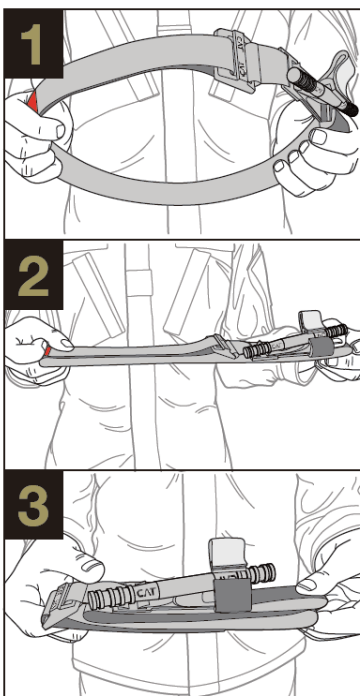
CAT[®] COMBAT APPLICATION TOURNIQUET[®]

ターニケット使用説明書



Aii アコードインターナショナル株式会社

ターニケットの収納



1 レッドチップをバックルに差し込み、約 20 cm 出す。バンドどうしを貼り合わせる。

2 バックルとレッドチップを端にし、バンドを左右に伸ばす。

3 C-A-T を半分に折る。マジックテープ面を貼り合わせる。救急バッグやターニケットポーチへ収納する。

ターニケット各部名称



より安全に使用するために：

負傷者を動かす前に、タイムストラップでロッドとバンドが固定されていることを必ず確認すること。

- 【型番】 NAR3001
- 【品名】 NAR ターニケット C-A-T
- 【素材】 ・バンド(本体) ナイロン/ベルクロ
・ストラップ ナイロン/ベルクロ
・巻き上げロッド プラスチック
・バックル プラスチック
- 【サイズ】 パッケージ時： L:16.5 x W6.0x D 3.8cm
オープン時： L:95.2cm x W4cm
- 【重量】 約 82.2g
- 【製造】 アメリカ製
- 【特許】 米国特許番号：7,842,067 / 7,892,253

【使用上の注意】

- ・本品は使用法のトレーニングを受けた隊員あるいは医師の監視のもとに使用してください。
- ・負傷者を移動する前に巻き上げロッドとバンドがクリップにしっかり固定されていることを確認してください。
- ・製造販売業者 / 製造元は当該用具の使用に伴ういかなる傷害の責任を負うものではありません。使用者が本製品の使用に伴う総ての責任を負うものであります。

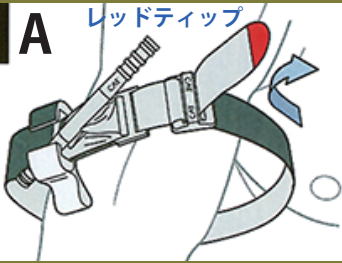
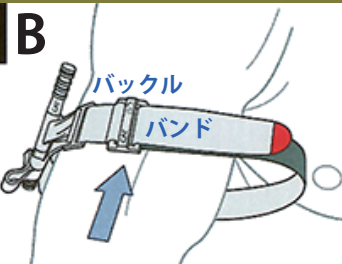
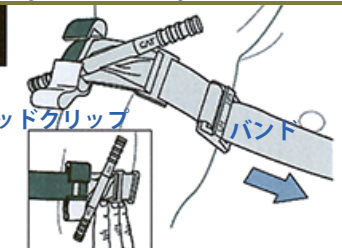
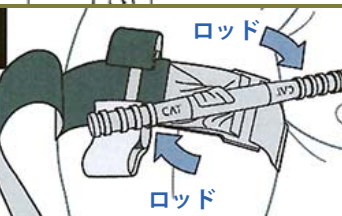
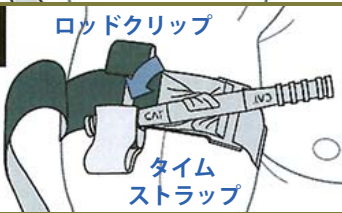
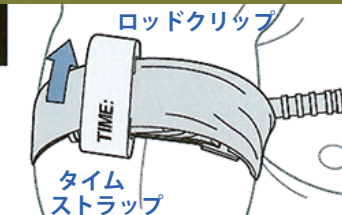
総発売元



ノースアメリカンレスキュー社(米国・サウスカロライナ州)
ISO:9001:2000/ISO:13485

輸入発売：
アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752
e-mail: Accord@accord-intl.com <http://www.Accord-INTL.com>

使用方法

<p>1 A レッドティップ</p> 	<p>ツーハンドオペレーション： 上肢あるいは下肢の出血部から上部 5.0~7.5cm でバンドを肌 に直接巻き、レッドティップをバックルに差し込む。</p>
<p>1 B バックル バンド</p> 	<p>ワンハンドオペレーション： 装着前にバンドをバックルに通しループさせる。 それから出血部の四肢をループに通す。 出血部から上部 5.0~7.5cm で、肌面に直接配置する。</p>
<p>2 ロッドクリップ バンド</p> 	<p>バンドを強くしっかり引く。 次にバンドを創傷部周囲に巻きつけベルクロで自着させ、 固定する。その時バンドがロッドクリップの上を覆わない ようにする。 指先 3 本がバンドと肌の間に指し込めるなら締め直す。</p>
<p>3 ロッド</p> 	<p>止血するまでロッドを廻す。</p>
<p>4 ロッドクリップ タイム ストラップ</p> 	<p>ロッドをロッドクリップでロックする。血流とパルス をチェックする。止血されないかあるいはパルスがあるときは、 更にバンドを強く締める。または、セカンド C-A-T の追加を 考慮する。(場所はファースト C-A-T のすぐ上)</p>
<p>5 ロッドクリップ タイム ストラップ</p> 	<p>バンドをクリップの中を通しロッド上部を覆う。 ロッドとバンドをタイムストラップで固定し、 C-A-T 装着時刻を記録する。</p>

注意：

出血場所を確認出来ないかあるいは調べる時間がない場合は、できるだけ腕や脚の上部に（付け根に近く）、CAT を当ててください。（衣服の上からでも構いません。）

衣服の上から当てる場合は、衣服の中に固形物がないか確認してください。

状況が許せば、できるだけ早く受傷した四肢の出血場所を調べ、出血場所の 5cm~7.6cm 上へ CAT を当て直してください。