

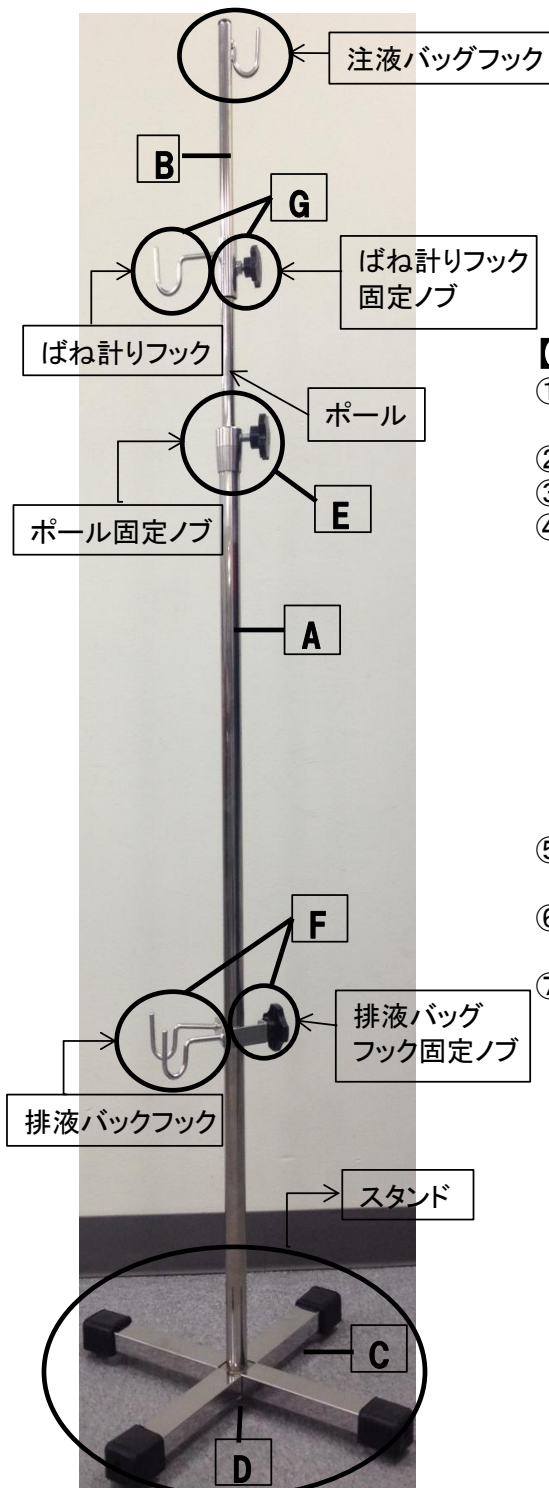


腹膜透析用スタンドBT

【組み立てセット例】

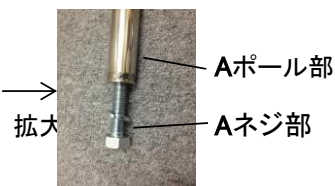

【内容品】

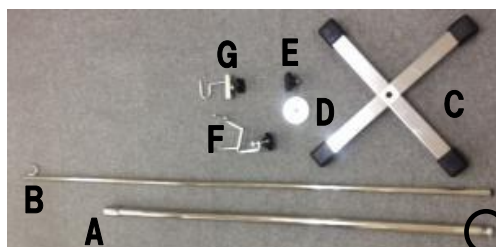

【組み立て方法】

- ① Aネジ部をポール部から外す。
Cスタンド部の上にDを乗せ、上からAポール部を差し込む。
- ② ①のスタンド部の裏からAネジ部を差し込む。
- ③ Aネジ部を固定し、ポール部を左に回し固定する。
- ④ ③を平らな場所にセットする。



①




②




③


- ⑤ BのポールにG差し込み、高さ調整を行う。
高さが決まったら、固定ノブを右に回し、しっかり固定する。
- ⑥ ④に⑤を差し込み、接続部にEポール固定ノブをセットする。
高さを決め、ポール固定ノブを右に回し、しっかり固定する。
- ⑦ F排水バッグフックをセットし、高さの調整を行う。
排水バッグフック固定ノブを右に回し、しっかり固定する。

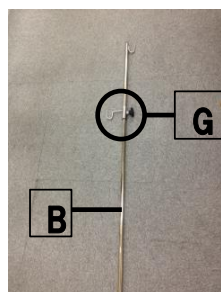

⑤

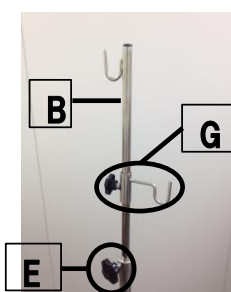

⑥

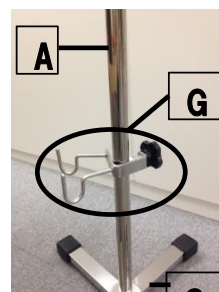

⑦

【販売元】

松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL: 03-5816-8819

【注意】

- * 商品セッティング時は広い場所を確保し、手順に沿って安全にセッティングして下さい。
- * 固定ノブの締めが緩いと、ポールが落ちる可能性がありますので、ご注意下さい。