



SORBOTHANE




医療の現場で使用されている  
衝撃吸収素材「ソルボセイン」

## ソルボ クッションパッド〈外反母趾用〉

### 外反母趾の靴の当たりの保護に

- 衝撃吸収性・圧力分散性に優れ、へたりのも少なく長時間使用しても効果が持続します。
- ズレが少なく肌にフィットします。
- 薄型パッドで、ストッキングや靴をはいても違和感がありません。
- かぶれにくく肌にやさしい、低アレルギー性粘着シートを使用しています。  
(すべての方にアレルギーや刺激がおきないものではありませんので、ご注意ください)

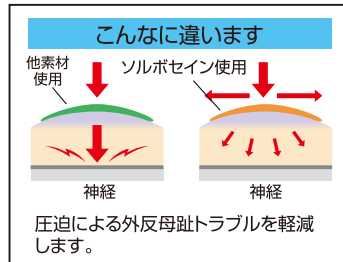


## SORBOTHANE からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」

人間の筋肉は衝撃に対してすばやく変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力も分散します。「ソルボセイン」は、その筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。※人間の筋肉そのものを代替するものではありません。



**ソルボセイン**  
圧力を均一に分散、あたりが非常にソフトで下からの衝撃も感じません。

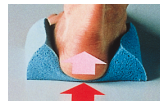

**スポンジ**  
フワッとしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、あたりを感じます。

保護パッド 70×62mm 4枚入

#### ●品質

本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)  
粘着剤:アクリル系(低アレルギー性)

※パッケージ内の説明を読んでからご使用ください。

製造元 三進興産株式会社

MADE IN JAPAN

東京/東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー 〒169-0074

TEL03(5338)8590 FAX03(5338)8599

大阪/大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー23F 〒530-0005

TEL06(4707)2371 FAX06(4707)2399

<http://www.sorbo-japan.com/>

ソルボ® ソルボセイン®は三進興産(株)の登録商標です。

日本製




## 外反母趾によるトラブルに ソルボ クッションパッド〈外反母趾用〉

衝撃吸収素材ソルボセインが、親指の変形による圧迫を軽減し、母趾突起部をしっかり守るので、貼るだけで簡単にトラブルを軽減します。薄型パッドで、ストッキングや靴をそのまま履くことができ、手軽に足のトラブルの対策ができます。

### 使い方

- 貼付部を清潔で乾いた状態にしてご使用ください。
- クッションパッドを台紙からゆっくりはがし、母趾突起部の部分にしっかり貼り付けます。特に周囲をていねいに押さえてください。

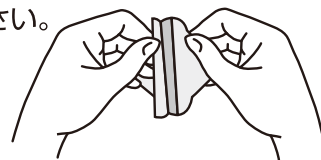

☆シール部は肌にやさしく、粘着が弱いので肌に負担をかけません。

☆入浴や激しい運動などで、シール部の粘着が弱くなった場合は、市販のテープで固定してお使いください。

### ⚠ 使用上の注意

傷の炎症のある部位へのご使用はお避けください。使用中、かゆみやかぶれなどの異常が現れた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。

直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。