

ステンレス製ワゴン・カート

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、
お読みいただいた後はお手元に保管してください。

△安全上のご注意

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒事故や製品破損による事故の原因となります。
- 天板・棚板に物を載せすぎたり、偏った積載をしないでください。積載物の落下や製品破損による事故の原因となります。
- 製品の不当な改造、分解をしないでください。製品破損による事故の原因となります。
- 変形・破損したまま使用しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 傾斜のある場所や凹凸した不安定な場所に停車しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 特に、段差や傾斜のある場所を移動する際には、転倒や積載物の落下に十分ご注意ください。
- 引出を出した状態で移動しないでください。転倒や積載物の落下による事故の原因となります。
- 引出のレールに触れたり、隙間に指を入れたりしないでください。切断面などでケガをする恐れがあります。
- 汚物缶などの付属品を本体に取り付ける場合には、確実に固定してください。積載物の落下による事故の原因となります。
(特に、ノブネジの山がすり減っている場合などは新しいものと交換してください。)
- タオルウォーマー搭載の製品につきましては、タオルウォーマーの取扱説明書も十分にお読みになり、正しくご使用ください。

使用上のご注意

- 本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所に放置しないでください。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 酸性の液体や塩分、洗剤の原液などが付着しないようにしてください。
- キャスター部や可動部などに異常音が発生した場合には使用を中止し、販売店までご相談ください。
- その他、製品に不具合が発生した場合には使用を中止し、販売店までご相談ください。

各部の名称



製品のお手入れ

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた
布で拭き、水分が残らないように拭き取ってください。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤などは、
表面材が損傷する恐れがありますので、使用しないで
ください。
- ※金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤などは、
表面材が損傷する恐れがありますので、使用しないで
ください。

(発売元)



松吉医科器械株式会社

東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階