

ネックガードハンガー HL-NGH1 取付説明書

《はじめに》

この度は、HL-NGH1をお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書を良くお読みの上、以下の手順で正しく取り付けてください。


本製品は、弊社ラクラック (HL-103S/106W)、スイングラック (HL-508S/512S/816S) 専用の
ネックガード (甲状腺防護具) ハンガーです。

プラスドライバーを
ご用意ください。

《安全のために特に注意してください。》

- ※本製品のラック本体への取り付け方法は、この説明書に従って行ってください。
- ※本製品はネックガード専用のハンガーです。他の物や重量を掛けないでください。
- ※本体および取り付け部品の改造・変更は、行わないでください。

《製品構成》

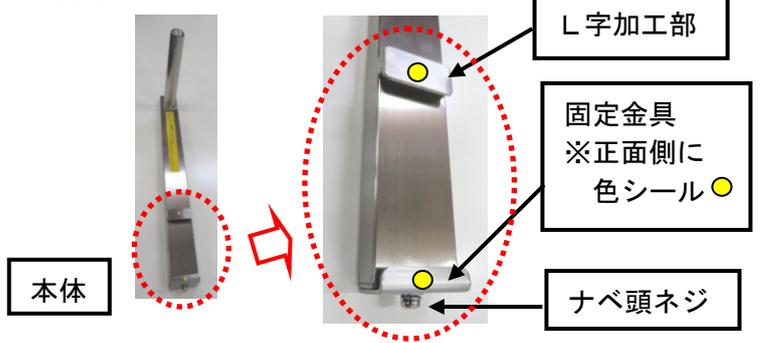

手順 1




(1)
お届け時の
状態

(2)
ナベ頭ネジを
約 2 cm 緩める。


(3)
固定金具を
下げる。

手順 2

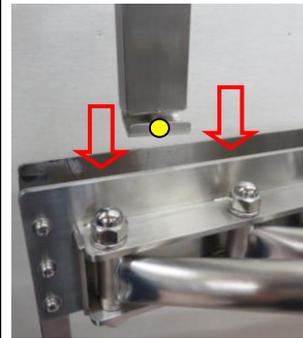


ラック本体の上面から、
前後のプレートの上に
差し込む。

手順 3

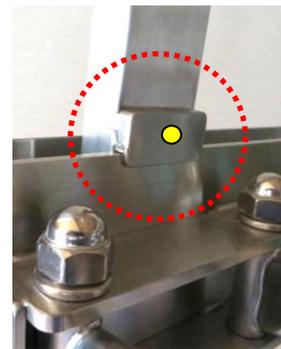

L字加工部の溝を、ラック
本体の手前側のプレート
に引っ掛ける。
※L字加工部の溝にプレート
が十分に入り込まない場合も
ありますが、次の手順で入り込
めば問題ありません。

手順 4

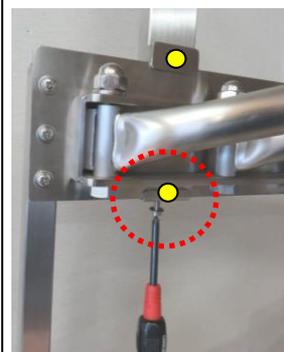

固定金具のL字部分を
ラック本体手前側の
プレートに引っ掛け、
ドライバーでナベ頭ネジ
をしっかり締める。
※色シールが、手前に見える
ことを確認の上、作業をして
ください。逆向きでは適正に
固定出来ません。

《取付完成後の状態》
(例) ラック本体 : HL-512S

《使用方法》
ネックガードの正しい掛け方

《お問い合わせ先》

株式会社マエダ
東京都足立区西新井本町5-4-12
info@kk-maeda.com
TEL : 03-3880-8881
FAX : 03-3880-8884