



くわしい使い方はこちら
open

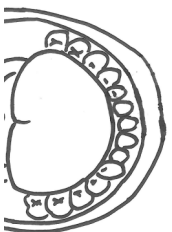

お口をあけて！
せあ

日本製
MADE IN JAPAN

●食べる機能を引き出す●
emリードスプーン

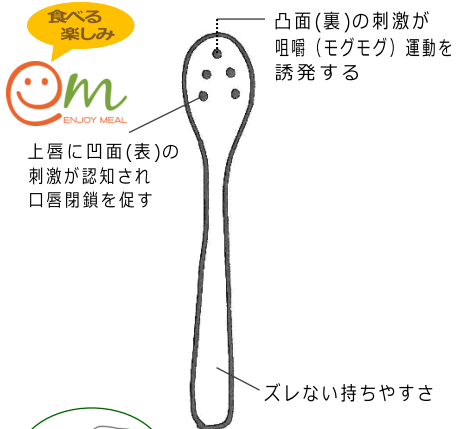

中に食べさせ方イラスト付き！

スプーンの使い方動画見られます→emリードスプーンYouTube検索

⚠ 使用上の注意

- 初めてご使用になる前に、商品に不具合がない事を確認して下さい。
- ご使用前に台所中性洗剤で洗ってからお使い下さい。
- 錆びにくい材質ですが、ご使用後洗ってから充分水気を切り乾燥してから保管して下さい。
- この取扱説明書を大切に保管しておいて下さい。

品質表示
材質：18-8 ステンレス鋼



ラックヘルスケア株式会社
www.ing-professional.com

営業本部：〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-3-13 CIRCLES 平河町 3F
TEL: 03-6261-8993 FAX: 03-6261-8995
大阪オフィス TEL: 06-6244-0636
九州オフィス TEL: 096-340-8101

●食べる機能を引き出す●
emリードスプーン
介助用

登録意匠第1465812号

凸面の刺激が

舌の動きと咀嚼(モグモグ)を誘発する

口腔機能向上

介助する人にとっても食べさせやすい
ズレなく持ちやすい柄

おいしく食べよう！



(とらえる・噛んでまとめる・送り込む・飲み込む) を導く

「食べる」を引き出す！ リードスプーン 3つのメリット

スプーンの使い方の

使い方動画見られます→ emリードスプーン YouTube

検索

1


スレない
持ちやすさ



スプーンは軽く持ちます

置き方

▶ 座位の場合

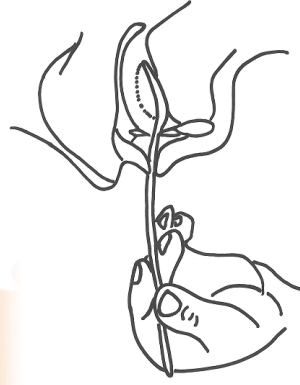

▶ リクライニングの場合



食べ物を舌のホールへ載せ移す
この時、人差し指でスプーンの
ホルダーを軽く圧すると、その刺激
で咀嚼運動が誘発される

臥床の場合は、スプーンが軽く硬口蓋へ触れ
ると舌はスプーンの底を支えるように覆う
これによって、水や食べ物が舐がることなく
また、いざなり咽頭へ流れ込むことはない


誤嚥を防ぐため



スプーンは口唇を閉じてから、上唇
を刺激しながら抜き取る。この際
スプーンが歯に触れないようにする

2

上唇に凹面の刺激が
認知され口唇閉鎖を
促す

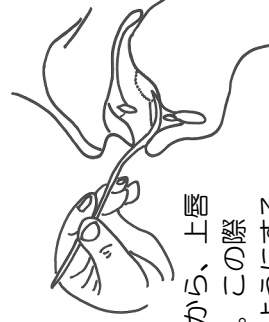

3

凸面の刺激が
咀嚼（モグモグ）運動を
誘発する

ワンポイント

嚥下のリズム（ムセにくい嚥下パターン）

えくぼをつくる → 息をとめる → うなづく → 息をはく（ハア～）