

《製品保証書》

お客様名	
ご住所	(〒 -)
電話番号	() -
ご購入日	年 月 日
販売店名	
商品名	らくラッシュ2

【保証事項】

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ日から1年間の保証期間内であれば、本体部分に限り無償修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、御施設名と電話番号をお申し出ください。尚、送付される場合には送料をご負担下さい。
- 3.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - ①本保証書を同封頂けなかったとき。又は、所定事項に未記入があったとき。
 - ②火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ③お買上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
 - ④説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
 - ⑤改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
 - ⑥消耗部・消耗品類の交換
- 4.本製品故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては当社はその責に任じません。
- 5.保証は日本国内においてのみ有効です。

倉田式錠剤破壊器

らくラッシュ2

取扱説明書



daido DAIDO KAKO CO, LTD


大同化工株式会社

本社 / 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号
TEL (06) 6901-1855(代表) FAX (06) 6901-1910

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>

1. 各部の名称

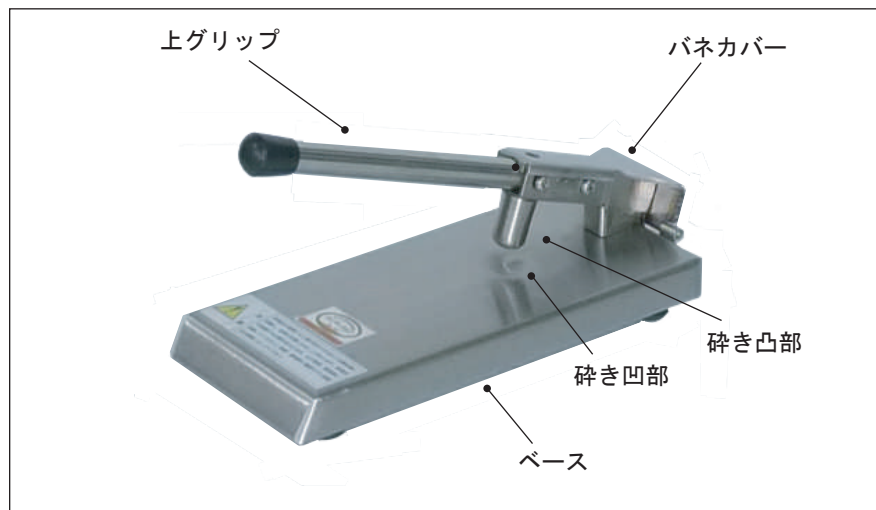

2. 使用方法：分包後の錠剤を砕く



①分包紙をベースの上のせ
砕きたい錠剤を砕き凹部に
合わせます。



②上グリップで2～3度、分
包紙内の錠剤をおさえま
す。



③分包紙内で錠剤が粗く砕け
ます。

*乳棒、ハンマー、ペンチ等と比べて音もなく、軽い力で砕けます。

*分包紙が破れにくい構造です。

*軽量、手動のため、持ち運びできます。

※本製品は、パウダー状にする器具ではございません。錠剤を粉碎される場合は錠剤粉碎機をお勧めします。

3. 注意事項

- ・本製品は粗く錠剤を砕く器具です。カー杯錠剤をおさえずに軽い力で錠剤を砕いて下さい。また、体重をかけたり、強い力で上グリップを押さえると変形や破損の恐れがありますのでご注意下さい。
- ・錠剤の形状、分包紙の材質により分包紙が破れることがあります。
- ・ご使用時は指を挟まないように気をつけて下さい。



注
意

医薬品を破壊すると薬が効きすぎるなど治療効果に影響し、危険な状態になることがあります。医薬品を破壊する必要があるときは、必ず医師・薬剤師に相談してください。医師・薬剤師に確認せずに医薬品を破壊しないでください。

- ・上グリップは持ち上げないで下さい。

矢印以上、上グリップを持ち上げるとバネが飛び出し、ご使用できなくなることもございます。



《仕様》

品名	らくラッシュ2
品番	HN-100
寸法	W:220 D:96 H:120(mm)
重量	780g
材質	ステンレス

姉妹品

錠剤粉碎機 スマッシャー DTS-60

定価99,800円(税抜)

新機能を搭載した新世代の粉碎機

- ・間欠作動により粉碎効率をアップ
- ・操作はスイッチを押すだけで錠剤150錠を30秒で粉碎し、自動停止する
- ・錠剤をパウダー状に粉碎

