

セルケア®・ソフトウエハー

Cellcare-Soft Wafer

セラミド配合用手成形皮膚保護剤
Moldable Skin Barrier

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《セルケア・ソフトウエハー》は、密着性と耐久性に優れたセラミド配合用手成形皮膚保護剤です。リングタイプとスティックタイプがあり、ストーマ周囲のシワやくぼみを埋めて、ストーマ装具の密着性を高め、排泄物から皮膚を保護します。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- 本品は食べ物ではありません。誤飲しないように高齢の方、認知症の方、乳幼児および小児の手が届かない場所に保管するなど適切に管理をしてください。

注 意

- ストーマ周囲には軟膏など、粘着力の低下の原因となるものは塗らないでください。粘着力低下によるモシの原因となります。
- ご使用前は、ストーマ周囲の皮膚を十分に洗浄し、よく乾かしてください。皮膚表面に汚れや油分、石鹸成分が残っていると粘着力低下によるモシの原因となります。
- 本品が冷たくなっていると、貼り付きが悪い場合がありますので、暖かい部屋に移し、全体が温まってからご使用ください。
- 一度剥がした本品をもう一度使用することはお止めください。粘着力低下によるモシの原因となります。
- 使用期限を越えてのご使用はお止めください。粘着力低下によるモシの原因となります。
- 万一、肌に合わないときは使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

保管上のご注意

粘着力不足などの品質低下の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。

- 高温(40°C以上)・多湿の場所での保管
- 温度の低い場所(冷蔵庫など)での保管
- 直射日光が当たる場所での保管
- 大量購入による長期保管
※箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。
- 圧迫がかかる場所での保管
- トレーから出した状態での保管
- 剥離紙および剥離フィルムを剥がした状態での保管
- 平積み以外の置き方での保管

廃棄上のご注意

使用後は、ストーマ装具と同様に新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨ててください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、ゴミの分別は地域により異なります。詳しくは各自自治体へご確認ください。

種類と規格

セルケア®・ソフトウエハー

種類	商品コードNo.	規格	1箱入数
リング20	20351	穴径20mmφ 外径50mmφ 厚さ2.5mm	10枚
リング30	20352	穴径30mmφ 外径60mmφ 厚さ2.5mm	10枚
スティック	19781	10mm×100mm×2.5mm	10本

ALCARE

アルケア株式会社


東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp


リングタイプ

- ストーマの全周を補強・補正したいときに便利です。穴径をストーマサイズに広げてそのまま貼付していただけます。
また、必要量をカットし、部分的に補正する際にもご使用いただけます。

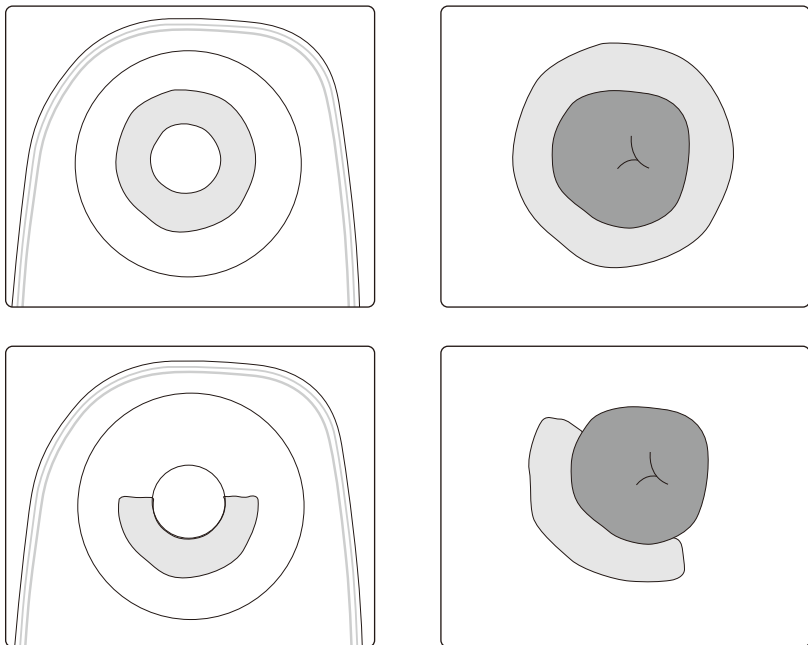

スティックタイプ

- ストーマ周囲を部分的に補正・補強したいときに便利です。必要量をカット、成形し、貼付または充填していただけます。
また、ストーマ基部に巻きつけるなどストーマの全周を補強する際にもご使用いただけます。

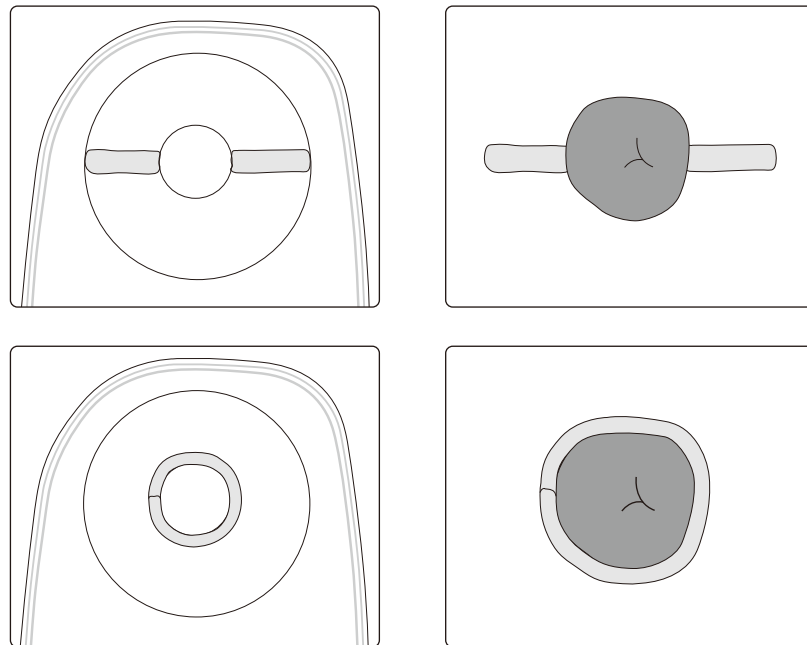

使用手順

貼り方

- ① トレーから必要な量を取り出します。
*セルケア・ソフトウエハーは、ハサミでカットしたり、手でちぎったりすることができます。
*余ったセルケア・ソフトウエハーは、元のトレーに戻して、フタをして保管してください。
- ② セルケア・ソフトウエハー両面の剥離フィルムおよび剥離紙を剥がします。
- ③ セルケア・ソフトウエハーを必要な大きさ、形に整えます。
- ④ 整えたセルケア・ソフトウエハーを面板や皮膚に貼付します。その後、ご使用の装具を通常通り装着し、皮膚になじむように、手で押さえながら十分に密着させます。

剥がし方

- セルケア・ソフトウエハーは面板と一緒に剥がれます。
*皮膚に密着して剥がれにくいときは、剥離剤を使用してください。