



部品の名称

※図は右足
左右兼用品です

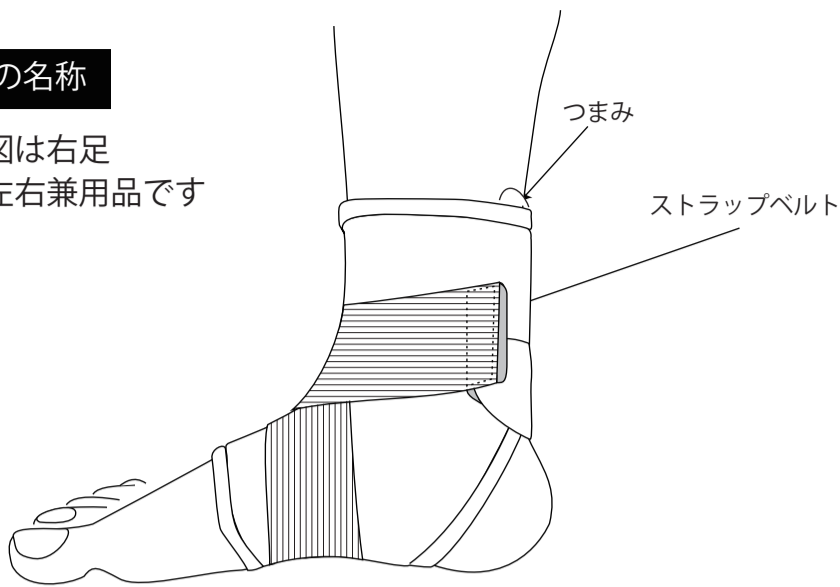


マジックテープを外した状態

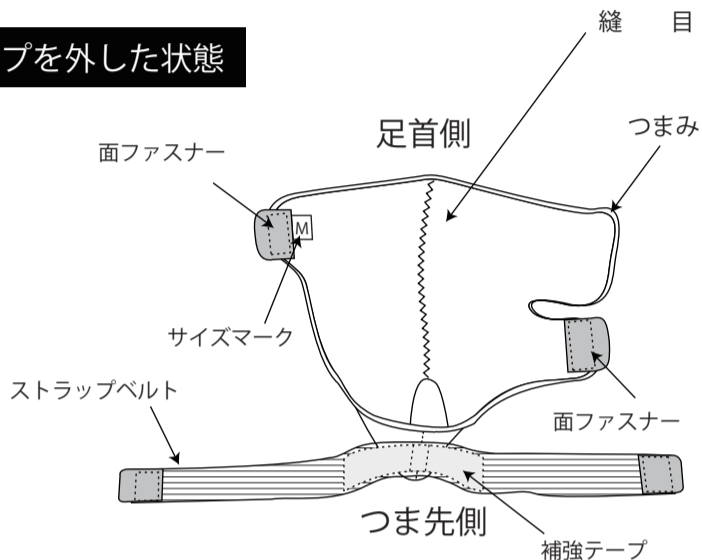


サポーターの装着方法

日本製


1. 本体の面ファスナーとストラップベルトの面ファスナーをすべて外します。

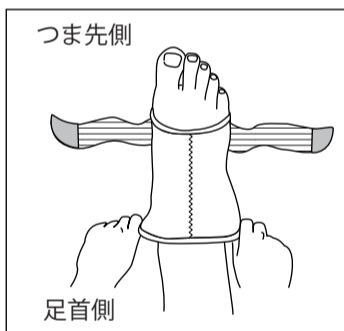


2. 面ファスナーを外した状態のまま (サイズネームが肌にあたる側) 足を入れ 本体上部をもち、靴下を履くよう縫目の中心が つま先側の中心にくるように入れてください。

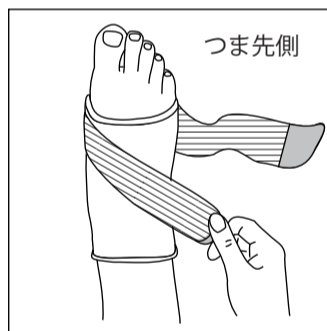

3. 足首を直角にして足の裏全体を床につけます。
下部の面ファスナー部を左手に持ち、右手は面ファスナーが無い方を 生地を引っ張りながら面ファスナーを本体に止めてください。

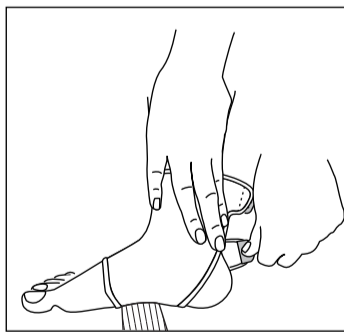


※横から見た図

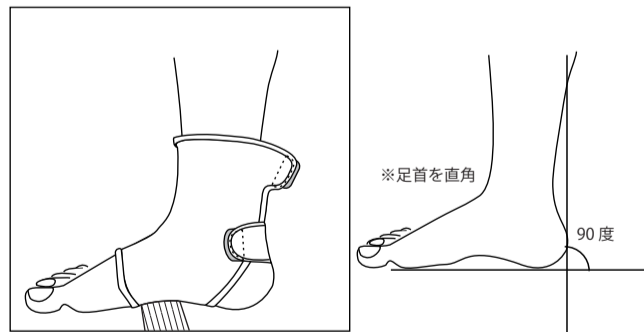


※下部の面ファスナーを止めた図

4. 上部の面ファスナー部と本体つまみ部分を持ち、左側 (面ファスナー) が 上になるよう交差させ面ファスナーを本体に止めてください。

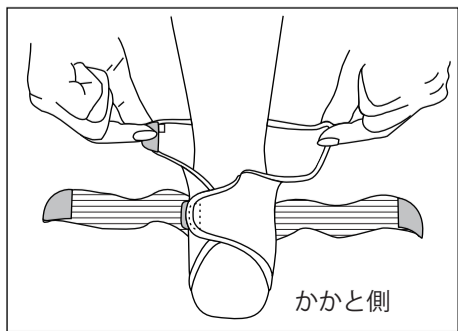

※後ろからみた図

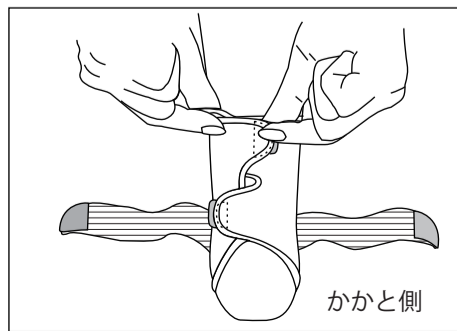

足関節サポーター

エーケーライト

AK-Light

[装着の注意]

● 医師または医療スタッフの指示に従い装着してください。
装着することにより違和感・痛み等を感じましたら直ちに 医師にご相談ください。


● 靴を履く際には靴ひもをゆるめ、履き口を広げてください。

その他:


◇ 洗濯する場合には、中性洗剤で押し洗いして型を整え陰干ししてください。
脱水機・漂白剤・乾燥機のご使用はおやめください。

◇ 素材にはナイロン・ポリウレタン・ポリエステルを使用しておりますので、
使用後は各地方自治体の廃棄区分にしたがってください。


完成図

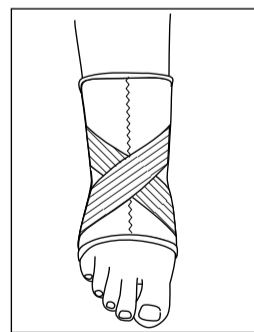

正面

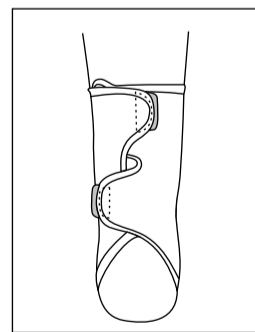

かかと側

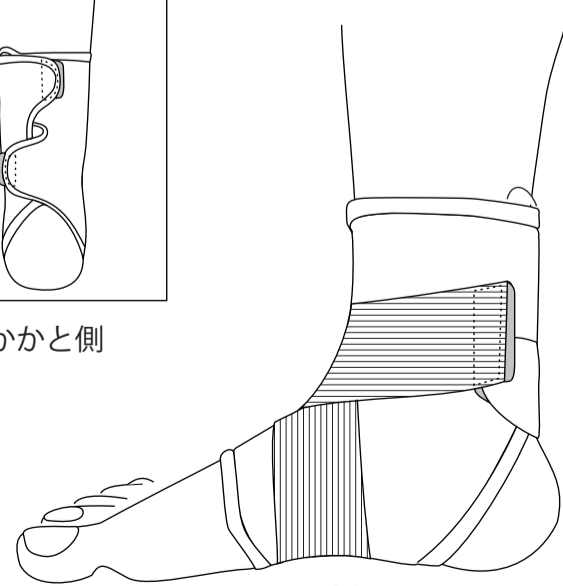

側面

厳密な検査をしていますが万一製品に不備な点がありましたら当社に直接お送り下さい。