

リジャスト・グローブ Rejust Gloves

介助補助手袋
Assistance Gloves

はじめに

《リジャスト・グローブ》は療養者の介助を補助するグローブで、衛生に配慮した使い捨てタイプです。移乗や体位変換の際に使用することで、圧やずれの軽減を図ります。

使用上のご注意

- 装着した際に体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じた場合ご使用をおやめください。
- 排泄物や血液などで汚染された場合は速やかに廃棄してください。
- 爪先、刃物などの尖ったもので傷つけないようご注意ください。破れの原因になります。
- 薬品や溶剤によっては変質する場合がありますので、ご確認のうえ使用してください。
- 水や油類などの液体中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
- 熱いものには触れないでください。熱傷のおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所、高温・多湿な場所での保管は避けてください。

使用場面

ベッド上での横移動、体位変換、ポジショニングなど。

使用方法

《リジャスト・グローブ》の中では、手のひらを広げて使用してください。グローブが抜けにくくなります。

組成・成分

- ポリエチレン

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo,
130-0013, Japan

MADE IN CHINA

