

取扱説明書

車いすハンドリム用滑り止めカバー

こぶグリップ



こぶグリップを安全にご使用いただくにあたって

本製品は、正しく安全に使えば、利用者にとって大変便利で有効な道具になります。以下の事項を守って正しく安全にお使いください。

①取扱説明書

取扱説明書には安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。ご使用になる前に必ずよくお読みください。また、お読みになった後は大切に保存してください。

②使用前の点検

安全にお使いいただくために、使用前の安全点検が重要です。

目次

ご使用上の注意	…1ページ	取り付け前の準備	…3ページ
使用前に日常点検	…1ページ	取り付け手順	…4ページ
注意表示について	…1ページ	使い方	…5ページ
責任制限について	…2ページ	カバーの長さ調整について	…6ページ
仕様・セット内容	…3ページ	オプション	…7ページ

ご使用上の注意

- 本製品はゴム製品のため、使用の有無にかかわらず経時変化し劣化します。ご使用前に傷や亀裂、ひび割れがないか確認してください。損傷があった際は直ちにご使用をお控えください。
- 固定用ベルトにほつれ、ほこりやゴミが絡まっていないか確認してください。固定力の低下になります。

使用前の日常点検

ご使用前に点検項目を必ず確認してください。

販売店様へ：日常点検について、必ずご使用者様へご案内してください。

点検項目	チェック
こぶグリップ本体に傷、亀裂、ひび割れはないか	
こぶグリップ本体はねじれて取り付いていないか	
固定用ベルトは指示通り、4箇所取り付いているか	
固定用ベルトはしっかり締まっているか(緩みはないか)	
固定用ベルトにほこりやゴミが絡まっていないか	
固定用ベルトの環は指示通りに固定されているか	

注意表示について



注意マーク

注意は潜在的に危険な状況で、回避しないとケガ、または物的損害の原因となる場合があることを示しています。

責任制限について

(株)松本義肢製作所は以下の項目に起因する損傷については責任を負いません。

- 取扱説明書の指示に従わない場合
- 販売店・購入者または第三者による誤った組立取付け
- 自然摩耗や誤った保管による製品の損傷
- 使用前に日常点検を実施していなかった場合

ご使用に際して

車いすの駆動以外の用途には使用しないでください。

- 長い下り坂等での**摩擦熱による火傷**に注意してください。
- 素材の性質上、特有のにおいがある場合がございます。
- 漕ぐ際の摩擦により、**手または手袋・衣類などに色が移る恐れ**がございます。
- ご使用によって肌に異常が現れた時は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。

保管について

- 直射日光を避け、紙やビニール等で包装してください。
- 雨又は水のかかる場所を避けてください。
- ストーブその他の熱源に近づけないようにしてください。
- 油類の多いところに近づけないようにしてください。
- 電気火花の出る装置等、オゾンの発生しやすい場所は避けてください。

仕様・セット内容



こぶグリップ本体 左右各1本

材質: 合成ゴム (NBR+PVC)

重量: 約400g/本

寸法: 約1700mm

適応ハンドリム: 21inchまで
(φ16~)



固定用ベルト 8本

材質: ナイロン、鉄(メッキ)

重量: 約5g/本

寸法: 20mm巾 × 150mm

取り付け前の準備



ハンドリム部分の汚れや油分を除去してください。

取り付け手順

- ① カバーの左右を確認し、隙間なく被せてください。



Left→左手側ハンドリムに取り付けます。
(Right→右手側です。)



コブの頂点がやや外側になるように取り付けます。
(※ねじれに注意)

- ② カバーの余分な部分を切り取ってください。



段差ができないよう位置を確認し印をつけカットしてください。
短くなりすぎないようにご注意ください。(1~2mmほど長めにするとゴムがしまり安定します。)




※コブとコブの間でカットできるときれいに取り付けられます。




ずれを防ぐため、重なりや隙間がないよう取り付けてください。

※カットした箇所によっては、コブとコブの間隔が狭くなる場合もございます。

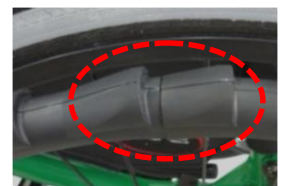

③ 固定用ベルトを取り付けてください。

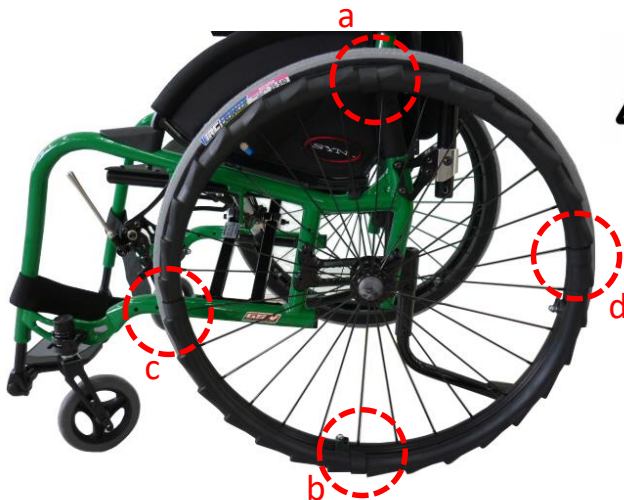

カバーの両端が合わさっている箇所を基準にし、4箇所固定用ベルトを取り付けます。

※ベルト位置

- a. カバー両端の合わせ目
- b. aの反対側
- c. } aとbの間
- d. } aとbの間

【固定用ベルトの環の位置】



ベルトの環がカバーの切れ目に沿うよう取り付けます。
(ベルトは、しっかり締めてください。)

使い方

手のひらをコブに引っ掛け、押し出して駆動させます。



コブに手のひらが引っ掛かります。


※引っ掛かりが外側に必要な場合は、通常よりもコブを外側にして取り付けてください。




カバーの長さ調整について

車いすのタイヤを交換した際など、カバーの長さが足りなくなった場合は、別売りの「こぶグリップ調整用¼カバー」をご利用ください。

※「こぶグリップ調整用¼カバー」の取り付け方

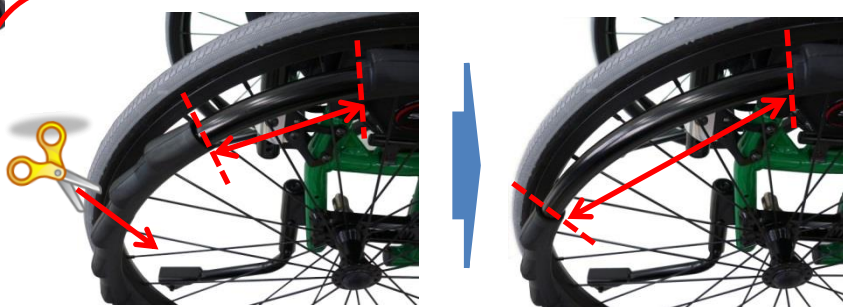

カバー両端の間隔を確認してください。
間隔が狭く、¼カバーが取り付け難い場合は、1~2コブ分カットします。(できるだけ、コブとコブの間でカットしてください。)

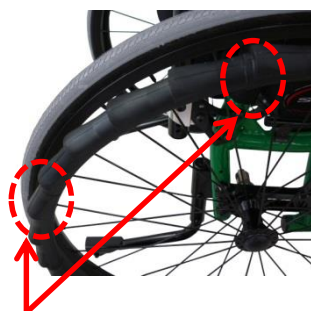

隙間がないよう¼カバーを取り付け、固定用ベルトを締めます。
¼カバーを使用した場合は、5箇所
に固定用ベルトを取り付けます。
(右図参照)



※ベルト位置

- a. } カバー両端の合わせ目
- b. }
- c. aとbの反対側2点の間
- d. bとcの間
- e. aとcの間

オプション

「こぶグリップ調整用¼カバー」
(左右あり)




【セット内容】

- ・¼カットカバー
(左右をお選びください)・・・1本
- ・固定用ベルト・・・2本

・価格: ¥2,640(税込)

「こぶグリップ片側セット」
(左右あり)

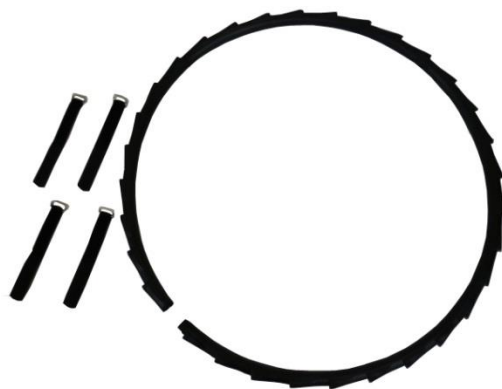

【セット内容】

- ・こぶグリップ 本体
(左右をお選びください)・・・1本
- ・固定用ベルト・・・4本

・価格: ¥10,450(税込)

「こぶグリップ固定用ベルト」
(8本セット)



【セット内容】

- ・固定用ベルト・・・8本

・価格: ¥2,640(税込)

「こぶグリップ固定用ベルト」
(4本セット)



【セット内容】

- ・固定用ベルト・・・4本

・価格: ¥1,540(税込)

製品についてのお問い合わせは……

株式会社 松本義肢製作所

企画事業部

TEL. (0568)47-0150

FAX. (0568)47-0151

本社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
TEL.(0568)47-1701(代) FAX.(0568)47-1702

名古屋営業所 〒461-0013 愛知県名古屋市東区飯田町51
TEL.(052)939-3577 FAX.(052)939-3578

静岡営業所 〒422-8056 静岡県駿河区津島町1番11号
TEL.(054)288-1115 FAX.(054)288-1128

長野営業所 〒390-0851 長野県松本市大字島立330番1号
TEL.(0263)48-2061 FAX.(0263)48-2062

開発センター 〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内字蓮池
409番1号
TEL.(0568)47-1701 FAX.(0568)47-1702