

ニールメッド サイナスリンス 取扱説明書

※ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

洗浄ボトルと生理食塩水を使った鼻洗浄(鼻うがい)

本品は、鼻洗浄用のボトル容器と、洗浄液の薬(生理食塩水の薬を密封した小袋)とで構成されます。洗浄液は、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mlの水と混合して生成します。ボトル容器を押しこめて、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミやチリ、花粉を洗い流します。1日1～2回の鼻洗浄をお勧めします。



使用上の注意

重要 ●鼻・耳の炎症、鼻づまりがひどい場合は、ご使用前に専門医の指導を受けてください。 ●使用後に鼻を強くかまないでください。

- ご使用になる前にボトルに傷や不具合がないかご確認ください。もし、不具合があった場合は、下記の「製品問い合わせ先」までお電話ください。新品にお取り替え致します。
- 痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の指導を受けてください。
- 鼻・耳の手術後の方は主治医の指導を受けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お子様(5歳以上)がご使用される際は保護者が必ず立ち会ってください。
- ボトル容器は清潔な場所での保管し、衛生のために3か月に一度交換してください。
- 鼻腔に残留した洗浄液が、時間が経過した後には少々流れ出てくる場合があります。
- 感染する可能性がありますので、ボトル容器は他の人との共有はしないでください。

効果

鼻洗浄をおこない、鼻腔内のゴミやチリを洗い流します。

使用方法



- ①ボトル容器は240mlの生理食塩水を作ることができ、ボトルを押しこめた中の洗浄液がスムーズに流れるよう設計されています。
- ②洗浄液の薬は、ボトル容器240ml、1回使いきりの容量です。(残った洗浄液は保存できません)

性能に関する事項

- 洗浄液の薬は、必ずニールメッド専用のボトル容器でご使用ください。
 - 必ず体温(36℃)ほどのお湯で洗浄してください。使用の際は、体調をふまえ、自己責任の上でご使用ください。不安がある方は専門医にご相談ください。
 - 1日6回程度(目安)を上限として鼻洗浄をおこなってください。
- 「必ず安全な水で鼻洗浄をおこなってください」
「水質に不安がある際は沸騰させるか、又は0.2ミクロン以下のフィルター洗浄器などでろ過された水をご使用ください。沸騰させたお湯を使用する際は、ゆるま湯、または体温(36℃)ほどに冷却したことを確認してからご使用ください。」
(ご使用する水とその水質に関しては、ご自身の責任で必ず確認してください。)

はじめに手をきれいに洗い、36℃程度のお湯240mlをボトルに入れてください。次に洗浄液の薬を入れてください。

キャップをボトルにしかり取り付け、キャップ穴を塞ぎおぼれないようにボトルを振ってください。

顔を下げ、口で息をしながらボトルをゆっくり振り液を押し出すと、もう一方の鼻孔から洗浄液が流れ出ます。

反対側も同じ手順で行い、終わったら、鼻をティッシュ等でやさしくかみます。(強くかむと耳に水が入る恐れあり)

使用後のメンテナンス

- ①使用後、残った洗浄液を捨て、ボトル、キャップ、チューブを流水で洗います。
- ②ボトルに水を入れ、キャップをしたボトルを強く上下に振ります。
※このとき、中に入れた水が飛び出さないよう、キャップの先端を指で押さえます。
- ③ボトルを強く押し、チューブとキャップの内側を洗浄します。
- ④ボトルを空にして、キャップを外し、水切り用のグラス立てなどを使い、それぞれに水分が残らないよう乾かします。
- ⑤汚れがひどい時は、ボトルに水を入れた後、食器用中性洗剤を数滴垂らし、③の手順で洗ってください。
- ⑥洗浄後は、洗剤の成分が残らないように、十分に洗い流してください。

内容物

- ボトル容器(リフレイルにはボトルは含まず)
- 調合済みサッジエ
- 取扱説明書



保管方法及び使用期間等

- ①使用後は室内の乾燥した場所での保管してください。
- ②ボトル容器は劣化、汚れ、雑菌の繁殖を考慮し、3ヶ月に一度の交換をお勧めします。

製造元(米国工場)

NeiMed Pharmaceuticals, Inc.
601 Aviation Blvd.
Santa Rosa, CA95403 USA

製造販売

ニールメッド株式会社
〒101-0065東京都千代田区西神田2-3-3
TEL.0120-41-3173

販売者
製品問い合わせ先

NeiMed[™] ニールメッド株式会社
〒101-0065東京都千代田区西神田2-3-3

TEL.0120-41-3173

5003F-BRO-JPN-REV/5

BKS/BK10/K60/P60/P120