


# 取扱説明書


## Step1. 準備する

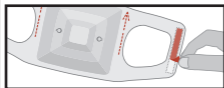

ウラ側の粘着テープの保護シートをはがします。  
注意：保護シートは流せません

## Step2. 設置する

本品を下図のように、便座または便器に貼り付けます。

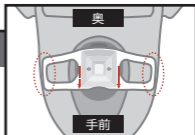

横から見た図




上から見た図



中心より奥側

設置方向

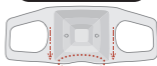

矢印方向と  
切り欠き側が手前

## Step3. 採取と処理



便のサンプルを採取した後、使用したトイレットペーパーを先に流し、便座にテープが残らないように本品をゆっくりはがして下さい。本品は便と一緒にそのままトイレに流して下さい。



1回で  
流れない場合

トイレタンクのレバーを「大」に傾け そのまま5秒間キープして下さい。便器に粘着テープが付着した場合は、トイレブラシなどでこすればすぐにはがれます。

詳しくは Web で>>



## 警告

- 本品は食べられません
- 本品は便を採取するための製品です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 本品はアレルギー対応や低刺激性品ではありません。アレルギーをお持ちの方は、ご自身の判断でご使用ください。
- 本品の不適切なご使用とは、次の使用方法も含まれます。

## 使用上の注意

- トイレにトイレットペーパーが溜まったまま本品を流さないでください。トイレ詰まりの原因となります。
- トイレタンクに十分な量の水をためてから流してください。
- トイレの周辺機器またはトイレについて、本品の不適切な使用によるトイレの破損や故障は補償対象外となります。
- 本品や便座が濡れている場合、本品をご使用の際に破れる場合があります。
- 一度に1枚ずつご使用ください。同時に複数枚使用すると排水口が詰まる恐れがあります。
- 便を保持した状態で激しく振らないでください。
- 本品を長時間放置しないでください。使用後は速やかにトイレに流してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください
- 保護テープはトイレ詰まりの原因となるので、トイレに流さないでください
- 直径75mm以下の排水管を備えたトイレに本製品を使用すると、詰まる可能性があります。配管の詰まりによって便器や床が汚れても、そのようなトイレで使用した場合は補償対象外となります。
- 自動洗浄機能が付与された便器をご使用の場合、本品を使用する際には自動洗浄機能を停止してご使用ください。

## 保管方法

- 高温多湿の環境で保管しないでください。また、火気の近くで使用しないでください。
- 長期間保管する場合は、直射日光、高温・多湿を避けて保管してください。

## 保証期間

- 製品保証期間は購入後1年間です。
- ご購入された製品が不良品の場合、保証期間内であれば無料で交換させていただきます。

## 保証範囲

- 上記保証書は、製品自体の保証書を意味します。製造者/販売者は、本品の破損等又は使用によるその他の製品の損害については、弊社は一切の責任を負いません。