



- ・この度は、ラクデス商品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

危険 ・本品に火気を近づけたり、寝タバコは絶対にしないで下さい。

警告 ・本品は体位変換器ですから、移動用リフトのつり具としては、利用できません。

注意 ・本品を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう恐れがあります。
中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。
・中本体は、洗うことが出来ますが、中素材（ウレタン）が寄った場合は形を整えてください。
・ファスナーでお肌を傷つけないようご注意ください。

〔洗い方〕 カバーを外して、カバーと中本体をそれぞれ洗うことが出来ます。

<p>【外カバー】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯は、常温水にてお願いいたします。 ・乾燥機は、生地の変形の恐れがあるため、低温乾燥にてお願いします。 ・アイロンあては、布を使用してください。 	<p>ネット使用</p>
<p>【中本体】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・中素材（ウレタン）の片寄りに注意してください。 ・洗濯後は、<u>十分に乾燥しているか確認</u>してからご使用ください。 	<p>ネット使用</p>

〔仕様〕

品名	サイズ／重量	材質
ポジシート	2×90×120 cm 1.5 kg	生地：綿76%、ポリウレタン4%、ポリエステル20% 中材：特殊ウレタン100%

〔耐用年数〕 使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕 株式会社丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>

〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18 TEL054-366-1612 FAX054-366-1738