


# 微笑 SA 手すり

取扱説明書 保証書

このたびは、「SA手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書には、この製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。  
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。  
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見れるところに必ず保管してください。

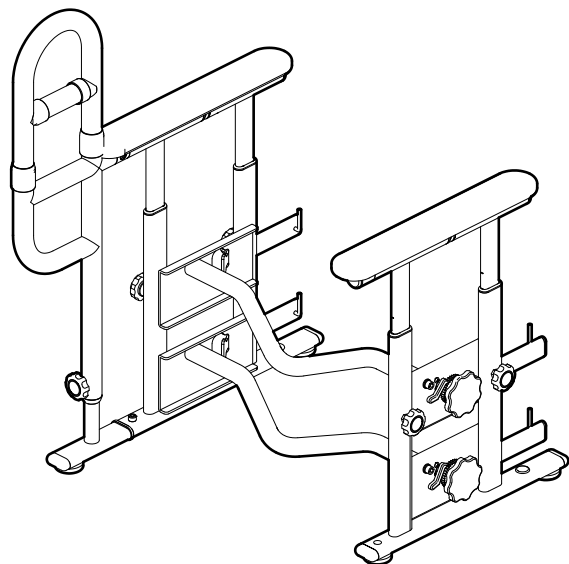



## も く じ

使用上のご注意	1
仕様	2
各部のなまえ・材質	2
便器への取付方法	3～5
ご使用方法	6
お手入れ方法	6
保証書	7



用途	洋式トイレに据え置き可能な、便器への移乗、立ち座り補助のための手すりです。 それ以外の用途には使用しないでください。
特徴	U字補助手すりが付いたことにより便器までの移動、方向転換、便器からの立ち座りなど、 一連の動作を補助します。 フレーム幅の調節が可能です。 床に固定することが出来ます。（アンカー別途）

# 使用上のご注意



ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 <b>警告</b>	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。


## 取扱上のご注意

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・製品は、家庭の洋式トイレ用の立ち上がり・座り補助のための据え置き手すりです。それ以外の用途には使用しないでください。</li><li>・体重が100kgを超える方は使用しないでください。</li><li>・手すりが濡れた状態で使用しないでください。</li><li>・手すりの先端や端部に力をかけないでください。</li><li>・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。</li><li>・以下のことを守って設置を行ってください。誤った取り扱いをするとけがの原因になります。<ul style="list-style-type: none"><li>・アジャスターは5mm以上伸ばさないでください。</li><li>・取り付け可能な便器以外に取り付けないでください。</li><li>・ジョイントバーを便器に押し付けた状態で取り付けてください。</li><li>・便器がしっかり固定されていることを確認してください。</li></ul></li><li>・改造や加工をしないでください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ハンドルは、工具を使用して締め付けしないでください。</li><li>・定期的に点検を行い、ガタツキやネジの緩み、部品の破損がないことを確認してください。</li><li>・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。</li></ul>

## 使用上のご注意

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談してください。ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。</li><li>・予測できない行動をとる方や、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。自力で危険な状態から回避することができない利用者（認知症など）の方につきましては、ご使用を控えてください。※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。</li><li>・製品が破損している、または正常な状態でない時は使用しないでください。</li><li>・使用中にゆるみやがたつきが発生した場合は、直ちに使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談ください。</li><li>・手すりと手すりの間に身体の一部が挟まらないように注意してください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・設置後、がたつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。</li><li>・固定式でないため設置後の安定性にもご注意ください。</li><li>・ご使用の際は幼児が近づかないようにしてください。</li><li>・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。</li></ul>


# 仕様

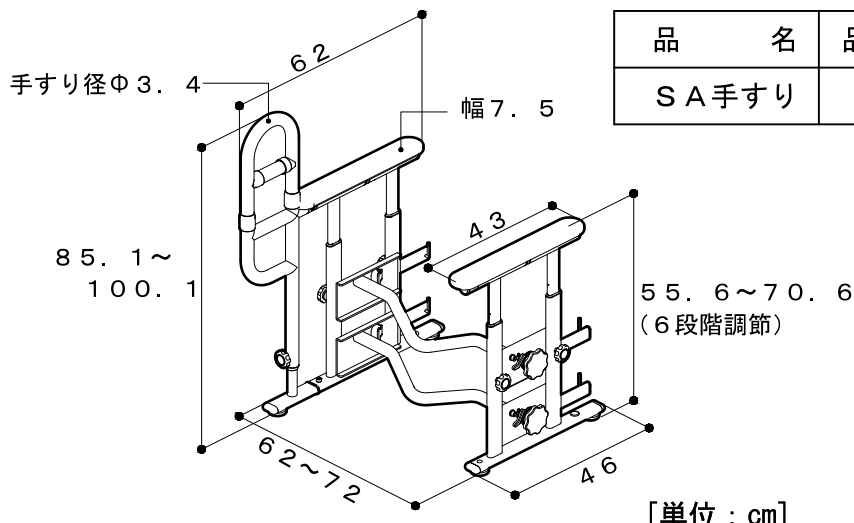
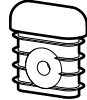






品名	品番コード	TAISコード	重量
S A手すり	627-060	01235-000225	約17.5kg

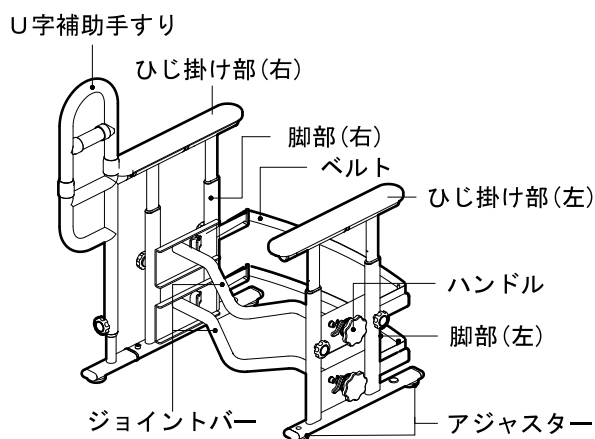※最大使用者体重 100kg

## 各部のなまえ・材質



付 属 品		
		
六角レンチ 対辺6mm	楕円中栓	アジャスター
		
穴栓 先端用	丸中栓	U字補助手すり用ビス

部材の名称	材質	入数	付 属 品		
ひじ掛け部 (右)	ステンレス 手すり：天然木	1※1	部材の名称	材質	入数
脚部 (右)	ステンレス		六角レンチ 対辺6mm	スチール	1
ひじ掛け部 (左)	ステンレス 手すり：天然木		楕円中栓	樹脂	1
脚部 (左)	ステンレス		アジャスター	合成ゴム	1
ベルト	合成ゴム		穴栓 先端用	樹脂	1
ジョイントバー	芯材：ステンレス 被膜：樹脂		丸中栓	合成ゴム	1
ハンドル	樹脂		U字補助手すり用ビス	ステンレス	3
アジャスター	合成ゴム				
U字補助手すり	ステンレス 手すり：天然木	1			


※1 SA手すりはU字補助手すり以外は組立済で梱包されています。

# 便器への取付方法

## ①手すりの幅を便器に合わせる



※手すりの幅調整、ジョイントバーの角度調整をする場合、プラスチックハンマー又はそれに準ずるものが必要です。

左右の脚部にある幅調整ねじを六角レンチで緩め、幅調整ねじの先端部をプラスチックハンマー等で叩いてロックを解除してください。その後、取り付ける便器の幅に合わせて手すりの幅を伸長させてください。

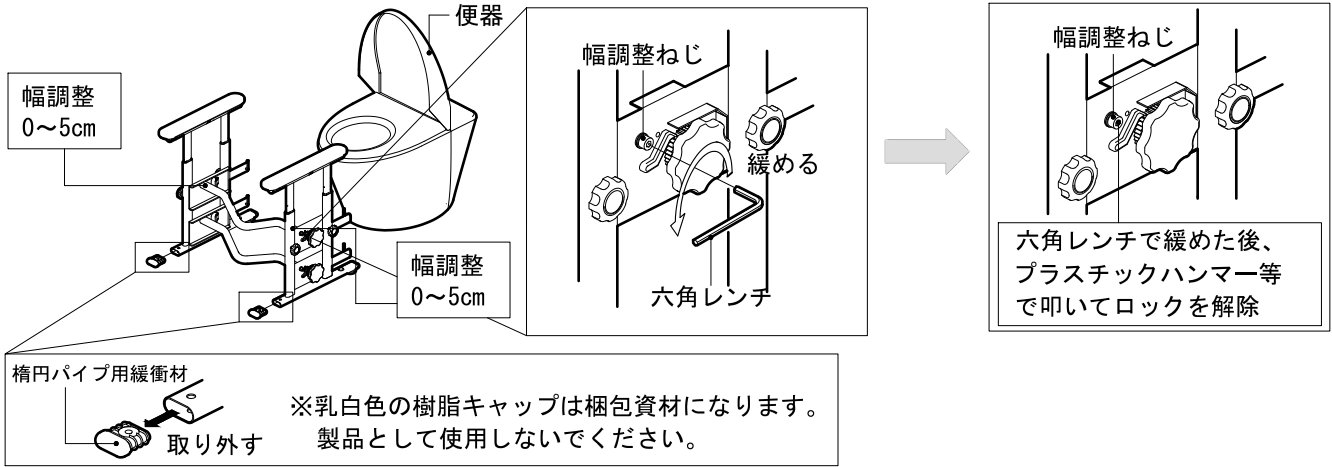



## ②ジョイントバーの角度調整

ジョイントバーの角度を便器の形状に合うように調整してセットしてください。六角レンチを使用して、左右の脚部の幅調整ねじをしっかりと締めつけてください。

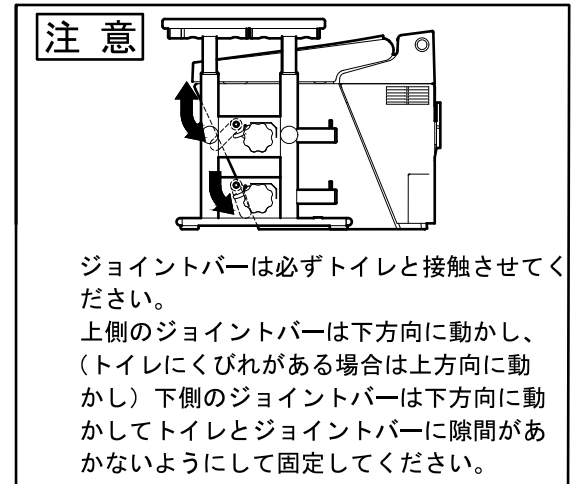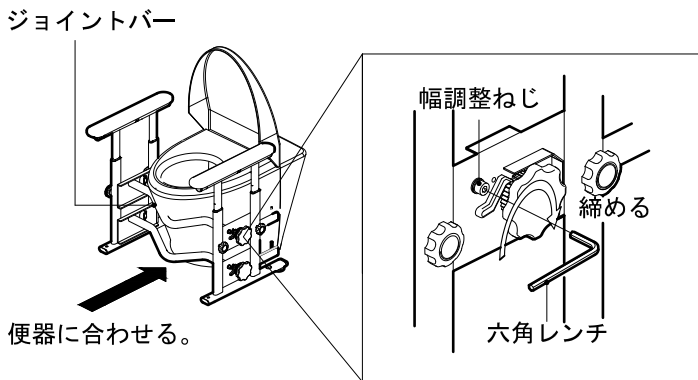

## ③便器裏側にベルトを通す


ストッパーを押してラッチを解除し、ベルトをすべて引き出して便器の裏側に通してください。※2カ所

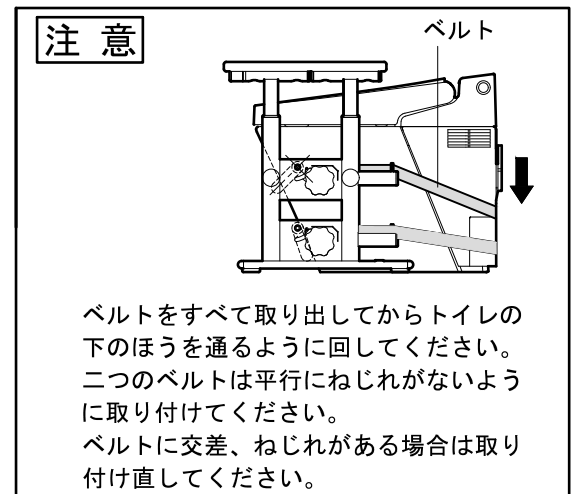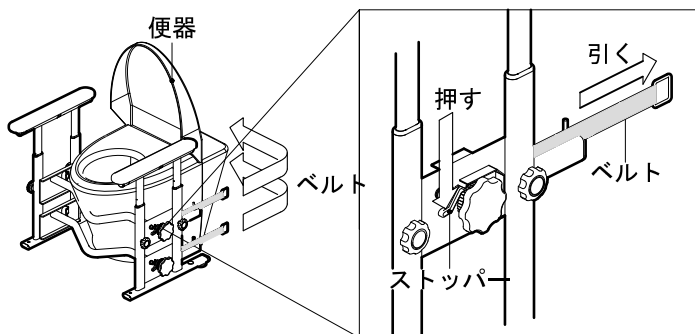

# 便器への取付方法

## ④ベルトを締めて固定

ベルト先端の金具を、脚部（右）のフックに引っ掛けてください。  
そして、ハンドルを回し便器をベルトで締め付けてください。※2カ所

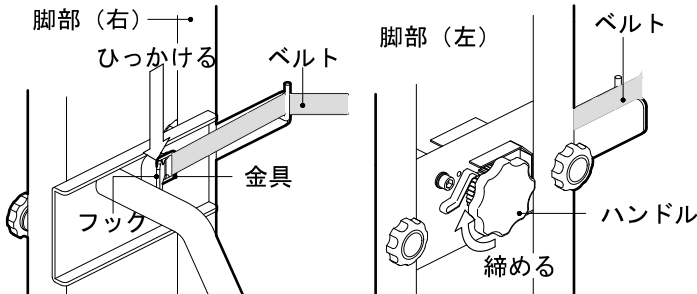


### ⚠注意

フックに金具を引っかけているか必ず確認してください。  
違うところに金具をひっかけると破損する恐れがあります。  
ベルトは必ず2カ所使用して固定してください。手すり  
が正しく固定できない恐れがあります。

### 注意


ジョイント  
バーを引っ  
張る。

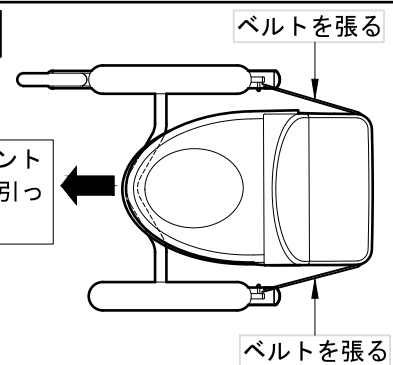

ハンドルを回して取り付けしたベルトの張りを調整するためにジョイントバーを引っ張って均等になるようにしてください。その後、ハンドルを増し締めしてベルトを張りなおしてください。

## 床への設置方法（アンカーは別途お買い求めください。）

本製品は床がコンクリートやタイルの場合に限り直接設置することもできます。

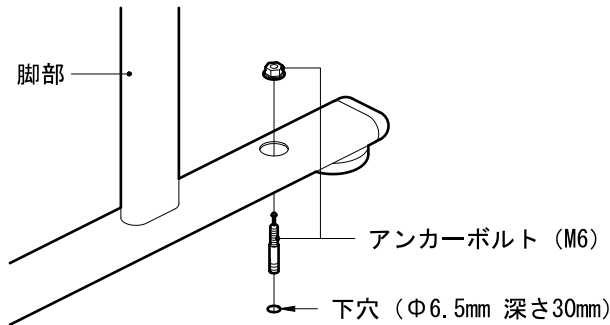

※左右の脚部2カ所に固定してください。  
アンカーボルトは別売りです。別途お買い求めください。

### 床がコンクリートやタイルの場合

#### 必要な工具


- ・電動ドリル
- ・ドリル刃（コンクリート用Φ6.5mm）
- ・ハンマー（アンカー固定用）
- ・ソケットレンチ（10mm）

#### 取付方法

- ① 設置場所を決めた後、コンクリートドリル刃で下穴をあけてください。
- ② 下穴にアンカーボルトを差し込み、アンカーボルト上部のピンをハンマーでたたき込んでください。
- ③ ソケットレンチでナットを締め固定してください。

## ⑤ひじ掛け高さ調節

高さ調節つまみを取りはずし、ひじ掛け部をスライドさせて、マークに合わせて高さを調節し、高さ調節つまみで仮組してください。

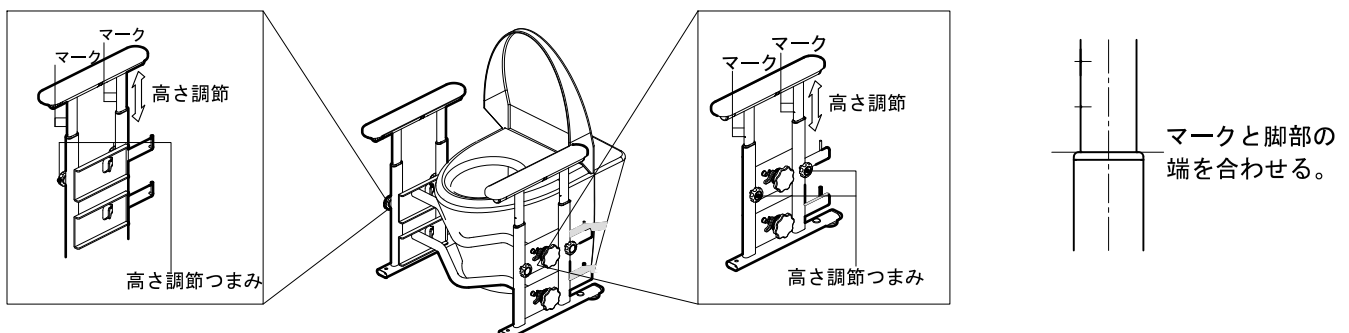

# 便器への取付方法

## ⑥ U字補助手すりを取り付ける

設置するトイレの状況（手すり、ペーパーホルダー、ドアの位置関係）に合わせてU字補助手すりを取り付ける方向を決めてください。

高さ調節つまみ2を緩めてトイレフレームのひじ掛けとU字補助手すりの高さを合わせてください。


U字補助手すり用ビスで2カ所固定してください。

手順⑤で仮組している高さ調節つまみを固定してください。

U字補助手すりを取り付けない部分について

ひじ掛け先端部は丸中栓をU字補助手すり用ビスで固定してください。

脚部先端部へゴム脚、楕円中栓、穴栓 先端用を組み付けてください。

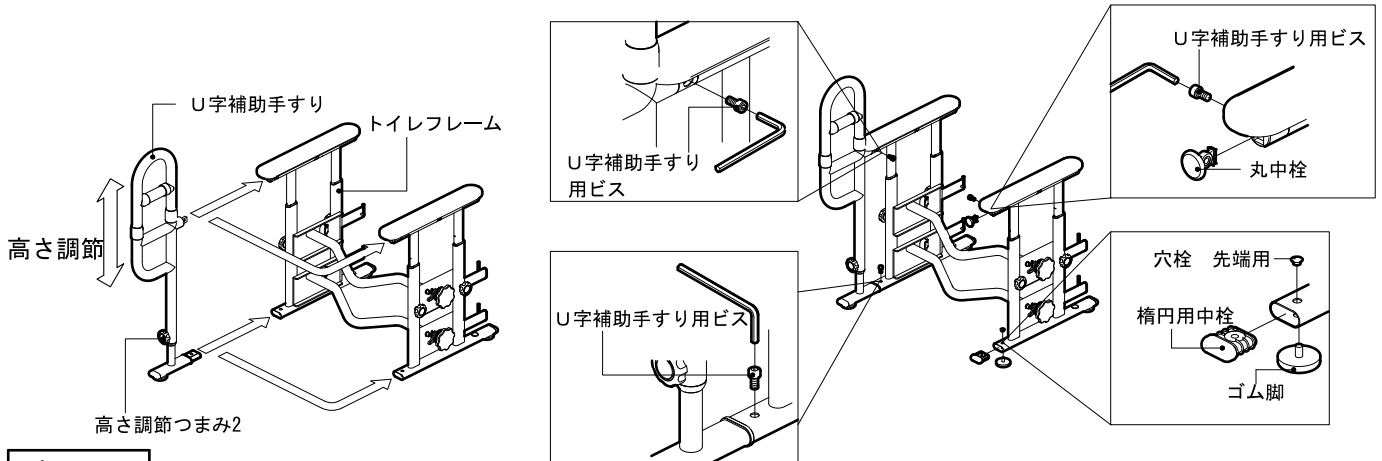


### ⚠ 注意

U字補助手すりを取り付けるときはトイレフレームを少し浮かせて、U字補助手すりの下側より差し込んでください。  
少し浮かせる。 下側から先に入れる。

※再度高さを調節する場合は、高さ調節つまみ、高さ調節つまみ2を取り外してから調節してください。

## ⑦ アジャスターの調整

脚部のアジャスター（4か所）を回し、がたつきがないよう高さを調整してください。

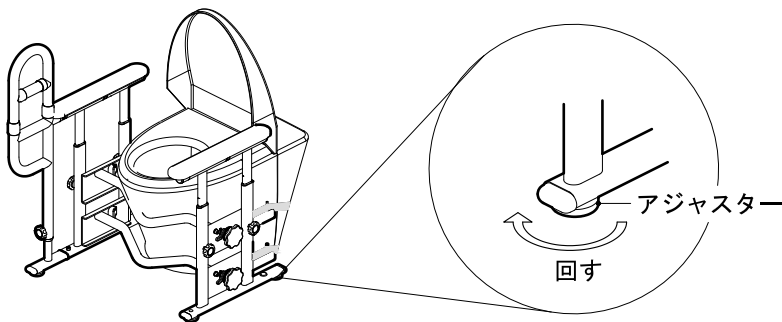

### ⚠ 注意

アジャスターは5mm以上伸ばさないでください。

## ⑧ 安全の確認

ずれやガタツキが無いことを確認してから使用してください。


### ⚠ 注意

ひじ掛けを持って前後左右に揺らし便器と手すりが固定されているか確認してください。

収納する場合は取付手順の逆の操作をしてください。

# ご使用方法

- 便器からの立ち座り動作を補助します。
- U字補助手すりに寄りかかすることで、立位を保持することができます。
- U字補助手すりを使用することで、便器までの移動、方向転換時の動作を補助します。

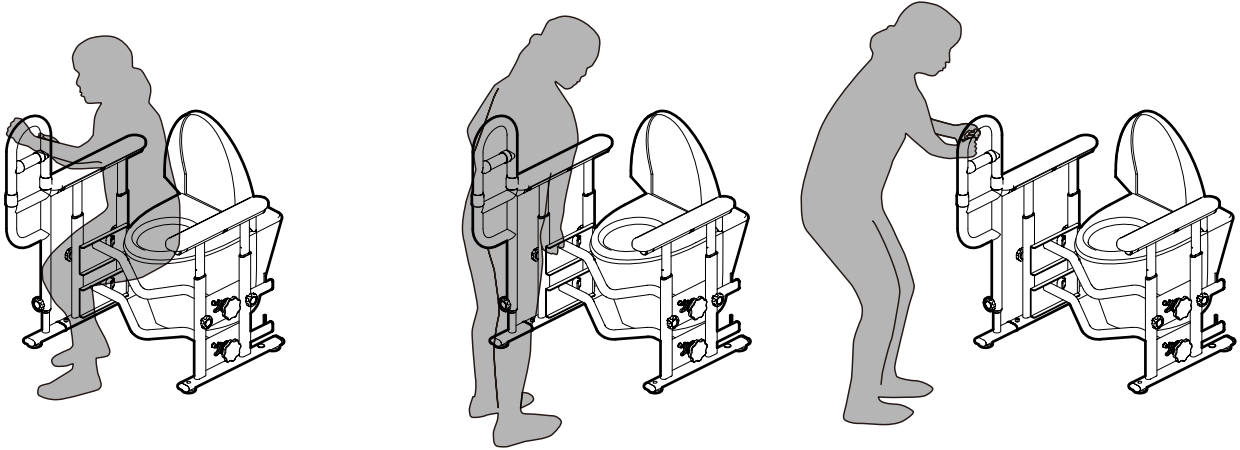

## ⚠ 注意

手すりの上に乗ったり、座ったりしないでください。

# お手入れ方法

## ■ 日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。  
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。



注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。

- ・ 酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・ シンナー、油類などの有機溶剤
- ・ クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ 研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

## ■ 消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。  
アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。



注意

下記のものは、消毒に使用しないでください。  
オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）

## ■ 点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。  
異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

## ■ 保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。  
高温多湿の場所で保管しますと、変形や変色の原因となります。

# 保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。  
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理いたします。

1. 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - 1) 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障又は損傷。  
(本来の用途以外で使用した場合、耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
  - 2) 弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
  - 3) 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
  - 4) 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
  - 5) お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
  - 6) その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
  - 7) 本保証書のご提示がない場合。
  - 8) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## <個人情報の取扱いについて>

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。  
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1年間	ご住所 〒
品名		_____
販売店		ご芳名
		TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・取扱などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

19.12  
009-5008A



本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15  
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>