

ベルカラー

取扱説明書

■製品概要

- ・手や腕を拘束せずに小児の自己抜管を抑制できる
- ・手や腕が拘束されないのでリーチング動作等の発達過程が阻害されにくい

■対象年齢

2か月～2歳未満 ※対象年齢には個人差があります。

■材質

本体：ポリプロピレン（耐熱温度 110 度）
 エッジ部：（表）ポリウレタン（耐熱温度 90 度）
 （裏）ポリエチレン（耐熱温度 70 度）
 ブラホック：ポリアセタール（耐熱温度 80 度）

■サイズ

首周り：約 33 cm～39 cm(4 段階)
 長さ：約 14 cm

■洗浄の仕方

- ・使用後はすぐにぬるま湯につけ、柔らかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。くわしくは合成洗剤の使用方法に従ってください。洗浄後は必ず乾かしてからご使用ください


■素材について

- ・素材の性質上多少の傷等ありますが性能には影響ございません。

■消毒または除菌の仕方


- ・アルコールによる消毒ができます。

■医療分類：雑品

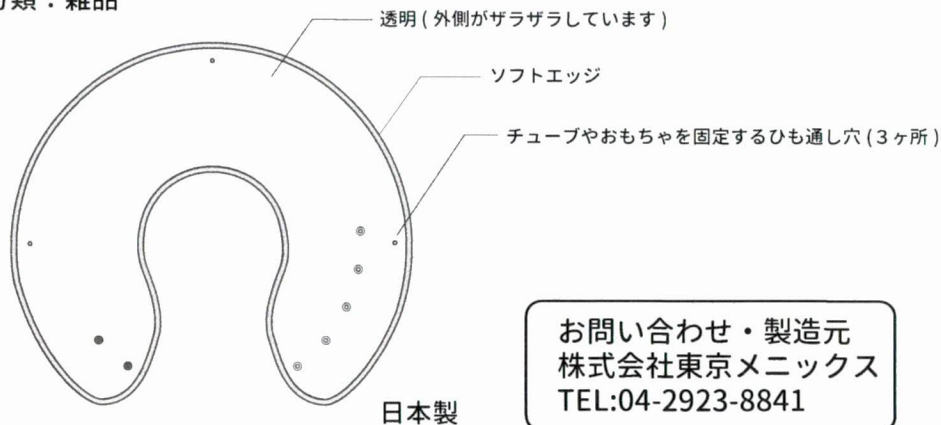

■使用方法

- ・お子様の首回りに合わせて、ホックを 2 個カチッと音がするまで留めてください。ホックは 4 段階で調整できます。
- ・ベルカラーの向きに注意してホックが下に来るように装着してください。
- ・肌が弱いお子様が使用の場合は、直接肌が当たらないように首にガーゼなどの布を当ててご使用ください。

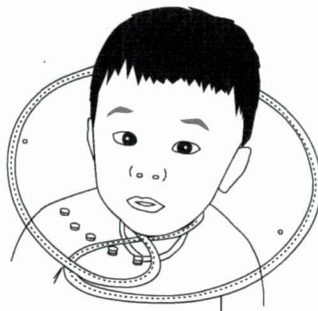

※ボタンは必ず 2 つ止めてください。
 ※ザラザラした面が外側になります。

お問い合わせ・製造元
 株式会社東京メニックス
 TEL:04-2923-8841

安全上のご注意（安全にお使いいただくために必ずお読みください）

表示の説明

	警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。」
	注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や、物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の説明

	強制	必ず実行していただく内容を示しています。		禁止	行ってはいけない内容を示しています。
--	-----------	----------------------	--	-----------	--------------------

		警告
	強制	<ul style="list-style-type: none"> ◎必ず保護者、医療従事者の目の届くところで使用し、絶対にお子様から目を離さないでください。窒息や思わぬ事故につながる恐れがあります。 ◎ベルカラーが引っかかると首を締め付ける恐れがあり、危険です。ベルカラーが引っ掛かるような障害物が周りに無い事を確認してからご使用ください。
	禁止	◎本来の使用目的として着用する以外の目的には使用しないでください。

		注意
	強制	<ul style="list-style-type: none"> ◎使用中または使用後に肌に赤み、腫れ、痒みなどの異常があらわれたときはすぐに使用を中止し医師に相談してください。 ◎首回りの長さを調節する際は、無理に締めないでください。また、お子様への着用は必ず保護者か医療従事者が行ってください。 ◎必ずお子様の手が届かないところに保管してください
	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ◎サイズが合わない場合は使用しないでください。 ◎一時的に使用する補助具ため、睡眠中や長時間の使用は避けてください。 ◎通気性のない素材のため、鼻や口にかぶらないようにしてください ◎裏面での使用はお避けください。 ◎落としたり強い衝撃を与えたりなどして、無理な力を加えると製品が破損する原因になります。 ◎煮沸消毒や食器洗浄乾燥機、電子レンジは絶対に使用しないでください。 ◎安全のため、破損、変形したものは使用しないでください。 ◎直射日光のあたる場所や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。 ◎シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。 ◎火気や熱いものの近くでの使用、及び放置はしないでください。 ◎折り曲げたままの長期保管はしないでください。 ◎スプーンやフォークなどの硬いものや、先端が尖った物でこすらないでください。 ◎たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りのナイロンたわし、金属たわし等は使用しないでください。製品の表面に傷が付く恐れがあります。

【免責事項について】 誤った使用に起因する損害は一切補償しません。