

## 種類と規格

種類	商品コードNo.	規格	1函入数
プレカットシート	20781	250mm×110mm×5mm厚	20枚
フリーカットシート	20782	580mm×400mm×5mm厚	3枚

for Best Care **ALCARE**

# フェルト絆® Adhesive Felt

フェルトのり付き  
Adhesive Felt

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

**ALCARE**

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

## はじめに

《フェルト絆》は、免荷状態を作るために使用される材料です。自由に加工でき、皮膚に貼付することができます。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

## 使用上のご注意

※本品のご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みになったうえ、必ず医師などの医療従事者は使用される方へ適正使用のための説明・指導をしてください。

### ⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 必ず免荷部分に応じて、ハサミなどを用いて加工したうえでご使用ください。
- 免荷部分には直接本品を貼付しないでください。
- 免荷部分に創傷がある場合は、本品が創傷に直接触れないよう適切な処置を行ったうえでご使用ください。
- 免荷部分に感染またはそのおそれのある方、重症虚血のある方は、症状を悪化させるおそれがありますので、使用しないでください。
- 貼付部位に皮膚疾患がある方に使用する際は、使用中も皮膚疾患の患部をよく観察してください。症状が悪化した場合は直ちに使用を中止し、医師に相談するよう指導してください。
- 本品はフェルトを使用しているため、長時間の荷重によって潰れが生じます。免荷状態が十分に得られない厚みまで潰れてしまった場合は、貼り替えを行ってください。
- 使用中も免荷部分をよく観察してください。免荷部分に異常が発生した場合や、本品の貼付部位に発赤・かゆみなどの症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談するよう指導してください。
- 本品は羊毛を使用しています。過敏症の方への使用はお控えください。
- 一度使用した本品は再使用しないでください。


## 保管および取扱上のご注意

- 本品は羊毛フェルトを使用しています。
  - ・天然由来の素材のため、白色以外の繊維が付着していることがありますが、ご使用に影響はありません。
  - ・湿度の影響で厚みが多少増減することがあります。
- 本品はゴム系粘着剤を使用しておりますが、天然ゴムは使用していません。
- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室内で保管してください。
- 本品は繊維製品です。廃棄する場合は各自治体の分別方法に従ってください。

## 使用方法


- ご使用前には本品の粘着性があることを確認してください。
- 次に示すのは使用方法の一例です。必ず医療従事者は免荷部分の状態に合わせて使用方法を判断し、使用される方へ説明・指導をしてください。

- ① 貼付部位に合わせて本品を型取りします。切り抜きたい免荷部分に合わせてマーキングをします。

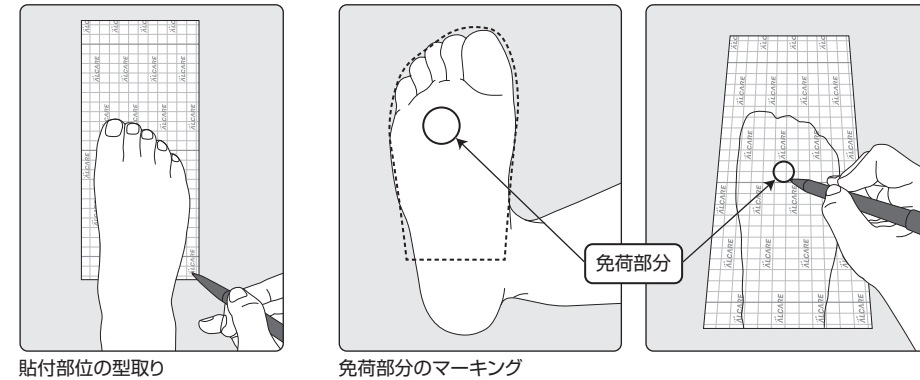


- ② 貼付部位の型に合わせてハサミなどで切ります。免荷部分はマーキングよりやや大きめに切り抜きます。

免荷部分のマーキングより大きめに切り抜く

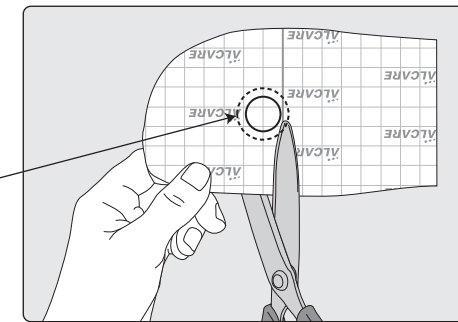

- ③ 本品を貼付します。免荷できるまで必要に応じて重ね貼りをして厚みの調整をしてください。また本品がずれる可能性がある場合は、ずれないように固定してください。

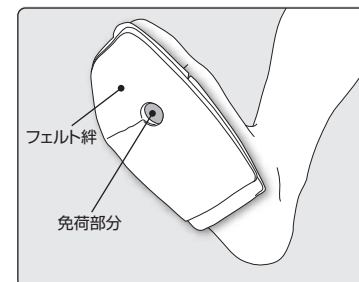

※重ね貼りをする場合、免荷部分を切り込む位置を変えてください。切り込み位置が重なると、動きによるずれが生じやすくなります。

