



## SAM IO アダプター 取扱説明書

### 取扱説明書

SAM IO アダプターは別のニードルを使用する時に、SAM IO ドライバーに取り付けます。アダプターはニードルの柄にピッタリはまり、SAM IO のニードルと同じような様式で SAM IO のドライバーに接続されます。関連の使用説明書を全て参照してください。

### 製品情報：

製品番号：SAM7420  
 接億部品：SAM IO アダプター

### 使用方法：


- 骨内注入ニードルをアダプターに取り付けてください。アダプターはニードルの柄の部分にピッタリはまります。
- アダプターを SAM IO のドライバーに取り付けてください。  
 注：SAM IO のニードルは、アダプターと併用するよう意図されていません。SAM IO のニードルはアダプターなしで、直接ドライバーに取り付けてください。

### ユーザーのための重要な情報：

SAM IO 骨内注入アクセスシステムが適切に機能するために、次の条件が推奨されています。

- この製品はこの説明書と関連の製品ラベルに従った方法でのみ使用してください。
- 調整、改善、技術的なメンテナンスおよび修理は許可されていません。
- SAM IO アダプターは使い捨てのデバイスです。

- 処置を行うために、関連の使用説明書を参照してください。

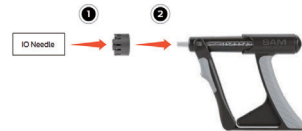

### 記号解説：

医師の管理下による使用のみです。		医療機器に表示できない警告や取り扱い上の注意などの重要な注意事項について、ユーザーが使用説明書を参照する必要があります。	
ユーザーは使用説明書を参照する必要があります。		胸骨用ではありません。	
欧州連合の医療機器指令で定義される医療機器製造元です。		滅菌処理されていない医療機器を示します。	
バッチおよびロットが確認できるように製造元のロット番号を示します。		使い捨て、または 1 人の傷病者に対して 1 回の処置で 1 度だけ使用することを意図された医療機器です。	
医療機器が識別できるように製造元のカタログ番号を示します。			

**SAM MEDICAL** 開発製造：サムメディカル社  
 (米国・オレゴン州)

アコートインターナショナル株式会社  
 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005  
 TEL.03-3299-6751 FAX.03-3299-6752  
 e-mail: Accord@accord-intl.com http://www.Accord-INTL.com