



**Soulage**  
スラージュフロアクッション

## 取扱説明書

本製品は株式会社ロジャースイノアックが生産する  
高機能ウレタンフォーム **PORON®** を使用しています

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

## 使用上の注意

### ⚠ 警告

- 包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。製品を取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。
- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 衝撃を緩和するものであり、怪我を防止することを保証するものではありません。製品を使用しても骨折などの重傷を負う可能性はありますので、十分注意してお使いください。

### ⚠ 注意

- 製品上での喫煙は、おやめください。火種の落下等により火傷の原因となります。
- 40℃以上の高温になる場所でのご使用はお避けください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、劣化の原因となります。
- 室内の平坦で凹凸のない床面で、広げた状態でお使いください。段差があるところでの使用は、破損することがあります。
- 屋外では使用しないでください。
- 床面や製品が濡れた状態では使用しないでください。滑ることがあります。
- ベッドや家具など、重いものを長時間一定の場所に載せないでください。変形することがあります。
- 振り回したり、製品で物や人を叩いたりしないでください。
- 過度の力を加えると破損の原因となります。
- 鋭利な物で製品を傷付けないようご注意ください。
- 製品を折り曲げないでください。破損の原因になります。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
- 製品本来の用途以外で使用しないでください。

## お手入れ方法

- 汚れた場合は、固く絞った濡れタオル等で水拭きしてください。  
次亜塩素酸ナトリウムをご使用の場合は、希釈濃度 0.5%(5000ppm) 以下にて清拭してください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用できません。

## 特徴とご使用方法

- 衝撃吸収性に優れている為、転倒時の衝撃緩和や歩行による足への負担を軽減します。
- 硬い床やフローリング床等にも接着剤無しで取り付けられます。壁面には取り付けられません。
- カッター等でカットできます。ケガの無いよう注意して作業してください。
- リビングルーム、寝室、ダイニング等様々な場所でご使用いただけます。
- 製品を設置する場合は、床面のゴミやほこりを取り除いた上でご使用ください。無理に引き伸ばしてのご使用はお避けください。
- 設置後は製品が滑らない事をお確かめの上ご使用ください。
- 製品を取り外す際には、ゆっくり剥がしてください。密着具合によっては、強く吸着している場合があります。

お問い合わせ先

株式  
会社

イノアックリビング

0120-790-593

受付時間 9:00~18:00  
(土・日・祝日と年末年始等は除く)

191002