



正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

■製品外観

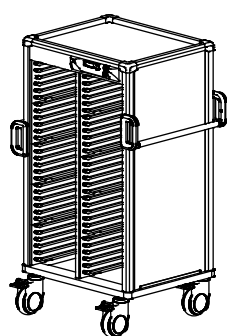

Nカート与薬ロングシリーズ
対応コンテナ: 与薬コンテナNロング

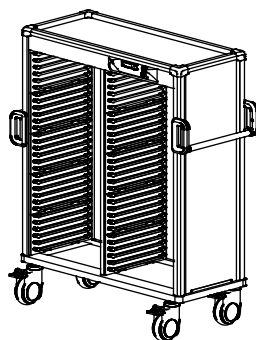

Nカート与薬ワイドシリーズ
対応コンテナ: 与薬コンテナNワイド


■均等耐荷重について

耐荷重は収納するコンテナ1杯あたり2kgとし、
各カートの全体の耐荷重は下記となります。

Nカート与薬ロング2列10段:	50kg
Nカート与薬ロング2列12段:	60kg
Nカート与薬ロング3列10段:	75kg
Nカート与薬ロング3列12段:	90kg
Nカート与薬ロング4列10段:	100kg
Nカート与薬ロング4列12段:	120kg
Nカート与薬ワイド1列10段:	25kg
Nカート与薬ワイド1列12段:	30kg
Nカート与薬ワイド2列10段:	50kg
Nカート与薬ワイド2列12段:	60kg
Nカート与薬ワイド3列10段:	75kg
Nカート与薬ワイド3列12段:	90kg

■レバーの施錠について

付属の鍵でレバーを動かさないよう施錠できます。
鍵の操作は、レバーをCLOSEの状態に
することで可能になります。

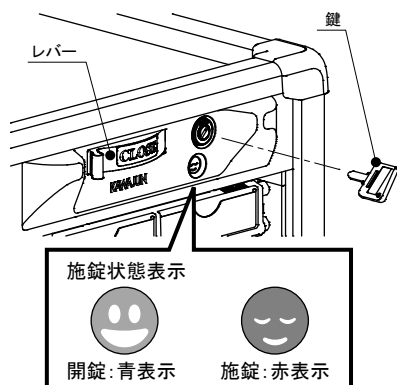

施錠状態表示

開錠: 青表示 施錠: 赤表示




注意 キーを刺したまま、カート
を走行しないでください。
破損の原因となります。

■コンテナの引出し制御について

レバーを操作する際は、レバーの施錠を解除してから行ってください。
※コンテナとブラインドユニットはオプションです。


レバーを右に回してOPEN状態にすると、
コンテナが引き出せる状態になります。
ブラインドユニットを取り付けている場合は、
ラベルが表示されます。

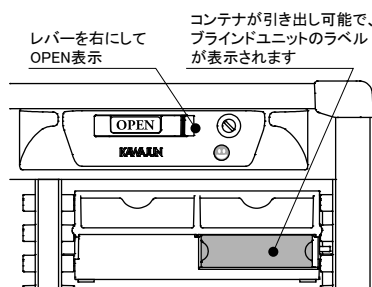

レバーを右にして
OPEN表示

コンテナが引き出し可能で、
ブラインドユニットのラベル
が表示されます

コンテナを収納しレバーを左に回してCLOSE
状態にすると、コンテナが引き出せなくなります。
ブラインドユニットを取り付けている場合は、ラ
ベルが持ち上がり非表示になります。

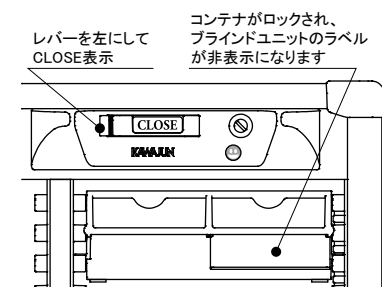

レバーを左にして
CLOSE表示

コンテナがロックされ、
ブラインドユニットのラベル
が非表示になります




注意 レバーをクローズにする際は、すべてのコンテナが本体の奥まで収納されて
いることを確認してから行ってください。コンテナが手前に出ている状態で無
理にレバーをクローズにすると、コンテナやカートの破損の原因となります。

■コンテナが引き出せなくなった場合の緊急対応

施錠に不具合が発生し、緊急で中の物を取り出したい際は以下の方法で施錠を解除してください。

1


天板の4カ所のコーナーカバーを取り外
します。右後のコーナーに収納されてい
る六角レンチを取り外します。

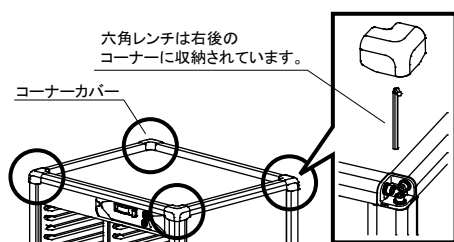

六角レンチは右後の
コーナーに収納されています。

2


六角レンチで4カ所の天板固定ネジを取り
外し、天板を上を持ち上げて外します。

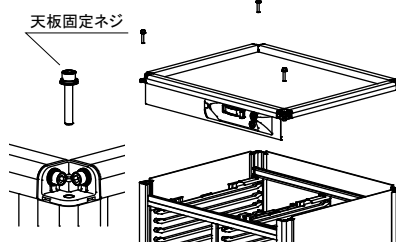

天板固定ネジ

3

図のプレートに右に動かすことで
コンテナのロックが外れて引き出
せるようになります。

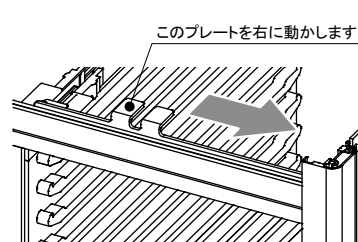

このプレートを右に動かします

安全上のご注意 **必ずお守りください**

△ ご使用について

- 水平な場所で使用してください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 物品を載せる際には、上部からの強い衝撃をさけてください。
- 物品を載せる際には、均等に載せてください。
- ご用途以外での使用はしないでください。
破損したりケガをする恐れがあります。
- キャスターは定期的に点検してください。
車輪にゴミを巻き込んでいたり、取り付け部分が緩んでい
ると、故障の原因となります。

お手入れについて

- 汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った
布か、水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)
に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕
上げてください。
- 消毒用エタノールで消毒する場合濃度80%
以下のエタノールを染み込ませた、柔らかい
布で軽く拭いてください。

- 次亜塩素酸ナトリウムで消毒する場合
濃度0.03%以下に薄めた次亜塩素酸ナトリ
ウムを塗布し、10分放置した後、水に浸して
固く絞った布で拭き取ってください。



ベンジン、シンナー等は
ご使用にならないでください。