

## レクタンギュラーピロー・ポジショニングピロー・サポートウェッジ

### 取扱説明書

本製品ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

#### 警告

1. 本製品を体位変換やポジショニング以外の目的で使用しないでください。本取扱説明書またはカタログ等で推奨する製品以外との併用やアクセサリの追加等を行わないでください。
2. 本製品に炎やたばこ、発熱電球等、熱源を近づけないでください。本製品はスウェーデンの耐火要件（EN 597-1, EN597-2）に適合していますが、熱源に触れると損傷する可能性があります。
3. ご使用の際は本製品を破損させないよう、ご注意ください。
4. 本製品のハイジーンカバーは防水透湿性です。被介助者が窒息しないよう、体位にご注意ください。なお、ハイジーンカバーの重ねがけは、蒸気を通さない可能性があるため、推奨しません。
5. 本製品のハイジーンカバーは汗を通さないため、長時間皮膚に接触した場合、皮膚が炎症を起こす可能性があります。ハイジーンカバーを皮膚に直接当てることは避け、直接当たる場合は別売りのコットンカバーをご使用ください。

#### 1.本製品の特徴

本製品は、体位変換やポジショニングを目的としてデザインされたピロー（クッション型およびロール型）またはウェッジ（くさび型）です。

#### 2.使用方法

目的とする姿勢に合わせ、ピローやウェッジを選択してください。本製品を使用した場合でも、定期的に被介助者の体位を変換することを推奨します。ポジショニングを決める際は、被介助者にその姿勢が快適か、毎回確認してください。被介助者の健康状態や診断結果、周囲状況等から適切なポジショニングを総合的に判断し、適切な間隔でポジショニングの変換を実施してください。

**ピロー（クッション型およびロール型）**：様々な形状があります。被介助者の状態に合わせてお選びください。

**ウェッジ（くさび型）**： マットレスの厚みが15cm以下の場合、マットレスの下に置くこともできます。また、マットレスの上にオーバーレイマットレスがある場合は、マットレスとオーバーレイマットレスの間に挟むことができます。エアマットレスの場合は、シートとエアマットレスの間に挟むことができます。

#### 3.洗浄方法

使用後は、次の被介助者に使用する前に清拭や洗濯を行ってください。

##### 重要：

清拭や洗濯後は必ずピロー本体やカバー（ハイジーンカバーまたはコットンカバー）の状態を確認してください。損傷している場合は交換が必要です。



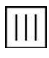



COPY

### 3.1 ハイジーンカバー

ハイジーンカバーはアルコール(界面活性剤入りを含む)、イソプロパノール(イソプロピルアルコール)70%、酸素系洗浄剤または塩素系洗浄剤(塩素濃度1%未満)等の中性洗浄液または消毒剤で清拭することができます。塩素系漂白剤は本製品の表面加工を傷める可能性があるため、出来る限り使用を避け、使用する場合でも1%未満の濃度でご使用ください。使用する洗浄液または消毒剤に記載されている使用方法に従い汚れた部分を清拭してください。

ハイジーンカバーを洗濯する場合は表1に従い洗濯してください。ハイジーンカバーに排泄物や血液が付着した場合は、付着後すぐに水で落としてから洗濯してください。複数のカバーを重ねづけしている場合は、1つずつに分け、同系色ごとに洗濯してください。

表1 ハイジーンカバーの洗濯記号

					
液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度1%まで

### 3.2.コットンカバー（別売り）

コットンカバーを洗濯する場合は、表2に従い洗濯してください。

表2 コットンカバーの洗濯記号

				
液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる	ドライクリーニング禁止

### 3.3.ピロー本体

カバーを装着しているため、原則洗浄は必要ありませんが、何らかの理由で汚れた場合は、洗濯機（液温95℃まで）で洗濯可能です。乾燥機で乾燥させる場合は100℃以下で行い、必要以上に乾燥させないように、乾いたらすぐに乾燥機を止めるようご注意ください。より早く乾燥させる場合は、3、4回脱水してください。

### 3.4.ウェッジ本体

カバーを装着しているため、原則清拭は必要ありません。なお、ウェッジ本体は洗濯できません。

## 4.保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管してください。

## 5.保証期間

本製品の保証期間は、購入日より1年です。製品取扱時に発生した汚れや破損に関しては保証されません。推定耐用期間は2年間です。

発売元



大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
<http://www.sheen-man.co.jp>  
 TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114

輸入元

**スーガン株式会社**  
 大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044

外国製造所: Care of Sweden AB