

サイドサポートクッション fit
SS-3/SS-4/SSP

特徴

- サイドサポートクッションフィットは、車椅子にセットする事で横倒れを防ぎ、強いサポート力で姿勢を保ちます。
- 骨盤パッド（SSP）をサイドサポートクッションフィットの反対側の足の隙間に挟む事で、姿勢の保持力をアップ出来ます。

仕様

〈サイズ〉

- ◆SS-3 横幅140mm×幅100mm×高さ330mm
- ◆SS-4 横幅140mm×幅100mm×高さ380mm
- ◆SSP 横幅500mm×幅20mm×高さ150mm（骨盤パッド）

製品概要



サイドサポートクッション fit



骨盤パッド

保証期間

※ご購入日より1年間です 年 月 日

※取扱説明書は保証書となりますので、大切に保管してください。

使用方法



- サイドサポートクッションフィットを車椅子のひじ置きに載せて下さい。ベルトでひじ置きに固定する事も出来ます。



- 骨盤パッドを使用する場合は、サイドサポートクッションフィットの反対側の足の隙間に挟んで下さい。
- サイドサポートクッションのカバーを交換する場合は、側面のファスナーを開いて内部のウレタンと心材を入れ替えて下さい。

【使用上の注意】

- ☆ひじ置きの無い椅子ではご利用出来ませんので、ご注意下さい。
- ☆脇サポート以外でのご利用はお控え下さい。
- ☆温度差の激しい場所には置かないで下さい。
- ☆汚れた場合は湿らせた布で拭き取って下さい。



株式会社ウェルパートナーズ

〒700-0923 岡山県岡山市北区大元駅前6-21

TEL 086-227-0131 FAX 086-227-6132