

A6(105×148mm)

COMO

クッション付き外反母趾サポーター 2個組

特徴

- 曲がった足指を優しくサポート！
- 親指と人差し指の間のクッションが、指と指を離す役割をしてくれるから、履くだけで指の方向を整えてくれる。
- 装着しながらストッキングや靴下を履いても◎
- 左右兼用・男女兼用タイプ。

- 材質 / ナイロン、ポリウレタン、TPR（熱可塑性エラストマー）
- サイズ / 約 10×9×1.5cm
- セット内容 / 2個
- 適応サイズ / 約 22～27cm

NY-0390260
Foot Supporter 2pcs/set



発売元
コモライフ株式会社
お客様相談室 0120-561-244
土日除く 平日9時～12時と13時～17時
<http://www.comolife.co.jp/>

MADE IN CHINA



▲ 注意


- 治療が必要となるような重度の外反母趾の方はご使用いただけません。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し医師に相談すること。

(使用上の注意)

- 本製品は医療用具・または病氣治療用具ではありません。●素材の性質上、素材臭を感じる場合があります。●着脱の際などは、本製品を引っ張りすぎたり、鋭利なもので傷をつけないようにしてください。(変形や破損の原因となります)
- 使い始めは数十分程度から、慣れれば徐々に時間を延ばして使用してください。●装着感には個人差があります。足、指に合わないと感じた場合や、痛みを感じた場合はすぐに使用を中止してください。●使用箇所に傷などがある場合は使用しないでください。●装着したまま靴を履かれる場合は、幅の広い靴を履くことをお勧めします。また歩行中に痛みなど違和感を感じた場合はすぐに外してください。●火気に近づけないでください。●直射日光を避け、風通しのよい所に保管してください。●小さなお子様の手が届かないところに保管してください。●用途以外に使用しないでください。

使用方法

- 下記のイラストのように、クッションが付いている穴に親指を挿入し、しっかりフィットするように本製品を装着します。

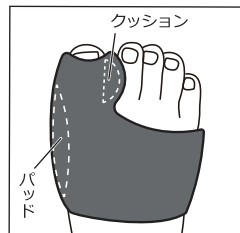

※使い始めは数十分程度から、慣れれば徐々に時間を延ばして使用してください。

(お手入れ方法)

- 使用後は、クッション部分が傷まないようやさしく手洗いし、よく乾燥させてから使用・保管してください。(洗濯の[手洗いコース]での洗濯はお控えください)
- 塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- 形を整えて陰干ししてください。

[洗濯表示]

