

しっかり骨盤支える生ゴムベルト M~L

製品特長

生ゴムが身体のラインに
ぴったりフィット

着脱が簡単な面
ファスナー仕様。
着脱面を小さめに
設計しているので
面ファスナーが肌
にあたりにくいです。

通気性の良い空気穴


お腹にあたる部分は幅約
8.5cmで、座る、しゃがむ
などの動作を妨げにくい
設計です。

両端は丸型で
面ファスナーが
外れにくいです。

弾力性に優れた生ゴムに面ファスナーを使用し、ワンタッチで着脱できるベルトです。

- 腰の保護やサポートに。
- 荷物などを運ぶ時に。
- 骨盤を引き締めたい方に。
- 長時間の運転に。

着用方法

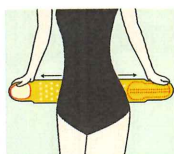

● ベルトを骨盤に合わせ
左右平行に伸ばします。



● ベルトを骨盤部分に合
わせて締めます。



● 身体ラインに合わせ
てベルトを整えます。




270mm

ご使用上の注意

●肌着の上から装着してください。●就寝時は使用しないでください。●アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方のご使用はお避けください。●使用中に不快な症状を感じた時は、直ちに使用を中止してください。●初めての方は2時間程度ご使用され、徐々に時間を延長してください。●本品は生ゴム特有の匂いが致します。ご使用に伴い、匂いは薄れますが完全に匂いがなくなる事はございませんのであらかじめご了承ください。●本品は素材の特性上、擦れや摩擦などにより製品が白くなることがあります。また、天然ゴム特有の色のぼらつきやムラ、一部に不純物が混じることがあります。製造工程で取り除くことができないものであり、製品の品質に問題はございません。


ゴムと面ファスナーを持って
外してください。

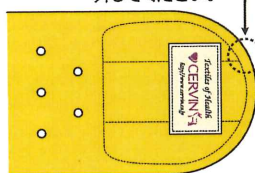

◆ ゴム本体のみをお持ちになっての
無理な着脱はお避け下さい。

生ゴムならではの弾力性・伸縮性で骨盤をしっかりサポート


サイズ目安

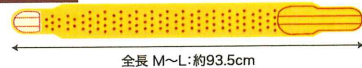

全長 M~L: 約93.5cm



最小(周囲)
M~L: 約69cm

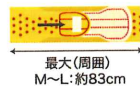

最大(周囲)
M~L: 約83cm

※上記サイズはあくまでも製品を置いた状態での寸法です。着用の際は生ゴムが伸縮します。

品質/ゴム
サイズ/ M~L ヒップ 87~100cm
生産国/中国
046802002



洗わないでください。面ファスナーは閉じたまま洗ってください。

企画・発売元
株式会社 セルヴァン
〒611-0033
京都府宇治市大久保町西ノ端1番32
TEL(0774)46-5717(代)
http://www.cervin.co.jp



紙
中入れ



パッケージ

