

**✿使っていいね!**

## 吸い口付やわらかボトル 200 ストロー付やわらかボトル 200

### <取扱説明書>

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

### 用途

- <吸い口付やわらかボトル>
- 吸う力の弱い方への食事補助として使用するものです。
- <ストロー付やわらかボトル>
- 吸う力の弱い方への水分補給補助として使用するものです。

### 特長

- ボトルを押すことで内容物を押し出せます。
- ボトル開口部が広く、内容物が入れやすいです。
- なだらかなボトル形状で洗いです。
- 飲み口がやわらかく、口当たりがやさしいです。

### 使用する前に

- 初めて使用する前に必ず洗浄してください。

### 使用上の注意

- 記号の説明  
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

**警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

### 警告

- 用途以外に使用しないでください。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物を入れると噴き出してヤケドをするおそれがあります。

### 注意

- 安全のため、破損や著しく変形したものは使用しないでください。使用のたびに亀裂やキズ、破損などがなければ確認してください。
- 本品は完全密閉ではありません。飲み物が入った状態で倒れたり、振ったりすると飲み物が漏れることがあります。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、使用する前にしっかりと締まっているか確認してください。
- 強い衝撃や気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると、飲み物が噴出することがあります。
- ドライアイスや炭酸飲料を入れないでください。飲み物や炭酸ガスが噴出することがあります。
- 液漏れすることがありますので、飲み物を入れて振り回したり、バッグなどに入れて携帯したりしないでください。
- 飲み物を入れ、暖房機の周辺や、直射日光の当たるところに放置すると、飲み口から飲み物が噴出することがあります。
- 吸い口付やわらかボトルは飲み口を深くかむと、フタ部分から漏れることがあります。

### 重要

- 火のそばに置かないでください。食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。変形したり溶けたりすることがあります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などの場合、本体などに色がつくことがありますので、使用後はすみやかに洗浄してください。ただし、色がついても衛生上は問題ありません。
- 使用後は十分洗浄し、よく水を切ってから風通しの良いところで保管してください。

### 【嚙下(えんげ)障害のある方に使用する際の注意】

- 誤嚥防止のため、片麻痺のある方が側臥位の姿勢をとる場合は健側(障害を受けていない側)を下にしてください。
- 飲食物の温度に注意し、少しずつゆっくりと摂取させてください。
- 食事中、介助者は側を離れないでください。
- 意識障害のある場合、専門家の指示を受けてください。

### 【シリコンゴム製パーツの注意】

- 使用する前に、破れや異常がないことを確認してください。
- 古くなり劣化すると、弾力性を失い、破れやすくなります。
- 強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。
- 破損や劣化がみられる場合は使用を中止し、新しい部品とお取り替えください。飲み物が漏れることがあります。より衛生的にお使いいただくためにも、早めに取り替えてください。

### お手入れ方法

- 洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
- 使用後はお手入れ方法にしたがって十分洗浄し、よく水を切って乾かしてから保管してください。
- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- 洗浄の際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。そして洗剤が残らないよう十分すすいでください。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 煮沸消毒の際はヤケドなどに十分に注意してください。大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3～5分を限度としてください。鍋肌に触れると変形する場合がありますのでご注意ください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。なお、漂白するときには台所用漂白剤を指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白後は、流水で漂白剤をきれいに洗い流してください。食べ物に臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒の際は各消毒液の使用方法にしたがってください。
- 電子レンジによる蒸気消毒の際は各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。本品のみを電子レンジに入れても消毒できません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp


Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA

2108




## 組立方法

### <吸い口付やわらかボトル>

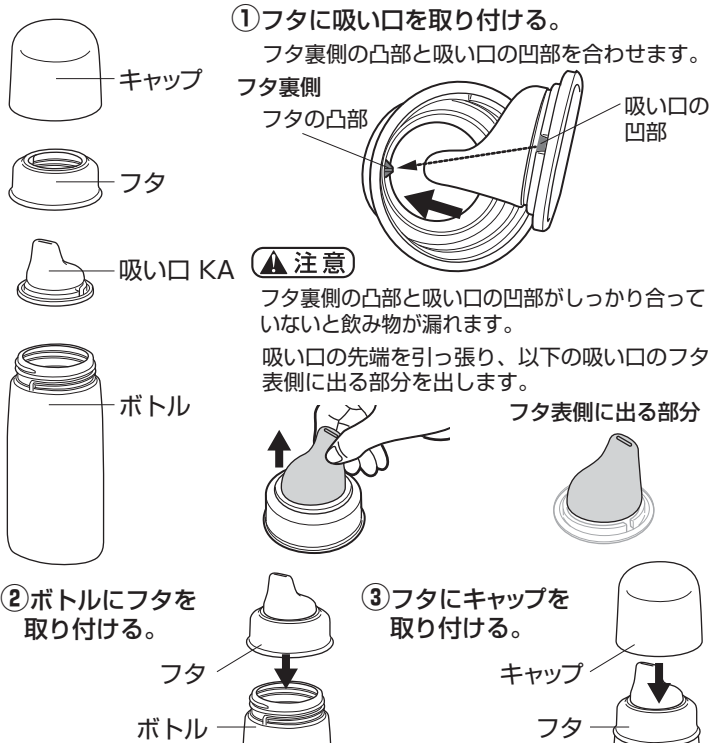

### <ストロー付やわらかボトル>

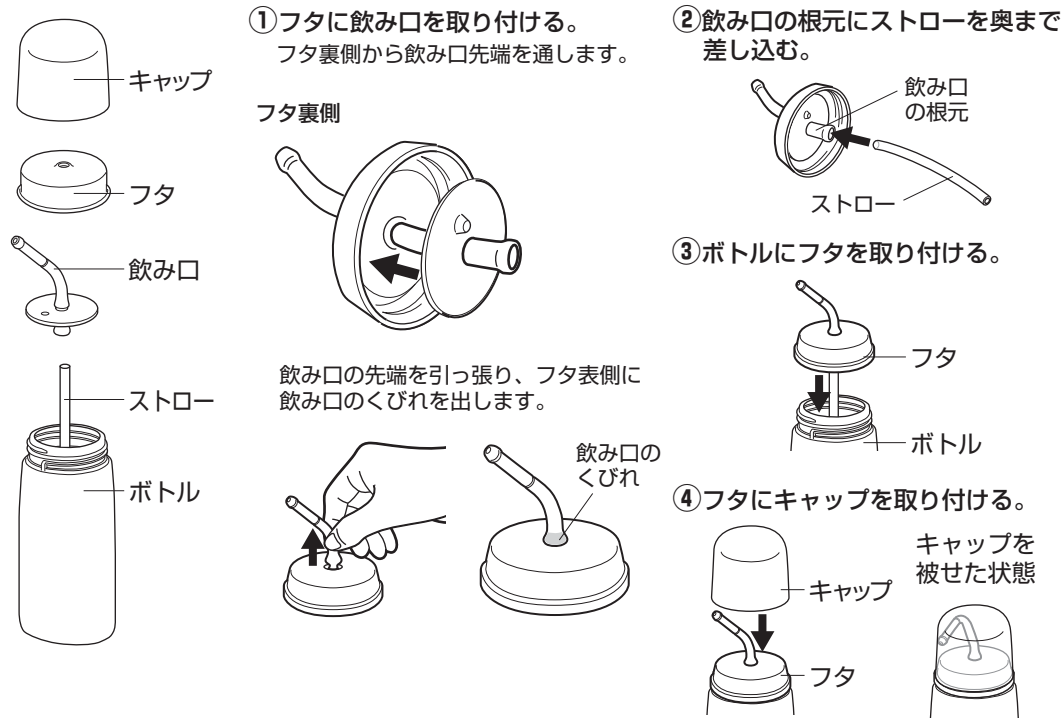

## 使用方法

内容物が入った状態でボトルを押すと、吸い口や飲み口先端から内容物が出ます。

### <吸い口付やわらかボトル>

吸う力の弱い方への食事補助としてお使いください。




### <ストロー付やわらかボトル>

吸う力の弱い方への水分補給補助としてお使いください。



## 別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。

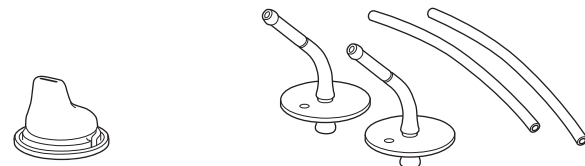

JANコード：4945680 - 400527 JANコード：4945680 - 400510  
商品名：吸い口 KA 商品名：ストローセット KA

## 仕様

### <対応表>

○：できる ×：できない -：該当しない

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
<b>吸い口付やわらかボトル</b>		ボトル容量 270mL		最大目盛り 200mL				
キャップ・フタ	ポリピロピレン	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
吸い口	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
ボトル	ポリプロピレン	110℃	-20℃	×	○	○	○	○
<b>ストロー付やわらかボトル</b>		ボトル容量 270mL		最大目盛り 200mL				
キャップ・フタ	ポリピロピレン	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
飲み口・ストロー	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	○	○	○	○
ボトル	ポリピロピレン	110℃	-20℃	×	○	○	○	○

※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。