

NafiaS[®] - N95

Fitting instructions

<http://www.nafias.jp>

装着方法

NafiaS-N95マスクの装着方法を説明します。1-7の順に沿ってマスクを正しく装着してください。

装着後はマスクが顔にしっかりと密着していることを確認してください。また、定期的にフィットテストを実施してください。



1 マスクを袋から取り出します。ロゴ印字面を下にし、ノーズクランプ側が上になるようにマスクを持ち、上下にしっかりと開きます。



2 2本のゴムを取り出します。この時、ノーズクランプを鼻に合うよう軽く曲げます。



3 マスク本体を鼻の位置で抑えながら、取り出したゴムを1本ずつ頭にかけていきます。



4 まず、マスク下側のゴムを頭頂部にかかけます。



5 次に、マスク上側のゴムを首元にかかけます。それぞれのゴムが耳にかかっていないことを確認してください。



6 隙間ができないようにしっかりとノーズクランプを顔に合わせ、鼻に沿うよう軽く押さえます。最後にマスク下側が顎を覆うように調整します。



7 マスクが密着していることを改めて確認し、装着完了です。