

## seca206 壁掛け式簡易身長計 取扱説明書

### ご購入ありがとうございます

小児及び成人のための操作の簡単な、壁掛け式簡易身長計 seca206 をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本身長計は、ご使用の場所を選ばない、省スペースの身長計です。

### 安全にご使用いただくために

本身長計をご使用になる前に、以下の注意事項を必ずお読み下さい。

- ・ 付属の取付け部品をお使い下さい。
- ・ 測定後は、測定部のヘッド部分を上方にスライドさせて、負傷の原因等にならないようにして下さい。

### 取付け方

1. seca206 を取付けたい壁の真下の床面に、表示部を前に向けておいてください。
2. ヘッド部分を床面につけたまま、表示部の赤線がセロ値と重なるまで、メジャーを上方に引っ張ってください。その位置に達したら、穴を開ける為に、本体後ろのネジ穴の位置にしるしをつけてください。
3. 付属のネジでメジャーの本体を 2 で付けた印にあわせて固定してください。
4. seca206 のヘッド部分を上方にスライドさせてもとの状態(本体にヘッド部分がはまっている状態)にもどしてください。

### 測定方法

1. 被測定者は seca206 の下に壁を背に立ってください。
2. ヘッド部が被測定者の頭に載るまで引き下げてください。
3. 表示部に測定値が表示されます。  
赤線上の数値を読み取ってください。

### 技術データ

測定範囲: 0～220cm  
目盛単位: 1mm  
製品寸法(WxHxD): 35 x 115 x 150mm  
本体重量: 約 140g  
EC 医療機器基準 93/42 認定商品

### クリーニング

市販の住居用洗剤または、消毒剤で拭いてください。それぞれの洗剤のメーカーの注意事項を守ってご使用下さい。

### 廃棄処分

使用されなくなった身長計は、管轄の公共自治体のごみ処理担当部門より適切な廃棄方法についての指示を受けてください。

### 品質保証

本製品は購入日より 1 年間の保証期間が適用されます。尚、保証期間内に無償修理等が行われても保証期間が延長されることはありません。

保証期間内につきましては該当製品をお預かりし、弊社にて製品の初期不良もしくは欠陥であることが確認された場合に無償で交換及び修理を行います。

但し、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても保証対象外となり修理に関する費用の全額もしくは一部をお客様にてご負担いただく場合がございますので、予めご了承下さい。

- ・ 領収証をご提示いただけない場合
- ・ 海外でご購入になられた場合(有償修理で承ります)
- ・ 落下等の衝撃など、故障原因がお客様の責による場合
- ・ 誤った使用をなされた場合

**seca 株式会社**

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町 94

電話: 043-216-0850(代)

FAX: 043-216-0851

