

seca210 乳児用身長計マット

ご購入ありがとうございます

この度は乳幼児身長計マット seca210 をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本製品は小児科などの病院での診察や、助産婦や小児科の往診などでの使用を目的に作られた製品です。

本測定マットは巻き広げが可能で、場所をとらず、上部に穴があるので壁にかけておくことも可能です。

安全にご使用いただくために


本製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項を必ずお読み下さい。

- ・ 乳幼児を測定マットの上に寝かせたまま目を放さないで下さい。
- ・ 身長測定は、広く平らな、乳幼児が落下する危険性のないところで行ってください。
- ・ 感染性の病気の伝染を避けるために、本品は定期的に消毒するようにしてください。
- ・ 身長測定のための厳密な測定のためには、二人の測定者が補佐することが理想的です。

操作方法

測定の手順

1. 乳幼児を測定マットの上に寝かせてください。
乳幼児の頭を測定マットの頭部ストッパー(1)に合わせてください。
2. 乳幼児の足の方向へ足部ストッパー(2)を右手で引いてください。
3. 左手で乳児のひざを足が伸びるようにマットに慎重に軽く押さえてください。
4. 右手で足部ストッパー(2)を乳児の足の裏に直角に合わせてください。
5. 測定マットの目盛を読み取ってください。(3)

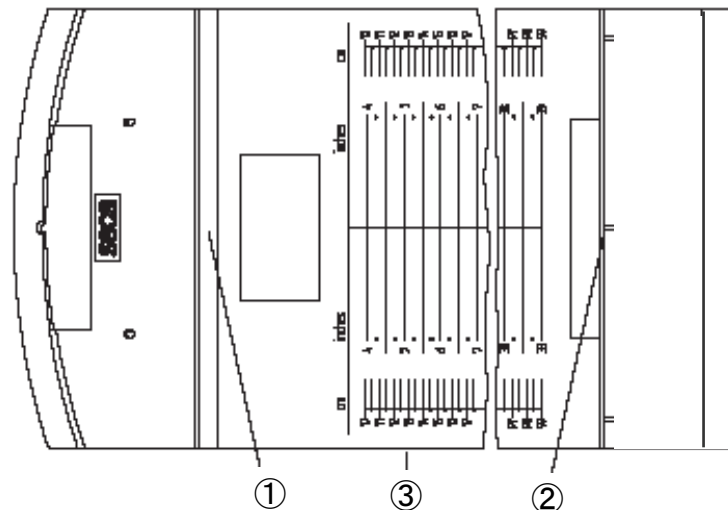

クリーニング

市販の住居用洗剤または、消毒剤で拭いてください。それぞれの洗剤のメーカーの注意事項を守ってご使用下さい。

廃棄処分

使用されなくなった身長計は、管轄の公共自治体のゴミ処理担当部門より適切な廃棄方法についての指示を受けてください。

技術データ

測定範囲: 100~990mm
目盛単位: 5mm
製品寸法(WxHxD): 300x140x1340mm
本体重量: 約 500g
EC 医療機器基準 93/42 認定商品

品質保証

本製品は購入日より1年間の保証期間が適用されます。

尚、保証期間内に無償修理等が行われても保証期間が延長されることはありません。

保証期間内につきましては該当製品をお預かりし、弊社にて製品の初期不良もしくは欠陥であることが確認された場合に無償で交換及び修理を行います。

但し、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間内にあっても保証対象外となり修理に関する費用の全額もしくは一部をお客様にてご負担いただく場合がございますので、予めご了承下さい。

- ・ 領収証をご提示いただけない場合
- ・ 海外でご購入になられた場合(有償修理で承ります)
- ・ 落下等の衝撃など、故障原因がお客様の責による場合
- ・ 誤った使用をなされた場合

seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町 94

電話 043(216)0850(代)

FAX 043(216)0851