

seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町 94-2

電話:043-216-0850 (代表)

ファックス:043-216-0851

seca corporation

94-2 Sankakucho, Hanamigawaku

Chiba City, Chiba 262-0011, Japan

Tel: +81(0)43-216-0850

Fax: +81(0)43-216-8051

seca 228



seca 228


[ご使用の前に]

- △ 製品の安全確認をしてから、ご使用ください
- △ ご使用の前に必ずこの説明書をお読みの上、正しくお使いください


[各部名称]

- 1. 主柱
- 2. 台(支柱取付ネジx3本セット済)
- 3. カーソル(遊標)
- 4. 付属:専用レンチ


[組み立て]

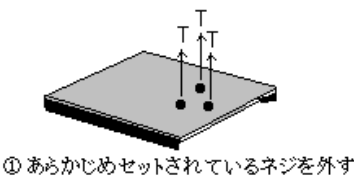

① あらかじめセットされているネジを外す

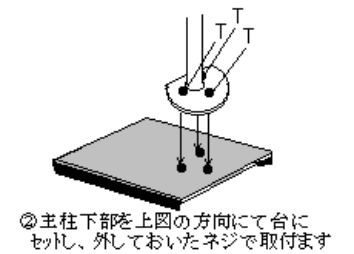

② 主柱下部を上図の方向にて台にセットし、外しておいたネジで取付ます

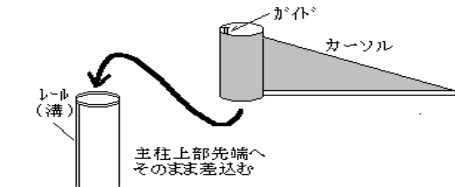

- 1. 専用レンチであらかじめ台にセットされているネジ3本を外す。

- 2. 左の図のように台と主柱を取り付けます。


- 3. 主柱の上部先端よりそのままカーソルを差し込んでください。

※ カーソルの方向に注意！！

主柱後方の溝側にカーソル後方のガイドをはめて垂直に差し込んでください。

△ カーソルを不適正な位置(真横等)に向けて主柱に差し込みますと形状上、落下し危険ですのでおやめください


* 伸縮式 DX(HA/HD)のみ

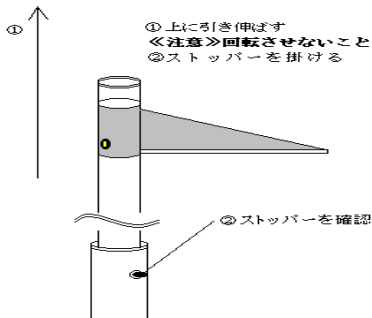

- 4. カーソル移動時は先端を持たずに後方を掴むようにし、ゆっくりと上下させてください。

- 5. 伸縮式 DX(HA/HD)は二段伸縮タイプですので、中主柱(上部主柱)を上にも伸ばし、ストッパーがかかった状態を確認してからご使用ください。
△ 《注意》ポールは回転させずに真直ぐ垂直に引き上げてセットしてください!!(破損の原因になります)

[測定方法]

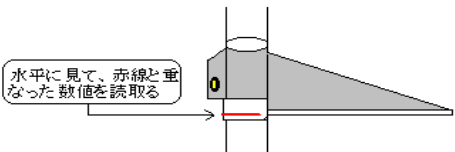

- 1. あらかじめカーソルを上方へ移動させます。
- 2. 主柱を背に背筋を伸ばし真っ直ぐ立ち顎を引きます。(両足のカカトは上げない)
- 3. 静かにカーソルを降ろし被験者の頭にのせます。
- 4. 左の図のように、水平に見て赤線と重なった数値を読み取ります。

[使用上の注意]

- △ ケガをする恐れがありますので、本製品に飛び乗ったり寄りかかったりしないでください。
- △ 転倒する恐れがありますので、必ず平らな場所に設置し、各部取り付けも確実にこなしてください。
- △ 故障の原因となりますので、移動の際に振り回したり落としたりぶつけたりはしないでください。
- △ 使用後、汚れた場合はベンジン、シンナー等は使わずに乾拭き(又は薄めた中性洗剤を使用)してください。
- △ 分解および改造行為は絶対におやめください。＊保証対象外および修理不能の恐れがあります。
- △ 合板床材、塩ビ床材等に設置しないで下さい(台部脚はゴム製品の為色移行する可能性があります)。

[アフターサービスについて]

- 1. 修理、その他お問い合わせは本製品をお買い求め頂いた販売店にご連絡ください。
- 2. 本製品を正常にご使用頂いた上での保証期間はご購入後1年間となります。