


取扱説明書

この度はアナログフラットスケール seca760 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本品をご使用になる前に、必ず本取扱説明書をよくお読みください。

ご使用前に

- ☆下図で示された運搬時保護材(赤色のプラスチック)を2個取り外します。
- ダイヤル上部にある四角の保護材はそのまま引っ張って取り外してください。
- 裏面(底面)にある丸いピンは軽く回しながら取り外してください。

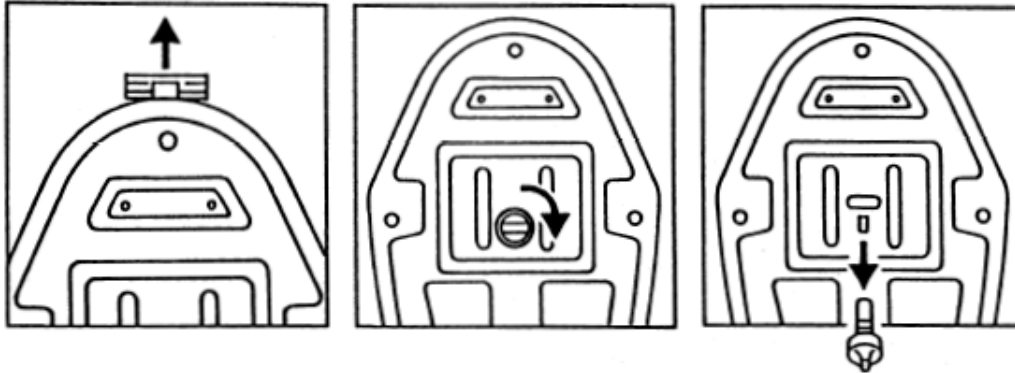

0点調整

目盛盤の下にあるダイヤル(0 調ダイヤル)を左右に回し、針を目盛の 0 に合わせてください。この時、0 調ダイヤルを回し過ぎないように気をつけてください。



取扱い注意事項

- I. 以下の場所においてのご使用はご遠慮ください。正しく測れません。
 - 床面が平らでない場所や凸凹のある場所
 - じゅうたんの上など、床面が堅くない場所
 - 湿気の多い場所や温度差の激しい場所
- II. 最初、0 調ダイヤルが固い場合がありますが、強く回せば動きます。
- III. 測定の際にはなるべく測定台の中央に乗ってください。正確な数値が出ない場合があります。
- IV. 体重測定後、針が 0 に戻らない時には、測定台の四隅を軽くたたいてみてください。
- V. 保管時は製品を立てかけないで下さい。精度に誤差が生じる原因となります。

おことわり

輸送中精度の狂いを防ぐため、梱包材が少々きつくなっており、商品開封時に本品の測定台のラバー部分に多少のへこみが生じてしまいますが自然に復元いたしますのでご了承ください。