

# 車いす腕らくベルト 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様が安全に、そして快適にご使用いただくために、注意事項・お手入れの仕方・正しいご使用方法を記載しました。ご使用前に、必ず本説明書をお読み下さい。  
また、お読みになられた後も大切に保管して下さい。


製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承下さい。  
取扱説明書や製品に関するご質問は、下記までお問い合わせ下さい。

## ■ 安全上のご注意

- 本製品を普通型の車椅子以外(リクライニング車椅子等)で使用しないで下さい。
- 本製品は、看護者・介護者の目の届く範囲でご使用ください。
- 本製品は使用方法が不適切な場合において、生命や身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師や専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- 本製品の加工、改造、修理は行わないで下さい。製品の機能低下をまねき、事故の原因となります。
- かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れなど皮膚に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、医療機関に相談し指示に従って下さい。
- サイズの合わない場合、無理な着用は控えてください。  
破損や変形するおそれがございます。
- 汚れた状態で放置すると、匂いや染みの原因となります。  
お早目にお手入れをして下さい。
- 本製品が破損したり、破れやほつれのある場合はすぐに使用をお止め下さい。

## ■ 各部の名称・装着方法

(21.07\_01)

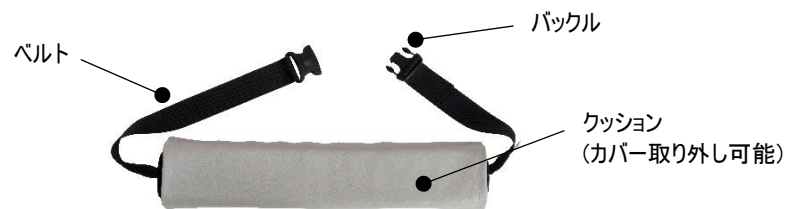

※車椅子は付属しません。

- 1 車椅子に座り、腹部にクッションがくるように位置を調整します。  
(片マヒの方など、位置は使う方によって調整して下さい)
- 2 ベルトを車椅子の後ろに回し、バックルを留めます。

## ■ お手入れ方法

- 本体の汚れは、よく薄めた中性洗剤を布等に湿らせて拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- 本製品を洗うことはできません。
- 本製品は耐薬品加工の素材のためアルコール消毒が可能ですが、長期に渡って毎日アルコール消毒を行うと、硬化・劣化の原因となります。
- 基本的な消毒は、濃度1%未満の次亜塩素酸ナトリウム水溶液のご使用をおすすめします。

## ■ 仕様

《商品名》車いす腕らくベルト 《品番》4018

《サイズ》商品全長:120cm~150cm(調節可能)

クッション:長さ55cm×奥行10cm×高さ10cm

ベルト:幅5cm

《適応サイズ》ウエスト70-90cm

《素材》カバー:ポリ塩化ビニル100%(耐薬品性)

クッション:[表地]ポリエステル100% [中材] 低反発ウレタン

ベルト:ポリエステル100% バックル:ポリアセタール

### 製造元・お問合せ先



株式会社 特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒14条14丁目2-40

TEL:011-663-0761 FAX:011-663-0955

メール:shop-info@tomoni.co.jp