

ふぉーむ Pro

取扱説明書

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

※本品は医療機器ではありません。

製品概要

- 本品は、防水性のポリウレタン外層と、シリコン粘着層、その間のやわらかい吸収パッド、不織布などからなる滅菌済の5層構造の皮膚保護パッドです。
- 本品は健常皮膚を保護する目的で使用します。
- 形状は四角形タイプ、かかと部用、仙骨部用の3種類があります。かかと部用・仙骨部用は、かかと・仙骨への貼付に適した形状になっておりますが、他の部位にもご使用いただけます。



四角形タイプ



かかと部用



仙骨部用

使用上のご注意

- 本品は使い捨てのため、再使用しないでください。
- 本品は皮膚の保護を目的とした製品です。創傷には使用しないでください。
- 本品または本品の構成成分に対して過敏な人またはアレルギー反応を有する人に、本品を使用しないでください。
- 本品を過酸化水素液や次亜塩素酸塩溶液などの酸化剤と一緒に使用しないでください。
- 本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、必要に応じ医師に相談してください。
- 本品の同一品の使用は7日間を限度として交換してください。
- 皮膚保護のために、施設のプロトコールに従い、必要に応じて体位変換やスキンケアの実施、適切な体圧分散器具の併用を行ってください。

製品の規格

粘着式	全体サイズ	パッド部分	包装	注文番号
四角形タイプ	8×8cm	5×5cm	10枚/箱	03100
	10×10cm	6.5×6.5cm	10枚/箱	03101
	15×15cm	11×11cm	10枚/箱	03102
かかと部用	19.8×14cm	14×8.7cm	10枚/箱	03103
仙骨部用	20×16.9cm	11.4×13.5cm	5枚/箱	03104
仙骨部用(大)	24×21.5cm	16.4×13.8cm	5枚/箱	03105

保管方法

- 直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

使用方法

- 保護する部位のアセスメントを行います。
- 保護したい部位より大きめのサイズを選択してください。
- 貼付前に保護する部位を適切に洗浄し、周囲皮膚を十分に乾かしてください。


四角形タイプ

個装から本品を取り出し、剥離紙をはがします。
保護パッドの中心を保護したい部位の中心に合わせ、端部がしわにならないように本品を皮膚に密着させてください。




かかと部用

個装から本品を取り出し、剥離紙をはがします。
保護パッドの〈①凹カーブ側〉を足首・かかと後部に固定します。続いて〈②丸カーブ側〉の保護パッドを足底側から折り込んで、しっかりと固定します。

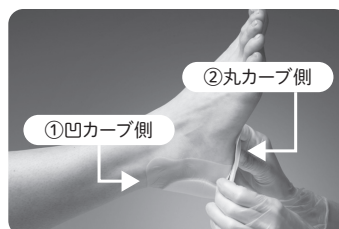

仙骨部用

個装から本品を取り出します。
中央の剥離紙をはがして、保護パッドを半分に折り曲げて臀裂部に差し込むようにした後、左右の剥離紙をはがします。端部がしわにならないように皮膚に本品を密着させてください。

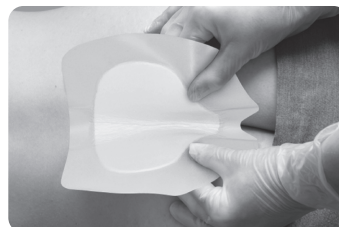

®はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2022 ConvaTec Inc.