



～マツヨシ ナースウォッチΦ38mm取扱説明書～

※主な材質： 本体:亜鉛合金 / レンズ部:ミネラルガラス
ベルト部:ポリウレタン / カラビナ部:アルミ

※ 時刻の合わせ方



① リューズに挟んでいるストッパーを外して下さい(ストッパーはリューズが作動しないよう、固定するためのものです)。



② 秒針が12時の位置に来たタイミングでリューズを引き出します。(リューズを引くと、秒針は止まります)


③ リューズを回して時間を合わせます。分針を合わせる時刻より数分進めた後、逆に回して正しい時刻に合わせます。

④ 時刻を合わせた後、リューズを押し込めて下さい。

※ 脈の測り方

- ① 秒針が12時もしくは、6時の位置にきた時に脈拍を測り始めます。
- ② 脈拍が20回目を打ったときに、秒針が指している脈拍メモリの数字を読み取ります。

12時から始めた場合

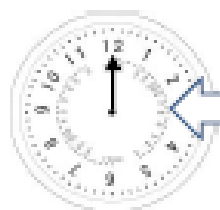

秒針が12時か6時の位置を通過した時点から、脈拍数のカウントを始めます。

20回目脈拍数をカウントして、この時の秒針が指した脈拍メモリの数値が1分間の脈拍数になります。

◆ 文字盤は蓄光するので、夜間でも文字盤を見ることができます。

※使用上のご注意

● 本製品は生活防水のため水のかかる程度の使用に限ります。水中での使用はできません● かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じることがあります。異常を感じたらただちに使用を中止して、すぐ医師に相談して下さい。● 床面に落としたり、強くぶつける等の激しいショックを与えない下さい。● 当商品は乳幼児の手の届かない場所で保管してください。誤飲などの思わぬ事故やケガにつながります。

◆ 電池交換については時計店等の専門店にお持ちすることを推奨します。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>

MADE IN CHINA