


ツーピースブラ・レーシーの着け方


この度はツーピースブラ・レーシーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

より快適にお過ごしいただくために、この説明書は必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

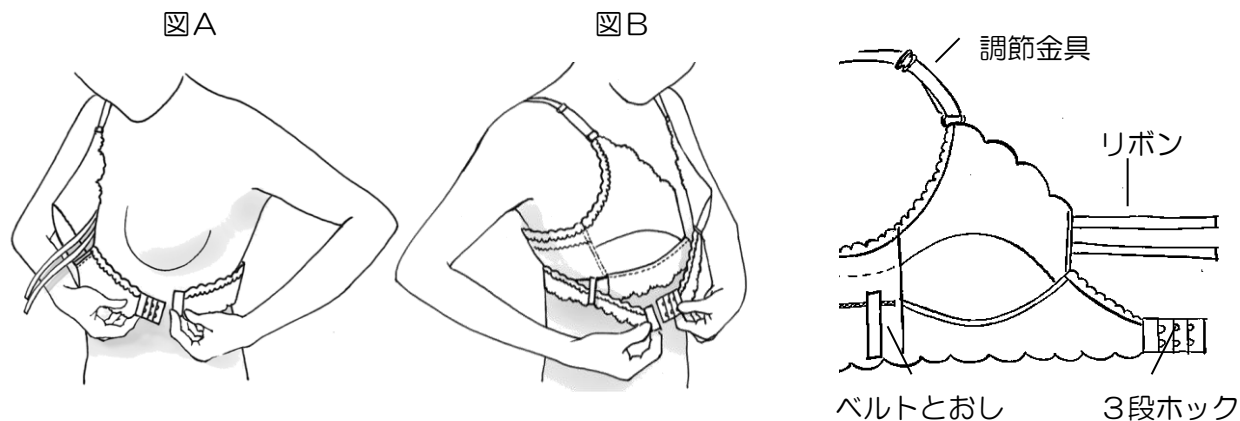

1. 別売りの手術側用パッド、マロン型パッドセット（左右1組）をご用意下さい。
ウレタンパッドを両側のカップにセットします。失った側には手術側用パッドをお入れ下さい。
2. 手術側のブラジャーから先に図Aのように着用します。ホックをやや斜め前（健側乳房の下）で留めます。
3. つぎに健側用のブラジャーを同様に着用します。先に着けた手術側用のベルト通しに健側アンダーを図Bのように通し、2枚がズレないように着用して下さい。
4. 肩ひもの長さを調整し、左右の胸の高さを合わせます。
5. 乳間のリボンを一段ずつ並行に左右すき間なく結んでください。
りぼんが不要な方は、ハサミでカットしてもご使用になれます。
6. アンダー・ワキ・背中などねじれがなく、左右対称に着用できていることを鏡の前でお確かめ下さい。

■手術側だけの着用方法（夏季、くつろぎタイム等）

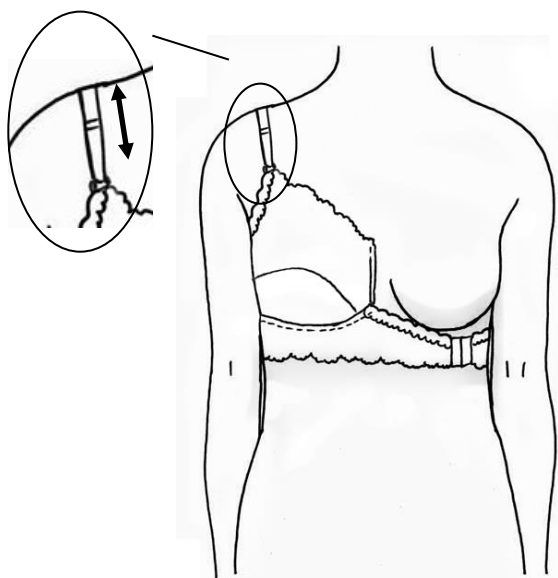

健側乳房に近い形をつくるために手術側ブラジャーの調整をします。

- ①肩ひもを健側乳房の位置まで下げます。
- ②ウレタンパッドを外し、マロン型パッドを健側に合った形に組み合わせてお入れ下さい。

株式会社 ブライトアイズ
Tel : 03-5933-3601
e-mail: info@be-japan.com