

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

ATEX LOURDES

EMSベルトネクサ

品番 AX-FR921



このたびはAX-FR921をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

目次

- ⚠ 安全上のご注意 …………… 2～5
 - 🔍 梱包内容と各部の名称 …………… 6
 - 👤 使いかた …………… 7～11
 - 🧼 お手入れ・保管について …………… 12
 - ⚙ 故障かなと思ったら …………… 13～14
 - 🔧 仕様 …………… 15
 - ♡ 保証とアフターサービス …… 16～18
-

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。




禁止を促す
記号



強制を促す
記号

警告


症状について

 次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。

 安全上のご注意

 次のような人は必ず医師とご相談の上
ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期から出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人
- ・動脈リゅう(瘤)、静脈リゅう(瘤)のある人
- ・その他、医療機関で治療中の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。

治療器や美容機器、電気製品とは併用しないでください。

運動目的以外の使い方はしないでください。

故障を発見したり、身体に異常を感じた時は使用しないでください。

通電中、シート部に金属を接触させないでください。

事故やけがの原因になります。



1回の使用は1箇所10分以内とし、同一箇所への連続使用は避けてください。また、1日の使用時間は30分以内にして、体に異常を感じたら使用を中止してください。

長時間の連続使用は、けがや体調不良の原因になります。

充電池について



本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。

異常(故障)について

- ❗ 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。
- ⊘ シートの電極部に、キズや断線、破損がないか確認してください。破損等がある場合は使用しないでください。
けがの原因になります。

その他

- ⊘ 操作部に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
- ⊘ 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

ご使用について

- ⊘ 浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
高温下や火気の近くで使用、保管しないでください。
操作部に水などの液体をかけないでください。
操作部を曲げたり、落としたり、強いショックを与えないでください。
汗をかいたり、油分の残った肌には使用しないでください。
飲酒時、喫煙中、就寝時、入浴時には使用しないでください。
肌に強い痛みを感じたらすぐに使用を中止してください。
LEDランプの動作中に電球部を直視しないでください。

電源について



USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。

ケーブルに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因になります。

USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

USBケーブルが傷んだり充電口がゆるい時は使用しないでください。

感電やけがの原因になります。



USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

1ヶ月に一度は使用して、充電を行ってください。

長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。


🔍 梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください




- 本体
- USBケーブル
- アトマイザー

付属品

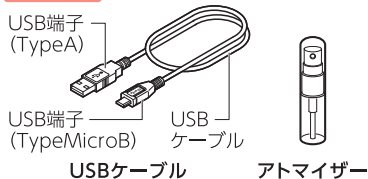

各部の名称

本体

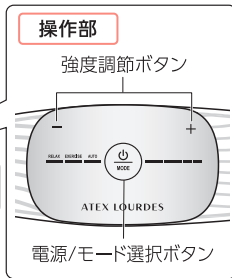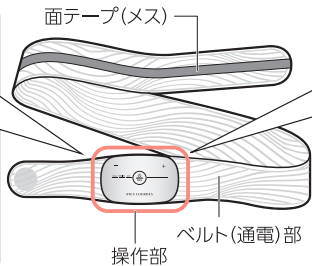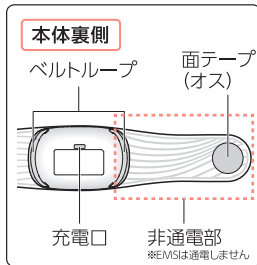

👤 使いかた

初めてご使用になる時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。また、月に1回は動作させて充電を行ってください。長期間充電しないでおくと、充電ができなくなることがあります。


ご使用前の準備 (充電する)

- 1 USBケーブルで本体と電源をつなぐ
USBケーブルの端子を電源のUSBポートと本体の充電口につなぎます。

●主な電源



市販の
ACアダプター

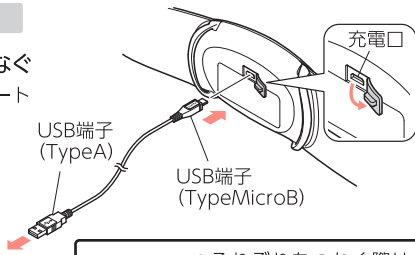

注意

- それぞれをつなぐ際は、真っ直ぐ根元まで確実に差し込んでください。


※定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用してください。

※使用する電源機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。

※USB電源出力が十分でない場合は充電ができない場合があります。その場合は他の機器をお試しください。

3 EMS強度を調節する

刺激が弱いと感じたら強度調節ボタン(+)を押して調節します。
6段階で調節が可能です。

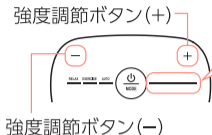

強度調節
ランプ



ボタンを押すごとにランプが1~6個点灯します。数が多いほどEMS強度は高くなります。



注意

- 初めてご使用される際はEMSは「弱」でご使用ください。慣れてきたら、お好みで徐々に強さを調節してください。
- 使用中にモード選択ランプと強度調節ランプが点滅を始めたら、充電電池の残量が少なくなっています。充電をしてください。
- 通電した状態で指をベルト(通電)部に触れないでください。非常に強い刺激が伝わります。
- 肌にEMSの強い痛みを感じた場合は使用を中止してください。

4 終了する

最初に電源/モード選択ボタンを押してから約5分で自動停止します。
任意の時間で停止したいときは、電源/モード選択ボタンを必要回数押し、停止してください。


●肌に通電しないまま約30秒経過すると自動停止します。

※使用後に汚れが気になる場合はベルト部を軽く湿らせ、乾いた布やティッシュなどで拭きとってください。

※ベルトを体から外す際は、必ず電源を切ってから行ってください。

2 充電開始

3つのモード選択ランプが点滅し、充電を開始します。

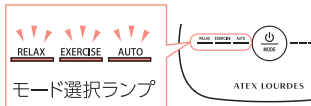

3 充電完了を確認

3つのモード選択ランプの点滅が消灯になると充電完了です。

- 電池残量がない状態から、フル充電まで約2.5時間かかります。
- 初めてご使用になる時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。


※極端な低・高温時は充電できないことがあります。

※充電中は使用できません。

ご使用前の準備

1 ベルトの内側をアトマイザーで湿らせる

付属のアトマイザーに水を入れ、本体操作部を下にして広げ、ベルト（通電部）の内側に4～5回吹きかけて湿らせてください。

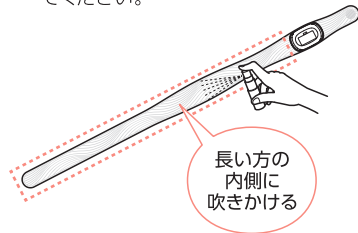


注意

- 操作部に水をかけないでください。
- ベルトを装着する前に電源を入れしないでください。

2

操作部が身体の前側に中央に来るようにベルトを体に巻き付けます。下図を参考に、素肌に密着するように調節してください。

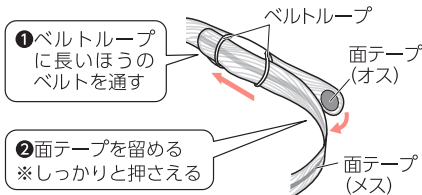


⚠️ 注意

- 実際のご使用時は素肌にベルトを当ててください。
(EMSは服の上からは通電しません)
- ベルト全面が肌に触れるようにしてください。


使用例



お腹まわりに

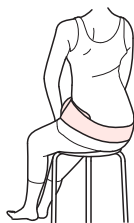

ヒップまわりに

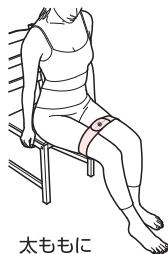


太ももに


エクササイズを開始する

1 電源/モード選択ボタン を押して電源を入れる

電源を入れるとRELAXモード・強度1でスタートします。

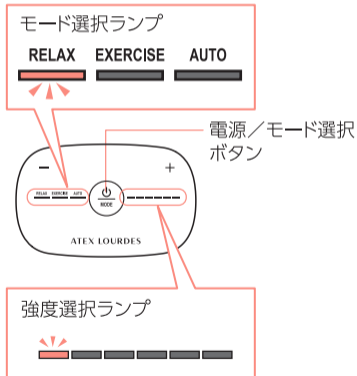

2 モードを選ぶ

電源/モード選択ボタン  を押して、お好みのモードを選びます。ボタンを押すごとに、モードが切り替わります。※モードを変更すごとに強度1の状態になります。

1 RELAX(リラククス)モード

中周波をメインにしたやさしい刺激のリラククスモード(5分間)

2 EXERCISE(エクササイズ)モード

低周波でしっかりとEMS刺激が伝わるエクササイズモード(5分間)


3 AUTO(オート)モード

ウォームアップからエクササイズ、クールダウンまでプログラムされた自動モード(5分間)

電源OFF

3 EMS強度を調節する

刺激が弱いと感じたら強度調節ボタン(+)を押して調節します。
6段階で調節が可能です。

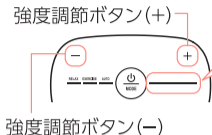

強度調節
ランプ



ボタンを押すごとにランプが1~6個点灯します。数が多いほどEMS強度は高くなります。

⚠️ 注意

- 初めてご使用される際はEMSは「弱」でご使用ください。慣れてきたら、お好みで徐々に強さを調節してください。
- 使用中にモード選択ランプと強度調節ランプが点滅を始めたら、充電電池の残量が少なくなっています。充電をしてください。
- 通電した状態で指をベルト(通電)部に触れないでください。非常に強い刺激が伝わります。
- 肌にEMSの強い痛みを感じた場合は使用を中止してください。

4 終了する

最初に電源/モード選択ボタンを押してから約5分で自動停止します。
任意の時間で停止したいときは、電源/モード選択ボタンを必要回数押し、停止してください。

- 肌に通電しないまま約30秒経過すると自動停止します。
- ※使用後に汚れが気になる場合はベルト部を軽く湿らせ、乾いた布やティッシュなどで拭きとってください。
- ※ベルトを体から外す際は、必ず電源を切ってから行ってください。



お手入れ・保管について



警告 ●必ず電源が「切」の状態で行ってください。

- ベルト（通電）部を軽く水で湿らせ、乾いた布やティッシュなどで汚れを拭きとってください。
- 3ヶ月に一度は充電してください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿、水気の近くは避けて保管してください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。



注意

●廃棄の際、充電残量がある場合は、電源が入らなくなるまで何回か使用して電池を使い切ってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない	電源/モード選択ボタンを押していますか？ →電源/モード選択ボタンを押してください。
	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →正しく充電してください。(P.7・P8)
	連続して使用していませんか？ →ご使用は1回20分以内にしてください。 内部温度が上がると動作が停止することがあります。
電源が切れる	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →正しく充電してください。(P.7・P8)
	使用開始後、約5分経つと自動的に電源が切れます。 →故障ではありません。
使用中、ランプが点滅する	充電が不足しています。 →正しく充電してください。(P.7・P8)

充電できない	長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？ →完全放電すると充電できませんので、1ヶ月に1度は充電してください。
EMSが弱い (感じない)	EMS強度が弱くありませんか？ →強度調節ボタン⊕を押して調整してください。 肌が乾燥していませんか？ →水をかけ、水分がある状態でご使用ください。
EMSが強い (痛い)	EMS強度が強くありませんか？ →強度調節ボタン⊖を押して調整してください。 ベルト全体が肌に触れていますか？ →部分的に触れると刺激が強くなります。全面が触れるようにしてください。
途中で止まる	肌に通電しないまま約30秒経過すると自動停止します。 →水分を与え、ベルト部全体に素肌が触れるようにしてください。
使用後に肌が 赤くなったり かゆくなったり する	長時間使用していませんか？ →肌や身体の状態を見ながら使用してください。赤みやかゆみがおさまるまで使用しないでください。 EMS強度レベルが強くありませんか？ →使用を中止し赤みやかゆみがおさまってから弱から再使用してください。



仕様

販売名	EMSベルトネクサ
商品番号	AX-FR921
製品サイズ	本体：(約) W70×L1250×H20 (mm) USBケーブル長：約1m
製品重量	約125g
タイマー	5分
電源電圧	DC5V (リチウムイオン電池)
内蔵電池	400mAh
充電時間	約2.5時間
連続使用時間	約4時間
素材	操作部：ABS樹脂 ベルト部：ポリ塩化ビニル
参考ウエストサイズ	約100cmまで
生産国	中国

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、次ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「EMSベルトネクサ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。



株式会社アテックス

ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス

0120-486-505

受付時間 平日10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	EMSベルトネクサ / AX-FR921				
お買上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買上日より6ヶ月 本体
★ お客様	お名前			★ 販売店	
	様				
	ご住所				
TEL : ()			-		

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無料保証期間はご購入の日から6ヶ月です。
- 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 保証書の再発行はいたしません。
- 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ATEX LOURDES