

体圧分散式ウレタンフォームマットレス/床ずれ防止用具

# Webly Mattress

## 取扱説明書

### ソフトとハードが選べる「リバーシブル」タイプ

専用カバー側面の商品タグ表示を目印にご使用面をお選びください。

### 交換タイプ

ベッドの上にそのまま敷いてご使用ください。

品質表示ラベル

商品タグ

Webly Mattress ソフト 830 CAPE

ハード Webly Mattress 830 CAPE

ウレタンフォーム

専用カバー

ハンドル



### 専用カバーの取付方法

専用カバー側面にある商品タグの「ソフト」を紫色ウレタンフォーム、「ハード」を青緑色ウレタンフォームの向きに合わせて取り付けてください。

三層構造ウレタンフォーム

4cm ソフト面：紫色  
4cm  
4cm ハード面：青緑色

830/CR-800



4 939810 011073

900/CR-801



4 939810 011080

830/SHORT/CR-802



4 939810 011097

900/SHORT/CR-803



4 939810 011103

## 安全にお使いいただくために

本品の取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

### 重要安全情報

本品のご使用中に生じる可能性のある事故を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。

従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



**従わなかった場合、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記にまとめて記載します。**

- 本品は身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。  
心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。
- 本品のご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。  
またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。  
病状悪化や事故の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。  
サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- ご使用になる前に本品上面に異物がないかご確認ください。  
異物があるままでご使用になるとケガをしったり、事故の原因になる場合があります。
- ご使用になれる面を選び、ベッドの上（または床・畳など）にそのまま敷いてご使用ください。
- 突起物のある場所に本品を敷いて使用しないでください。
- 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。体圧分散効果を妨げる場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れや本品破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- 本品の端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストープなどの火に近づけたり、本品の上での喫煙はお止めください。火災の原因になります。
- 新品でにおいがする場合、構成している材料のにおいであり異常ではありませんが、気になる場合は、専用カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、においが軽減します。
- ウレタンフォームに「永久歪み（へたリ）」や「破れ」が見られた場合は、交換をお願いいたします。
- 療養者の発汗などにより、マットレス内部には徐々に湿気が溜まります。  
カビ等の原因になるため、定期的に専用カバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨いたします。

## お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥・消毒・その他ご不明な点については、株式会社ケーブにお問い合わせください。

### ■専用カバー

#### 洗濯

（専用カバーは取り外して洗濯してください）

洗濯の際は、専用カバーに取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

- ・汚物（汚れ、便、血液等）を取り除いてください。
- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。



専用カバーを洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まることにより、洗濯機に負荷が掛かり故障や異常振動による転倒事故を招く危険があります。お客様の都合により洗濯機を使用される場合は、防水部分に溜まった水を大まかに取り除いた上で、脱水を行ってください。



- ・専用カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・ドライクリーニング（石油系は除く）、オートクレープは表面のポリウレタン樹脂を傷めますので、使用しないでください。
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

#### 清拭

- ・汚物（汚れ、便、血液等）を取り除いて、水または、中性洗剤を水で薄めたもので表面を拭いてください。
- ・消毒用エタノールを使用する場合は濃度70%以上83%以下、次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は濃度 1,000ppm (0.1%) 以下の清拭が可能です。



- 次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。
- 消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。

#### ※使用可能な消毒薬一覧（カバー）

- ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- ・MRガス
- ・過酸化水素水 3%以下
- ・塩化ベンゼトニウム 0.5%以下
- ・オゾンガス 0.5ppm以下
- ・ホルムアルデヒドガス
- ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下

使用  
不可

- ・クロロホルム
- ・シンナー
- ・クレゾール
- ・ベンジン
- ・メチルエーテル
- ・トルエン

### ■ウレタンフォーム

洗浄、消毒に対応していません。

※ウレタンフォームが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

## 保管方法について

- ・圧縮された状態や曲げた状態での保管は避けてください。「亀裂」や「永久歪み（ヘタリ）」の原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。
- ・高温・多湿の場所は避けてください。

### 仕様

セット	タイプ／品番	830／CR-800	900／CR-801	830/SHORT／CR-802	900/SHORT／CR-803
	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm
	重量	6.4kg	6.9kg	6.0kg	6.5kg
	マットレス材質	ソフト層：ウレタンフォーム（スリット加工） 中間層：ウレタンフォーム（抜き加工） ハード層：ウレタンフォーム（スリット加工）			
専用カバー	品番	CH-800	CH-801	CH-802	CH-803
	カバー材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮） カラー／ソフト面：紫色、ハード面：グレー色			

2404-A