

## 326アダプトエアエクストラライト2SN 使用説明書

この度はアモエナ 乳がん術後用シリコンパッドをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に、必ずお読みください。  
また、お読みになった後もいつでも読めるよう購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。

# amoena

日本シグマックス株式会社

【お客様窓口】0120-945-125(通話料無料)

【受付時間】10時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

【アモエナ公式オンラインショップ】

URL: <https://amoena-sx.jp/> メール: [amoena@sigmax.co.jp](mailto:amoena@sigmax.co.jp)

アモエナ シリコンパッドは高品質シリコン樹脂を使用しております。シリコン樹脂は弾力などの特性が経時的に変化することがあります。以下の【使用上の注意】、裏面の【使用方法】をよくお読みになってからご使用ください。

### 使用上の注意

#### ～シリコンパッド～


シリコンパッドはやさしくお取り扱いください。

- 清潔にご使用いただくために、ボディソープなどの低刺激性の石鹸でやさしく洗い、石鹸成分を洗い流した後、タオルなどの柔らかい布で軽く押さえるようにして水気を取ってください。
- 水で洗う時はシリコンパッドの開口部に水が入らないようにしてください。
- 開口部に水が入るおそれがあるため、泳いだり入浴したりする時には使用しないでください。
- ボリュームを調整する時は付属の専用ポンプセット以外のものは使用しないでください。
- 製品を使用しない時は、お買い上げ時のトレイに入れて保管してください。
- 直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 先の尖ったものなどでシリコンパッドに傷をつけないようにしてください。
- 挿入管を開口部から抜く時に、挿入管にシリコンオイルが付着することがありますが、シリコンパッドやポンプの機能および品質を損なうものではありません。柔らかい紙や布でふき取ってください。

### 製品内容

#### A.シリコンパッド

- ①開口部
- ②タグ

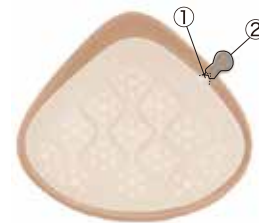

※お買い上げ時に開口部に差し込まれているタグを取ってご使用ください。

#### B.ポンプセット

- ③ポンプ
- ④バルブ
- ⑤チューブ
- ⑥挿入管



#### 【挿入イメージ】

①開口部に⑥挿入管を完全に挿入する



- シリコンオイルは無害ですが、手についた場合は洗い流すかふき取ってください。
- シリコンオイルがブラジャーや衣服につかないよう注意してください。しみがつく場合があります。
- ベンジン、アセトンなどの薬品類、アルコール、漂白剤などは使用しないでください。シリコンパッドに付着すると破損や変色などの原因になります。
- 長時間強い圧迫が加わる条件では使用しないでください。シリコンパッドが変形するおそれがあります。

素材:シリコン、ポリウレタン

#### ～ポンプセット～

- 中性洗剤で洗浄してください。アルコール消毒剤はポンプセットをいためる原因になるのでおすすめしません。

素材:ポリ塩化ビニル、シリコン、ポリプロピレン、ABS

## 使用方法

1. 専用ポケットつきブラジャーを装着し、シリコンパッドとポンプセットを準備します(シリコンパッドとポンプセットはまだ接続しません)。



2. ポンプ(表面: 製品内容③)を反対側のブラストラップに挟み、両手が自由になるようにします。このときチューブは体の中心側に出すようにします。装着する側のブラストラップを肩から外します。



3. 親指と人差し指ですり合わせるようにして、シリコンパッドの開口部(①)を開けます。挿入管(⑥)を開口部に挿入しシリコンパッドとポンプセットを接続します。このときお買い上げ時に差し込まれているタグ(②)は取ってください。



4. シリコンパッドをブラジャーのカップに入れます。挿入管がシリコンパッド開口部に完全に挿入されていることを確認してください。(表面:【挿入イメージ】参照)



5. ブラジーストラップを正しい位置に戻します。



6. ポンプ(③)を握ってシリコンパッドに空気を入れ、ボリュームを調整します。空気を抜く場合は、バルブ(④)のボタンを押しながら、シリコンパッドをやさしく押します。



7. ボリューム調整が終わったら、シリコンパッド開口部から挿入管をゆっくりと抜きます。このとき、挿入管にシリコンオイルが付着する場合があります。オイルがブラジャーや衣服につかないように注意してください。



8. シリコンパッドをカップから取り出し、ブラジャーのポケットに入れ、ストラップを正しい位置に戻します。



【注意】シリコンパッドの空気を出し入れする際は、挿入管を開口部に奥までしっかりと挿入してください。

### お願い

シリコンパッド、ポンプセットを廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

### 保証について

- 購入日より1年以内に、一般的な使用方法で製品に不具合が発生した場合に限り、無償でお取り替えします。
- ご購入の際は製品内容をお確かめください。製品には万全を期しておりますが、万一製品に不具合があった場合は、購入日より1週間以内にアモエナフリーコールまでご連絡ください。

日本シグマックス株式会社 アモエナフリーコール

TEL. 0120-945-125

【受付時間】10時～17時(平日)

※土日、祝日、年末年始を除く

下記の場合はお取り替えできないことがあります。

- 購入日より8日以上経過している場合。
- お客様のお取り扱いが原因で、パッケージ(箱)が破損している場合。
- お客様のお取り扱いが原因で、製品が破損または汚損している場合。

### 保証延長特典

右のQRコードよりアンケート付きの保証登録していただいた方には通常1年保証のところ、1年2か月といたします。

